


Весь спектр решений BD

для вашей бактериологической лаборатории

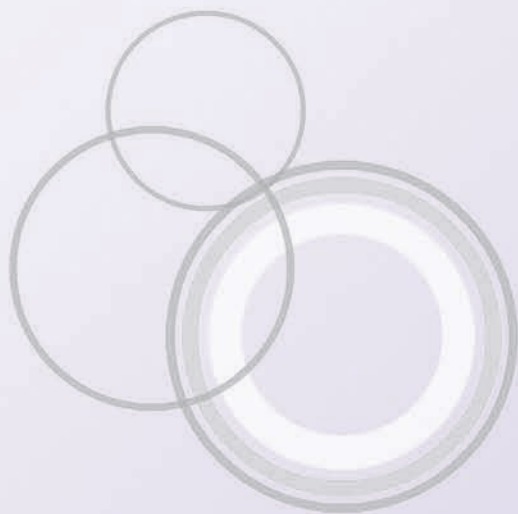

BD

Helping all people
live healthy lives

Каталог продукции

BD Diagnostics – Diagnostic System




Helping all people
live healthy lives

BD – это ведущая международная компания, которая разрабатывает, производит и продает медицинское оборудование, изделия медицинского назначения, приборы и реагенты. Деятельность компании направлена на улучшение здоровья людей по всему миру.

Основными направлениями работы компании BD являются улучшение систем доставки лекарственных средств, совершенствование диагностики инфекционных заболеваний и рака, а также поддержка разработки новых лекарственных средств. Ресурсы компании BD служат орудием в борьбе с наиболее серьезными заболеваниями человечества.

Подразделение BD Диагностические системы является мировым лидером по производству приборов для безопасного забора и транспортировки диагностических образцов, а также реагентов и диагностических систем для микробиологических исследований, помогающих выявлять широкий спектр инфекционных заболеваний, госпитальных инфекций и рака.

Компания Becton Dickinson – более 100 лет успеха и инноваций

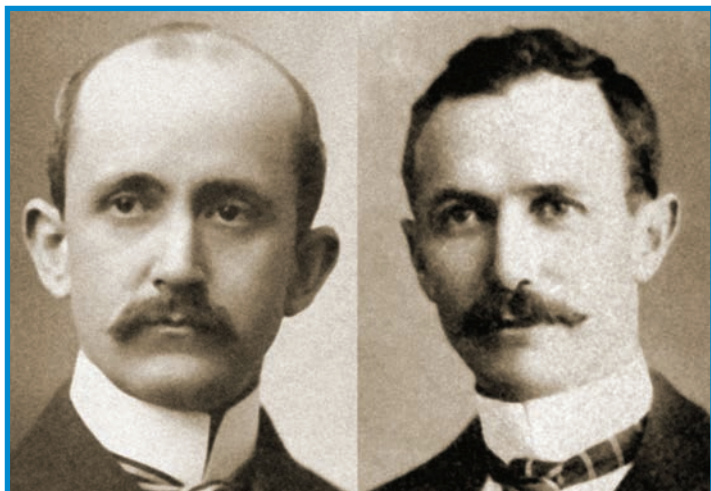

1971

В продаже появилась первая автоматизированная система гемокультивирования BD BACTEC™ 225

1965

Компания BD начала использование радиоиммунологического анализа в своих приборах. В конце 80-х компания начнет использование флуоресцентных и других нерадиоактивных методов

1959

Компания BD приобрела компанию Falcon Plastics Company, пионера в производстве одноразового лабораторного пластика

1955

Приобретение Балтиморской Биологической Лаборатории (BBL™) ознаменовало вступление компании BD на рынок диагностики инфекционных заболеваний



1949

Была запатентована первая вакуумная система взятия крови, в дальнейшем известная под маркой BD Vacutainer™



1924

Компания BD начала производство первого инсулинового шприца

1898

Компанией BD были приобретены права по патенту на стеклянный шприц, изобретенный В. Луэром в Париже

1897

Создание компании Becton, Dickinson and Company двумя ее основателями – Максвеллом В. Бектоном и Фарлейном С. Дикинсоном





2014

Представлен компактный модульный автоматизированный гемокультиватор BD BACTEC™ FX 40

2012

2012 Приобретение компании Kiestra

2011

В России представлен компактный анализатор для диагностики туберкулеза культуральным методом BD BACTEC™ MGIT™ 320

2008

Было представлено новейшее поколение автоматизированных систем гемокультивирования BD BACTEC™ FX

2006

Компания BD начала работать в области диагностики рака шейки матки, представив на рынок оборудование TriPath™

2001

Представлен автоматический бактериологический анализатор BD Phoenix™ 100 для идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антибактериальным препаратам

1998

Компания BD представила первую автоматизированную систему диагностики туберкулеза BD BACTEC™ MGIT™ 960, работающую по флуоресцентной технологии

1997

Присоединение компании Difco Laboratories – одного из ведущих производителей сред и реагентов для микробиологического анализа

1980

Была представлена первая автоматизированная система диагностики туберкулеза культуральным методом BD BACTEC™ 460TB System



СИСТЕМЫ ВЗЯТИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛА ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ..... 6

Системы BD CultureSwab™ с жидкой питательной средой	7
Системы BD CultureSwab™ PLUS с жидкой питательной средой	7
Стерильные тампоны	7
Системы BD Port-A-Cul™ для транспортировки анаэробов	8
Взятие образцов при инфекционном контроле	8
Бактериологические петли и иглы	8

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ, КУЛЬТИВИРОВАНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП МИКРООРГАНИЗМОВ..... 9

Среды для культивирования широкого спектра микроорганизмов	10
Среды по группам микроорганизмов	
Актиномицеты (аэробные)	11
Анаэробы (исключая клостридии)	11
Бордетеллы	12
Бруцеллы	12
Вибрионы	12
Грибы, дрожжи, плесневые грибы	13
Йерсинии	15
Кампилобактерии	15
Клостридии	15
Колиформные и протеи	15
Лактобактерии	16
Легионеллы	16
Лептоспиры	17
Листерии	17
Микобактерии	17
Микоплазмы	18
Нейссерии и гемофилы	18
Псевдомонады и другие неферментирующие микроорганизмы	19
Сальмонеллы и шигеллы	19
Стафилококки	20
Стрептококки (кроме группы D)	21
Трихомонады	22
Энтеробактерии	22
Энтерококки, стрептококки группы D	24
Среды специального назначения	24
Среды для изучения чувствительности к антимикробным препаратам	26
Среды для молекулярно-генетических исследований	27
Компоненты питательных сред, агароза	27
Добавки к питательным средам: селективные, ингибирующие, обогатительные	30
Готовые питательные среды на чашках	33
ХРОМагары для дифференциации микроорганизмов на чашке	40

СИСТЕМЫ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ BD GASPAK™ 41

Контейнерные системы BD GasPak™ EZ	42
Контейнерные системы BD GasPak™ 100 и 150	42
Газогенерирующие пакеты для контейнерных систем BD GasPak™	42
Пакетные системы BD GasPak™ EZ	43
Индикаторы анаэробных условий	43

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ГЕМОКУЛЬТИВИРОВАНИЯ BD BACTEC™ 44

Анализаторы BD BACTEC™	45
Среды BD BACTEC™	45
Системы безопасного взятия крови во флаконы BD BACTEC™	46

Приспособления для безопасного субкультивирования.....	46
Приспособления для прямого инокулирования панелей BD Phoenix™	47
Дополнительные принадлежности для анализаторов BD BACTEC™	47
РУЧНЫЕ (БЕСПРИБОРНЫЕ) СИСТЕМЫ И РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ	48
Реагенты для окраски микроорганизмов	50
Реагенты для идентификации микроорганизмов	50
Слайды с реагентами BD DrySlide™	52
Диски и полоски с реагентами BD TaHo™	52
Латексные тесты для быстрой идентификации патогенных микроорганизмов	55
Диски с антимикробными препаратами и диспенсеры BD Sensi-Disc™	57
Контрольные штаммы микроорганизмов BD Microtrol™	65
СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ BD CRYSTAL™	69
Панели BD Crystal™	70
Устройства для считывания панелей BD Crystal™	71
Дополнительные реагенты	71
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ BD PHOENIX™	72
Анализатор BD Phoenix™	73
Дополнительные принадлежности для анализатора BD Phoenix™	73
Реагенты BD Phoenix™	74
Комбинированные панели BD Phoenix™ для грамотрицательных микроорганизмов	74
Комбинированные панели BD Phoenix™ для грамположительных микроорганизмов	75
Комбинированные панели BD Phoenix™ для стрептококков	76
Панели для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.....	76
Панели BD Phoenix™ для идентификации микроорганизмов	77
Дополнительные принадлежности для анализатора BD Phoenix™	77
СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА BD BACTEC™ MGIT™	79
Анализаторы BD BACTEC™ MGIT™	80
Среды и реагенты BD BACTEC™ MGIT™	80
Идентификация M. tuberculosis complex	81
Определение лекарственной чувствительности на анализаторах BD BACTEC™ MGIT™	81
Дополнительные принадлежности BD BACTEC™ MGIT™	81
Дополнительные реагенты и среды	82
BD EpiCENTER™ – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ	84
BD EpiCenter™ для анализаторов BD BACTEC™ MGIT™ 960 и BD BACTEC™ MGIT™ 320	86
BD EpiCenter™ TB-eXiST	86
BD EpiCenter™ для анализатора BD Phoenix™ 100	86
BD EpiCenter™ для анализатора BD BACTEC™ FX	87
BD EpiCenter™ для анализаторов BD BACTEC™ 9120 и BD BACTEC™ 9240	87
Дополнительные модули BD EpiCenter™	88
BD Kiestra™ АВТОМАТИЗАЦИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ	89
Посевная станция BD Kiestra™ Inoqula™	90
Автоматизированная бактериологическая рабочая станция BD Kiestra™ WCA	91
Полностью автоматизированная микробиологическая лаборатория BD Kiestra™ TLA	92
BD Kiestra™ расходные материалы	92
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	94
УКАЗАТЕЛЬ КАТАЛОЖНЫХ НОМЕРОВ	109

Системы взятия и транспортировки материала для бактериологических исследований

Правильное взятие и транспортировка материала – залог качественного бактериологического анализа

BD CultureSwab™

BD CultureSwab™ – это стерильные, готовые к использованию системы для сбора, транспортировки и хранения клинических образцов. В комплект входит одноразовый стерильный тампон и пробирка с жидкой средой **Эймса, Стюарта или Кэри-Блэра**, в которую помещается тампон с биологическим материалом после взятия. Среда предназначена для поддержания жизнеспособности аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов при транспортировке в лабораторию в течение 24-48 часов. В зависимости от типа и размера тампона, системы применяются для взятия и транспортировки урогенитальных, уретральных, кожных мазков, а также мазков из рото- и носоглотки, глаз, ушей, ран. Используемая среда не влияет на качество окраски по Граму.



BD CultureSwab™ PLUS

BD CultureSwab™ PLUS – это системы с агаром Эймса и дополнительным реагентом, поглощающим кислород, предназначены для транспортировки аэробов и анаэробов в течение 24-48 часов. Для бактерий, требовательных к среде, таких как *Neisseria gonorrhoeae* и *Streptococcus pneumoniae*, а также для анаэробных микроорганизмов, следует выполнять посев в течение 24 часов.



BD Port-A-Cul™

BD Port-A-Cul™ – золотой стандарт транспортировки анаэробов! Система содержит уникальную транспортную среду, препятствующую диффузии кислорода к образцу, что обеспечивает жизнеспособность анаэробных микроорганизмов в течение 72 часов при комнатной температуре.




Стерильные тампоны

Стерильные тампоны **BD CultureSwab™** и **BD Falcon™ SWUBE™** в чистой пробирке предназначены для сухой транспортировки образцов или с реагентами, средами и растворами собственного приготовления.



Системы BD CultureSwab™ с жидкой питательной средой

220093	50 шт	BD CultureSwab™ - Liquid Amies (Single Swab)
BD КалчеСваб: тампон для забора пробы в пробирке с жидкой средой Эймса		
Стерильный полиуретановый тампон на пластиковом держателе.		
220099	50 шт	BD CultureSwab™ - Liquid Stuart (Single Swab)
BD КалчеСваб: тампон для забора пробы в пробирке с жидкой средой Стюарта		
Стерильный полиуретановый тампон на пластиковом держателе.		
220109	50 шт	BD CultureSwab™ - Liquid Stuart (Double Swab)
BD КалчеСваб: тампон для забора пробы двойной в пробирке с жидкой средой Стюарта		
Стерильный полиуретановый тампон на пластиковом держателе.		
220133	50 шт	BD CultureSwab™ - Liquid Stuart (Mini Tip Swab)
BD КалчеСваб: тампон для забора пробы мини в пробирке с жидкой средой Стюарта		
Мини-тампон на мягком алюминиевом держателе.		
220097	50 шт	BD CultureSwab™ - Cary-Blair Agar (Single Swab)
BD КалчеСваб: тампон для забора пробы в пробирке с агаром Кэри-Блэра		
Для транспортировки образцов фекалий, которые могут содержать патогенные микроорганизмы.		

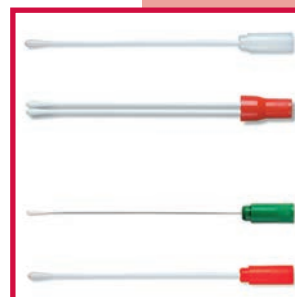

Системы BD CultureSwab™ PLUS с жидкой питательной средой

220116	50 шт	BD CultureSwab™ PLUS - Amies Gel without Charcoal (Single Swab)
BD КалчеСваб ПЛЮС: тампон для забора пробы в пробирке со средой Эймса без угля		
Стерильный полиуретановый тампон на пластиковом держателе в агаре Эймса без угля.		
220121	50 шт	BD CultureSwab™ PLUS - Amies Gel with Charcoal (Single Swab)
BD КалчеСваб ПЛЮС: тампон для забора пробы в пробирке со средой Эймса с углем		
Стерильный полиуретановый тампон на пластиковом держателе в агаре Эймса с углем.		



Стерильные тампоны

220115	100 шт	BD CultureSwab™ - Sterile (Single Swab)
BD КалчеСваб: тампон для забора пробы стерильный		
Стерильный тампон на пластиковом держателе в пробирке.		
220710	200 шт	BD Falcon™ SWUBE™ - 15 cm, Single Polyester Swab (Screw Cap)
220690	1000 шт	BD Falcon™ SWUBE™ - 15 cm, Single Polyester Swab (Friction Cap)
BD Сваб: тампон для забора пробы полиэстер, 15 см		
Стерильный тампон присоединен к крышке, закручивающейся или плотно присоединяющейся к чистой пробирке размером 16x150 мм. Может использоваться для сухой транспортировки образцов или с реагентами, средами и растворами собственного приготовления.		
220210	200 шт	BD Falcon™ SWUBE™ - 15 cm, Single Cotton Swab (Screw Cap)
220090	200 шт	BD Falcon™ SWUBE™ - 15 cm, Single Cotton Swab (Friction Cap)
BD Сваб: тампон для забора пробы хлопок, 15 см		
Стерильный тампон присоединен к крышке, закручивающейся или плотно присоединяющейся к чистой пробирке размером 16x150 мм. Может использоваться для сухой транспортировки образцов или с реагентами, средами и растворами собственного приготовления.		





Системы BD Port-A-Cul™ для транспортировки анаэробов

221602	10x20 мл	BD Port-A-Cul™ - Transport Jar (Sterile Pack)
--------	----------	---

BD Порт-А-Кул: стерильная упаковка для забора проб

Банка с завинчивающейся крышкой, содержит 20 мл гелеобразной среды. Идеально для транспортировки тканевых и биопсийных образцов. Широкое горлышко диаметром 2.5 см позволяет легко вносить образец.

221606	10x11 мл	BD Port-A-Cul™ - Tube
--------	----------	-----------------------

BD Порт-А-Кул: пробирки для забора проб

Пробирка с завинчивающейся крышкой содержит 11 мл гелеобразной среды.

221607	10x11 мл	BD Port-A-Cul™ - Tube & Swabs (Sterile Pack)
--------	----------	--

BD Порт-А-Кул: пробирки с тампонами для забора проб в стерильной упаковке

Каждый набор содержит пробирку с завинчивающейся крышкой с 11 мл гелеобразной среды и 2 стерильных тампона.

221609	10x5 мл	BD Port-A-Cul™ - Vial (Sterile Pack)
--------	---------	--------------------------------------

BD Порт-А-Кул: флаконы стерильные для забора проб

Стерильные флаконы с 5 мл гелеобразной среды. Используются для взятия жидких образцов в чистых зонах, например в хирургических помещениях.

Взятие образцов при инфекционном контроле

220518	200 шт	BD Sterile Pack Swabs
--------	--------	-----------------------

BD Стерильный тампон для мониторинга окружающей среды

Специально создан для взятия проб с различных поверхностей при проведении инфекционного контроля в медицинских учреждениях, для фармацевтической и пищевой промышленности. Полипропиленовая пробка с завинчивающейся крышкой заполнена 10 мл изотонического раствора, который поддерживает жизнеспособность микроорганизмов и нейтрализует действие дезинфектантов. Двойная упаковка и облучение гамма-лучами обеспечивают максимальную стерильность и долгий срок годности.



Бактериологические петли и иглы

220214	250 шт	Sterile disposable Inoculating Loops - 1 µl (Light Green)
--------	--------	---

Стерильные одноразовые бактериологические петли, 1 мкл (зеленые)

220215	1000 шт	Sterile disposable Inoculating Loops - 1 µl (Light Green)
--------	---------	---

Стерильные одноразовые бактериологические петли, 1 мкл (зеленые)

220216	250 шт	Sterile disposable Inoculating Loops - 10 µl (Light Blue)
--------	--------	---

Стерильные одноразовые бактериологические петли, 10 мкл (голубые)

220217	1000 шт	Sterile disposable Inoculating Loops - 10 µl (Light Blue)
--------	---------	---

Стерильные одноразовые бактериологические петли, 10 мкл (голубые)

220218	1000 шт	Sterile disposable Inoculating Needles - 1 µl (Violet)
--------	---------	--

Стерильные одноразовые бактериологические иглы, 1 мкл (фиолетовые)



Питательные среды для выделения, культивирования и идентификации различных групп микроорганизмов

В основе коммерческих разработок компании Becton Dickinson в области микробиологии лежат научные разработки и достижения специалистов Балтиморской Биологической Лаборатории (BBL™) и компании Difco™ – крупнейших американских научно-производственных комплексов, работающих в области микробиологии

С 1997 года фирма Difco™ вошла в состав компании BD





Компания BD предлагает:

- Сухие основы для приготовления питательных сред и готовые сухие среды для селективного выделения, культивирования и дифференциации микроорганизмов, включая среды для энтеробактерий, стафилококков, стрептококков, анаэробов, дрожжей, грибов, нейссерий и гемофилов
- Питательные среды специального назначения – пептонная вода, агар с феноловым красным, среды с антибиотиками, среда Мюллер Хинтон для исследования чувствительности к антимикробным препаратам
- Сухие компоненты питательных сред – агары, желатин, пептон, дрожжевой экстракт, гемоглобин бычий
- Добавки к питательным средам – обогатительные добавки для культивирования микобактерий, смеси антибиотиков для культивирования и селективного выделения патогенных нейссерий, сахара
- Готовые питательные среды BD CHROMagar™ для идентификации микроорганизмов непосредственно на чашке



Более подробно ознакомиться с номенклатурой и составом сред можно в каталоге «The Difco™ & BBL™ Manual of Microbiological Culture Media»

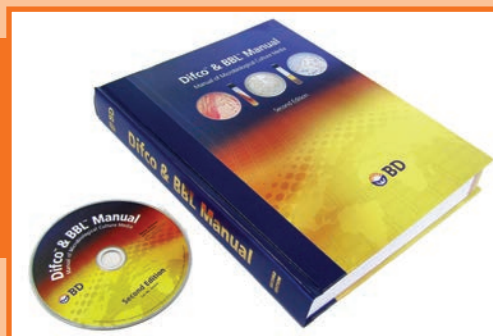

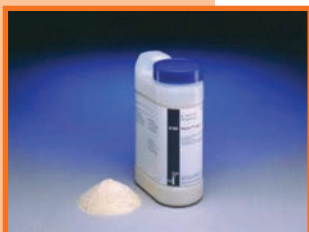

Среды для культивирования широкого спектра микроорганизмов

237400	100 г	Brain Heart Infusion
237500	500 г	Сердечно-мозговая вытяжка
211059	500 г	Среда (бульон) общего назначения для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов, включая аэробные и анаэробные бактерии, из различного типа клинического и неклинического материала.
237200	2 кг	
241820	100 г	Brain Heart Infusion Agar
241830	500 г	Агар с сердечно-мозговой вытяжкой
211065	500 г	Среда общего назначения для культивирования широкого спектра микроорганизмов, включая бактерии, дрожжи и плесневые грибы. При добавлении 5%-10% овечьей крови используется для выделения и культивирования грибов из клинического и неклинического материала.
241810	2 кг	
299070	500 г	Brain Heart Infusion Broth, Modified
		Бульон с сердечно-мозговой вытяжкой модифицированный
		Для культивирования требовательных к питательной среде микроорганизмов.
211037	500 г	Blood Agar Base
211038	2,27 кг	Основа для приготовления кровяного агара
		Среда для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов. При добавлении крови может использоваться для культивирования требовательных микроорганизмов и гемолитических стрептококков.
211124	500 г	Columbia Agar Base
211125	2,27 кг	Основа для приготовления колумбийского агара
		Высокопитательная среда общего назначения для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов из клинических и неклинических образцов.
279240	500 г	Columbia Blood Agar Base
279220	2,2 кг	Основа для приготовления кровяного колумбийского агара
		Среда для культивирования требовательных микроорганизмов, используется с добавлением крови или без.
294420	500 г	Columbia Broth
		Бульон колумбийский
		Для культивирования требовательных микроорганизмов. В частности, используется для культивирования крови.
297596	500 г	Columbia II Agar
		Агар колумбийский II
		Высокопитательная среда общего назначения для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов из клинических и неклинических образцов.
211443	500 г	Mueller Hinton Broth
275730	500 г	Бульон Мюллер Хинтон
275710	2 кг	Среда общего назначения для культивирования широкого спектра микроорганизмов. Не содержит добавок ионов кальция и магния.
212000	100 г	Nutrient Agar
213000	500 г	Агар питательный
211665	2 кг	Среда общего назначения для культивирования и подсчета широкого спектра микроорганизмов в образцах воды, сточных вод, кала и др.
233000	100 г	Nutrient Broth
234000	500 г	Бульон питательный
231000	2 кг	Для культивирования многих видов нетребовательных микроорганизмов.

236950	500 г	Tryptic Soy Agar
236920	2 кг	Агар Триптик соевый Агар TSA для культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов. С добавлением крови используется для изучения гемолитических реакций.
211824	100 г	Tryptic Soy Broth
211825	500 г	Бульон Триптик соевый
211822	2 кг	Бульон TSB. Жидкая среда общего назначения для культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов, в том числе анаэробов и грибов, из различного клинического и неклинического материала.
211043	500 г	BD Trypticase™ Soy Agar
211046	2,27 кг	Агар соевый «Триптиказа» Для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов. Не используется для анаэробов.
212305	500 г	BD Trypticase™ Soy Agar, Modified (TSA II) Агар соевый «Триптиказа» модифицированный Агар TSA II при добавлении крови используется для культивирования требовательных микроорганизмов и визуализации гемолитических реакций многих бактерий.
211768	500 г	Trypticase™ Soy Broth
211771	2,27 кг	Бульон соевый «Триптиказа»
297354	100x10 мл	Среда общего назначения для культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов, в том числе анаэробов и грибов, из различного клинического и неклинического материала.



Среды по группам микроорганизмов


Актиномицеты (аэробные)

210920	500 г	Actinomycetes Broth Бульон для актиномицетов Для культивирования актиномицетов
212168	500 г	Actinomycete Isolation Agar Агар для выделения актиномицетов Для выделения и культивирования актиномицетов из почвы и воды. Для приготовления среды необходим глицерин (кат. № 228210, 228220).

Анаэробы (исключая клостридии)

253610	500 г	Anaerobic Agar Агар для анаэробов Для выделения и культивирования широкого спектра анаэробных микроорганизмов.
212189	500 г	Schaedler Agar Агар Шедлера Используется с добавлением крови или без для культивирования и подсчета аэробных и анаэробных микроорганизмов.
212191	500 г	Schaedler Broth Бульон Шедлера Для культивирования аэробных и анаэробных микроорганизмов, используется с добавлением крови или обогатительных добавок, или без них.

! Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.

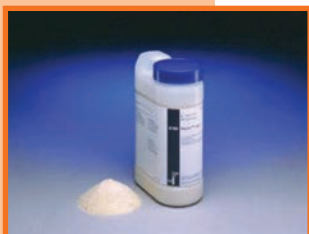

211716	500 г	Thioglycollate Medium, Brewer Modified
Среда тиогликолевая Брера модифицированная		
Для культивирования облигатных анаэробов, микроаэрофилов и факультативных микроорганизмов.		
225640	100 г	Thioglycollate Medium, Fluid
225650	500 г	Среда тиогликолевая жидкая
211260	500 г	
225620	2 кг	Для определения стерильности биопрепаратов и культивирования анаэробов, аэробов и микроаэрофилов.
211263	2,27	

Бордетеллы

248200	500 г	Bordet Gengou Agar Base
Основа для приготовления агара Борде-Жангу		
С добавлением крови и глицерина (кат. № 228210, 228220) используется для выделения и культивирования Bordetella pertussis и других бордетелл. Среда становится селективной при добавлении метициллина.		
289410	500 г	Charcoal Agar
Угольный агар		
Для культивирования требовательных к питательной среде микроорганизмов, особенно Bordetella pertussis. Используется для производства вакцин и хранения клеточных культур.		
298123	500 г	Regan-Lowe Charcoal Agar Base
Основа для приготовления угольного агара Реган-Лоу		
Селективная среда для выделения Bordetella pertussis из клинических образцов.		

Бруцеллы

211086	500 г	Brucella Agar
Агар для бруцелл		
Среда для культивирования требовательных микроорганизмов, используется для культивирования бруцелл.		
211088	500 г	Brucella Broth
Бульон для бруцелл		
Для культивирования бруцелл и выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов, в том числе требовательных к питательной среде.		
264300	500 г	Tryptose Agar
264100	2 кг	Агар с триптозой
Для культивирования широкого спектра требовательных микроорганизмов, особенно для выделения бруцелл.		
223220	500 г	Tryptose Blood Agar Base
223210	2 кг	Основа для кровяного агара с триптозой
При добавлении крови используется для выделения, культивирования и изучения гемолитических реакций для требовательных микроорганизмов.		
262200	500 г	Tryptose Broth
Бульон с триптозой		
Для культивирования бруцелл и других требовательных микроорганизмов.		

Вибрионы

211102	500 г	Cary and Blair Transport Medium
Транспортная среда Кэри-Блэра		
Для сбора, транспортировки и сохранения микробиологических образцов, особенно содержащих Vibrio cholerae.		

265020	500 г	TCBS Agar
Агар TCBS Тиосульфат-цитратный агар с желчью и сахарозой используется для селективного выделения <i>Vibrio cholerae</i> и <i>Vibrio parahaemolyticus</i> из различного клинического и неклинического материала.		



Грибы, дрожжи, плесневые грибы

211027	500 г	BiGGY Agar
Агар BiGGY Агар BiGGY (сульфит висмута, глюкоза, глицин, дрожжи) является селективной и дифференциальной средой для выделения и первичной идентификации <i>Candida</i> spp.		

233910	500 г	Czapek Solution Agar
Агар с раствором Чапека Для культивирования грибов и бактерий, способных потреблять неорганический азот.		

233810	500 г	Czapek-Dox Broth
Бульон Чапека-Докса Для культивирования грибов и бактерий, способных потреблять неорганический азот.		



212330	500 г	Dermatophyte Test Medium Base
Основа среды для анализа дерматофитов Селективная и дифференцирующая среда для определения и идентификации дерматофитов из клинических и ветеринарных образцов.		

268510	500 г	HC Agar Base
Основа для приготовления агара HC При добавлении полисорбата 80 используется для подсчета плесневых грибов в косметических продуктах.		

211401	500 г	Malt Agar
224200	500 г	Агар солодовый
Для выделения и культивирования дрожжей и плесневых грибов из пищевых образцов.		


211220	500 г	Malt Extract Agar
Агар на экстракте солода Для выделения и подсчета дрожжей и плесневых грибов.		

240520	500 г	Mycological Agar
Агар микологический Для культивирования и хранения грибов, для демонстрации хромогенеза и подсчета дрожжей и плесневых грибов.		

211450	500 г	BD Mycophil™ Agar with Low pH
Агар «Микофил» с низким pH Неселективная среда общего назначения для работы с дрожжами и плесневыми грибами. Рекомендуется использовать в параллели с селективными средами, т.к. некоторые из них ингибируют рост грибов. Нет необходимости доведения pH молочной или винной кислотой.		

211462	500 г	BD Mycosel™ Agar
Агар «Микозел» Высотокселективная среда с циклогексимидом и хлорамфениколом для выделения патогенных грибов из материала, содержащего другие грибы и бактерии.		

❗ Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.

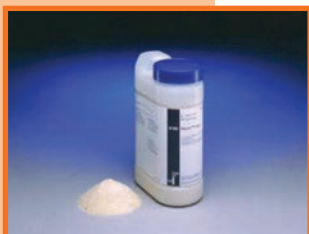

211546	500 г	BD Phytone™ Yeast Extract Agar Агар «Фитон» дрожжевой Для селективного выделения дерматофитов, особенно <i>Trichophyton verrucosum</i> , и других патогенных грибов из клинических образцов.
213300	100 г	Potato Dextrose Agar
213400	500 г	Агар картофельный декстрозный
213200	2 кг	Для культивирования дрожжей и плесневых грибов из продуктов питания и молочных продуктов.
254920	500 г	Potato Dextrose Broth Бульон картофельный декстрозный Для культивирования дрожжей и плесневых грибов.
211567	100 г	Rice Extract Agar Агар с экстрактом риса Для активизации образования хламидоспор у <i>Candida albicans</i> и <i>Candida stellatoidea</i> , что позволяет дифференцировать их от других <i>Candida</i> .
274720	500 г	Sabouraud Agar, Modified
274710	2 кг	Агар Сабуро модифицированный Для культивирования дерматофитов и других патогенных и непатогенных грибов из клинического и неклинического материала.
210940	100 г	Sabouraud Dextrose Agar
210950	500 г	Агар Сабуро декстрозный
211584	500 г	Для культивирования патогенных и непатогенных грибов, особенно дерматофитов. Среда становится более селективной для грибов при добавлении антимикробных препаратов.
211661	2 кг	
211585	2,27	
238230	500 г	Sabouraud Dextrose Broth
238210	2 кг	Бульон Сабуро декстрозный Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и кислотолюбивых микроорганизмов.
211020	500 г	Sabouraud Maltose Agar Агар Сабуро мальтозный Модификация декстрозного агара Сабуро, для селективного культивирования дрожжей, плесневых грибов и кислотолюбивых микроорганизмов. pH 5.6.
242910	500 г	Sabouraud Maltose Broth Бульон Сабуро мальтозный Модификация декстрозного бульона Сабуро, для селективного культивирования дрожжей, плесневых грибов и кислотолюбивых микроорганизмов. pH 5.6.
264210	500 г	Sabouraud Medium, Fluid Среда Сабуро жидкая Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и кислотолюбивых микроорганизмов. Используется для тестирования стерильных жидкостей.
247110	500 г	WL Nutrient Broth Бульон питательный WL Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и бактерий, участвующих в процессах пивоварения и других промышленных процессах ферментации и брожения.
242420	500 г	WL Nutrient Medium Среда питательная WL Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и бактерий, участвующих в процессах пивоварения и других промышленных процессах ферментации и брожения.

271210	500 г	YM Agar
Агар на дрожжевой муке		
Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и других ацидофильных микроорганизмов.		

242720	500 г	YPD Agar
Агар YPD		
Для культивирования дрожжей при проведении молекулярных микробиологических исследований.		



Йерсинии

218172	500 г	Yersinia Selective Agar Base (CIN Agar Base)
Основа селективного агара для йерсиний		
Смесь антимикробных препаратов CIN (цефсулодин, иргасан, новобиоцин) обеспечивает дифференциальное и селективное выделение <i>Yersinia enterocolitica</i> из различных клинических и неклинических образцов. Необходимо использовать с антимикробной добавкой для йерсиний (кат. № 231961).		



Кампилобактерии

218201	500 г	Campylobacter Agar Base
Основа для приготовления агара для кампилобактерий		
Для выделения и культивирования кампилобактерий, необходимо добавление крови и антибиотиков.		

Клостридии

264120	500 г	Differential Reinforced Clostridial Agar (DRCA)
Агар для выделения сульфит-редуцирующих клостридий		
Для культивирования и подсчета сульфит-редуцирующих клостридий в пищевых образцах.		

218081	500 г	Reinforced Clostridial Medium (RCM)
Среда для клостридий улучшенная		
Неселективная обогатительная среда для культивирования и подсчета анаэробов, особенно клостридий и бифидобактерий, и других видов бактерий из клинических и пищевых образцов.		

211690	500 г	TSN Agar
Агар TSN		
Агар «Триптиказа» сульфитный с неомицином используется для селективного выделения <i>Clostridium perfringens</i> .		

Колиформные и протей

211199	500 г	Endo Agar
Эндо агар		
Дифференциальная среда для выделения колиформных и других энтеробактерий.		

227210	500 г	Urea Broth
Бульон с мочевиной		
Для дифференциации микроорганизмов, особенно <i>Proteus</i> spp., основанной на выделении уреазы.		

❗ Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.



Лактобактерии

288210	500 г	Lactobacilli MRS Agar Агар MPC для лактобацилл Для выделения, подсчета и культивирования Lactobacilli spp.
288130	500 г	Lactobacilli MRS Broth
288110	2 кг	Бульон MPC для лактобацилл Для выделения, подсчета и культивирования Lactobacilli spp.
211327	500 г	LBS Agar Агар LBS Для селективного выделения и подсчета лактобацилл.
218671	500 г	Raka-Ray No. 3 Medium Среда Рака-Рей № 3 Рекомендуется для выделения молочно-кислых пивных бактерий.
218081	500 г	Reinforced Clostridial Medium (RCM) Среда для клостридий улучшенная Неселективная обогатительная среда для культивирования и подсчета анаэробов, особенно клостридий и бифидобактерий, и других видов бактерий из клинических и пищевых образцов.
248020	500 г	Rogosa SL Agar Агар Рогоза SL Для селективного культивирования лактобактерий из орального и вагинального трактов и образцов кала.
211794	500 г	Tomato Juice Agar Агар на томатном соке Для культивирования и подсчета лактобактерий, особенно Lactobacillus acidophilus.
285610	500 г	Universal Beer Agar Агар пивной универсальный Для культивирования микроорганизмов, используемых в пивоварении.
242510	500 г	WL Differential Medium Среда дифференциальная WL Среда ингибирует рост дрожжей без ингибирования роста бактерий, присутствующих в пиве. Используется для выделения бактерий, участвующих в пивоварении и других промышленных процессах ферментации и брожения.
247110	500 г	WL Nutrient Broth Бульон питательный WL Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и бактерий, участвующих в процессах пивоварения и других промышленных процессах ферментации и брожения.
242420	500 г	WL Nutrient Medium Среда питательная WL Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и бактерий, участвующих в процессах пивоварения и других промышленных процессах ферментации и брожения.

Легионеллы

218301	500 г	Legionella Agar Base Основа для приготовления агара для легионелл Используется с добавкой (кат. № 233901) для выделения Legionella spp. из клинических и неклинических образцов.
--------	-------	--

Лептоспир

279410	500 г	Leptospira Medium Base EMJH
--------	-------	-----------------------------

Основа для приготовления среды EMJH для лептоспир

Используется с добавкой (кат. № 279510) для культивирования и хранения лептоспир.



Листерии

222220	500 г	Listeria Enrichment Broth
--------	-------	---------------------------

Бульон селективный для листерий

Селективная обогатительная среда для *Listeria monocytogenes* из продуктов питания.

220530	500 г	Listeria Enrichment Broth, Modified
--------	-------	-------------------------------------

245152	2 кг	Бульон селективный для листерий модифицированный
--------	------	--

Селективная обогатительная среда для *Listeria monocytogenes* из сырого и пастеризованного молока.



222120	500 г	LPM Agar Base
--------	-------	---------------

Основа для приготовления агара ЛПМ

Используется с добавкой (кат. № 212402) для выделения и культивирования *Listeria monocytogenes*.

222530	500 г	Oxford Medium Base
--------	-------	--------------------

Основа для приготовления среды оксфордской

Для выделения и дифференциации *Listeria monocytogenes*. Используется совместно с добавкой (кат. № 211763).

263620	500 г	PALCAM Medium Base
--------	-------	--------------------

Основа для приготовления среды ПАЛКАМ

Для выделения и культивирования листерий, особенно из продуктов питания и молочных продуктов. Используется совместно с антимикробной добавкой ПАЛКАМ (кат. № 263710).

223510	500 г	Universal Preenrichment Broth
--------	-------	-------------------------------

Бульон универсальный обогащенный

Для одновременного восстановления угнетенных сальмонелл и листерий из продуктов питания.

222330	500 г	UVM Modified Listeria Enrichment Broth
--------	-------	--

222320	10 кг	Бульон UVM для селективного культивирования листерий
--------	-------	--

Селективная обогатительная среда для быстрого выделения *Listeria monocytogenes*.

Микобактерии

244420	500 г	Lowenstein Medium Base
--------	-------	------------------------

Основа для приготовления среды Левенштейн


Среда для выделения и культивирования микобактерий. Также является основой для селективных, дифференциальных и обогатительных сред для микобактерий.

211393	500 г	MacConkey Agar without Crystal Violet
--------	-------	---------------------------------------

247010	500 г	Агар МакКонки без добавления кристаллического фиолетового
--------	-------	---

Для выделения и дифференциации кишечных микроорганизмов (растут в том числе стафилококки и энтерококки). Также для разделения *Mycobacterium fortuitum* и *Mycobacterium chelonae* от других быстро растущих микобактерий.

! Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.

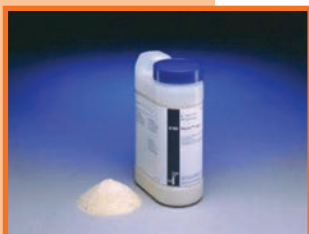

220958	10 шт.	Middlebrook and Cohn 7H10 Agar
220959	100 шт.	Агар Миддлбрук и Кох 7Н10 Используется для выделения и культивирования <i>Mycobacterium Tuberculosis</i> . 220958 и 220959 – пробирки со скошенной питательной средой, тип А
262710	500 г	Middlebrook 7H10 Agar Агар Миддлбрук 7Н10 Для выделения, культивирования и постановки теста на чувствительность микобактерий. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой ОАДС для среды Миддлбрук (кат. № 212351, 211886, 212240) и глицерином.
212203	500 г	Middlebrook 7H11 Agar Base Основа для приготовления агара Миддлбрук 7Н11 Для выделения и культивирования микобактерий, особенно <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , из клинических и неклинических образцов. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой ОАДС для среды Миддлбрук (кат. № 212351, 211886, 212240) и глицерином.
271310	500 г	Middlebrook 7H9 Broth Бульон Миддлбрук 7Н9 Для культивирования микобактерий и приготовления суспензии для постановки анализа на антибиотикочувствительность. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой Миддлбрук (кат. № 211887, 212352) и глицерином или Твином 80.

Микоплазмы

211456	500 г	Mycoplasma Agar Base (PPLO Agar Base) Основа для приготовления агара для микоплазм Для выделения и культивирования <i>Mycoplasma spp.</i> (PPLO - <i>Pleuropneumonia</i> -подобных организмов). Используется совместно с добавками для микоплазм (кат. № 283610 или 212292).
212346	500 г	Mycoplasma Broth Base (Frey)
212347	2.27 кг	Основа для приготовления бульона для микоплазм Для культивирования микоплазм птиц.
211458	500 г	Mycoplasma Broth Base (PPLO Broth Base) Основа для приготовления бульона для микоплазм Для выделения и культивирования <i>Mycoplasma spp.</i> (PPLO - <i>Pleuropneumonia</i> -подобных организмов). Используется совместно с добавками для микоплазм (кат. № 283610 или 212292).
241210	500 г	PPLO Agar (Mycoplasma Agar) Агар для микоплазм ППЛО Для выделения и культивирования <i>Mycoplasma spp.</i> (PPLO - <i>Pleuropneumonia</i> -подобных организмов). Используется совместно с добавками для микоплазм (кат. № 283610 или 212292).
255420	500 г	PPLO Broth (Mycoplasma Broth) Бульон для микоплазм ППЛО Для выделения и культивирования <i>Mycoplasma spp.</i> (PPLO - <i>Pleuropneumonia</i> -подобных организмов). Используется совместно с добавками для микоплазм (кат. № 283610 или 212292).

Нейссерии и гемофилы

211106	500 г	Casman Agar Base Основа для приготовления агара Кэсмана Используется для культивирования требовательных к питательной среде патогенных микроорганизмов, таких как <i>Haemophilus influenzae</i> и <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , из клинических образцов.
228950	500 г	GC Medium Base Основа для приготовления среды GC Для выделения и культивирования <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и других требовательных микроорганизмов, используется с различными добавками.

212392	500 г	Hemoglobin, Bovine (Freeze-Dried)
Гемоглобин бычий лиофилизированный для микробиологии		
Используется как компонент питательных сред. Содержит гемин, необходимый для культивирования <i>Haemophilus</i> spp., и усиливающий рост <i>Neisseria</i> spp.		
260300	500 г	Tryptose Phosphate Broth
260100	2 кг	Бульон с триптозой фосфатный
Для культивирования требовательных микроорганизмов.		



Псевдомонады и другие неферментирующие микроорганизмы

285420	500 г	Cetrimide Agar Base - BD Pseudosei™ Agar
Основа для приготовления агара с цетримидом		
Агар «Псевдозель». Селективная среда для выделения и идентификации <i>Pseudomonas aeruginosa</i> . Необходимо добавление глицерина (кат. № 228210, 228220).		
244820	500 г	Pseudomonas Agar F
Агар Ф для псевдомонад		
Среда, также известная под названием Фло агар, используется для выявления выработки флуоресцина <i>Pseudomonas</i> spp.		
244910	500 г	Pseudomonas Agar P
Агар П для псевдомонад		
Среда, также известная под названием Тех агар, используется для выявления выработки пиоцианина <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .		



Сальмонеллы и шигеллы

274210	500 г	Acetate Differential Agar
Агар ацетатный дифференциальный		
Для дифференциации <i>Shigella</i> spp. от <i>Escherichia coli</i> .		
273300	500 г	Bismuth Sulfite Agar
Висмут-сульфит агар		
Высокоселективная среда (модифицированная формула Уилсон и Блэр) для выделения сальмонелл, особенно <i>Salmonella typhi</i> , из пищевых и клинических образцов.		
228530	500 г	Brilliant Green Agar
Агар бриллиантовый зеленый		
Высокоселективная среда для выделения сальмонелл (кроме <i>Salmonella typhi</i>) из образцов фекалий и другого материала. Может использоваться с добавлением новобиоцина (кат. № 231971).		
212367	500 г	Buffered Peptone Water
218105	500 г	Забуференная пептонная вода
218103	2 кг	Для предварительного обогащения пищевых образцов для повышения выявляемости <i>Salmonella</i> spp.
212345	2,27 кг	
211144	500 г	DCLS Agar
Агар DCLS		
Агар DCLS (дезоксихолат, цитрат, лактоза, сахароза) является умеренно-селективной средой для выделения сальмонелл и шигелл из образцов фекалий.		

! Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.



285340	500 г	Hektoen Enteric Agar
285310	2 кг	Гектоен энтеро агар Селективная среда для выделения и культивирования грамотрицательных кишечных микроорганизмов, особенно шигелл, из клинических и неклинических образцов.
218681	500 г	Rappaport-Vassiliadis Medium, Modified (Semisolid) Среда Раппапорта-Вассилиадиса модифицированная полужидкая При добавлении новобиоцина (кат. № 231971) используется для быстрого выявления подвижных <i>Salmonella spp.</i> в образцах пищи и кала.
218581	500 г	Rappaport-Vassiliadis R10 Broth Бульон Раппапорта-Вассилиадиса Для селективного обогащения <i>Salmonella spp.</i> из молочных и мясных продуктов, образцов кала, сточных вод и др.
211597	500 г	Salmonella Shigella Agar
274500	500 г	Агар Сальмонелла-Шигелла
212118	2 кг	Селективная дифференциальная среда для выделения патогенных энтеробактерий, особенно принадлежащих роду <i>Salmonella</i> . Не рекомендуется для первичного выделения шигелл.
211600	2,27 кг	
227540	500 г	Selenite Broth Бульон селенитовый Обогатительная среда для выделения сальмонелл из образцов кала, мочи, воды, продуктов питания и других материалов, имеющих санитарное значение.
268740	500 г	Selenite Cystine Broth Бульон селенитовый с цистином Селективная обогатительная среда для выделения сальмонелл из образцов кала, продуктов питания, воды, фармацевтических продуктов и других материалов, имеющих санитарное значение.
211620	500 г	Simmons Citrate Agar Цитратный агар Симмонса Для дифференциации грамотрицательных бактерий, основанной на потреблении цитрата.
210430	500 г	Tetrathionate Broth Base
210420	2 кг	Основа для приготовления тетратионатного бульона При добавлении йодного раствора используется как селективная обогатительная среда для выделения сальмонелл из образцов фекалий, мочи, продуктов питания и других образцов, имеющих санитарное значение.
223510	500 г	Universal Preenrichment Broth Бульон универсальный обогащенный Для одновременного восстановления угнетенных сальмонелл и листерий из продуктов питания.
278850	500 г	XLD Agar
278820	2 кг	Агар дезоксихолатный с ксилозой и лизином (XLD) Селективная дифференциальная среда для выделения грамотрицательных энтеробактерий, особенно <i>Shigella spp.</i> и <i>Salmonella spp.</i>

Стафилококки

240920	500 г	Azide Blood Agar Base Основа для приготовления кровяного агара с азидом натрия Для выделения стрептококков и стафилококков из образцов, содержащих смешанную флору, с добавлением крови - для выявления гемолитических реакций.
211805	500 г	Chapman Stone Medium Среда Чапман Стоун Для выделения и дифференциации стафилококков по методу, основанному на ферментации маннитола и желатиназной активности.

211116	500 г	Coagulase Mannitol Agar Коагулазный агар с маннитолом Для дифференциации <i>Staphylococcus aureus</i> от других видов, основанной на продукции коагулазы и ферментации маннитола.
212104	500 г	Columbia CNA Agar
294221	2,27 кг	Колумбийский CNA Агар Используется с кровью для селективного выделения грамположительных кокков. Содержит колистин и налидиксовую кислоту.
211407	500 г	Mannitol Salt Agar
211410	2,27 кг	Солевой агар с маннитолом Селективная среда для выделения и подсчета стафилококков из клинического и неклинического материала.
211539	500 г	Phenylethyl Alcohol Agar Агар фенилэтиловый с добавлением спирта Селективная среда для выделения грамположительных бактерий, особенно грамположительных кокков, из образцов со смешанной грамположительной и грамотрицательной флорой.
229730	500 г	Staphylococcus Medium 110 Среда 110 для стафилококков Среда, также известная как желатиновый агар Стоуна, для выделения и дифференциации стафилококков, основанной на ферментации маннитола, образовании пигмента и желатиназной активности.



Стрептококки (кроме группы D)

240920	500 г	Azide Blood Agar Base Основа для приготовления кровяного агара с азидом натрия Для выделения стрептококков и стафилококков из образцов, содержащих смешанную флору, с добавлением крови - для выявления гемолитических реакций.
238710	500 г	Azide Dextrose Broth Декстрозный бульон с азидом натрия Используется для культивирования стрептококков в воде и сточных водах.
299068	500 г	Bile Esculin Agar Агар желчный с эскулином Для дифференциации энтерококков и <i>Streptococcus bovis</i> от других стрептококков.
212104	500 г	Columbia CNA Agar
294221	2,27 кг	Колумбийский CNA Агар Используется с кровью для селективного выделения грамположительных кокков. Содержит колистин и налидиксовую кислоту.
229810	500 г	Mitis Salivarius Agar Агар Митис Саливариус Используется совместно с теллуритовым раствором 1% (кат. № 211917) для выделения <i>Streptococcus mitis</i> , <i>Streptococcus salivarius</i> и энтерококков, в частности, из загрязненных образцов.
211539	500 г	Phenylethyl Alcohol Agar Агар фенилэтиловый с добавлением спирта Селективная среда для выделения грамположительных бактерий, особенно грамположительных кокков, из образцов со смешанной грамположительной и грамотрицательной флорой.

! Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.



249240	500 г	Todd Hewitt Broth
249210	2 кг	Бульон Тодд-Хьюита Среда общего назначения для культивирования стрептококков группы А, пневмококков и других требовательных микроорганизмов или для культивирования крови.

260300	500 г	Tryptose Phosphate Broth
260100	2 кг	Бульон с триптозой фосфатный Для культивирования требовательных микроорганизмов.

Трихомонады

211747	500 г	BD Trichosel™ Broth, Modified Бульон «Трихозел» модифицированный Для выделения и культивирования Trichomonas spp.
--------	-------	--

Энтеробактерии

227310	500 г	Desoxycholate Agar Агар дезоксихолатный Слабоселективная и дифференциальная среда для выделения и культивирования грамотрицательных энтеробактерий.
--------	-------	--

211199	500 г	Endo Agar Эндо агар Дифференциальная среда для выделения колиформных и других энтеробактерий.
--------	-------	--

211215	500 г	Eosin Methylene Blue Agar, Modified (Holt-Harris & Teague) Эозин метиленовый синий агар модифицированный Слабоселективная и дифференциальная среда для выделения и культивирования грамотрицательных энтеробактерий из клинических и неклинических образцов.
--------	-------	---

211317	500 г	Kligler Iron Agar Агар Клиглера с железом Для дифференциации представителей Enterobacteriaceae, основанной на их способности ферментировать декстрозу и выделять сульфиды.
--------	-------	---

211221	500 г	Levine EMB Agar Агар Левина EMB Агар Левина с эозином и метиленовым синим является слабоселективной и дифференциальной средой для выделения грамотрицательных энтеробактерий.
--------	-------	--

284920	500 г	Lysine Iron Agar
211363	500 г	Агар с лизином и железом Для дифференциации кишечных микроорганизмов, основанной на их способности декарбоксилировать или деаминировать лизин и вырабатывать сероводород.

212123	500 г	MacConkey Agar
211387	500 г	Агар МакКонки
212122	2 кг	Для выделения и дифференциации лактозо-ферментирующих от лактозо-неферментирующих грамотрицательных энтеробактерий.
211390	2,27 кг	

233120	500 г	MacConkey Agar without Salt
233110	10 кг	Агар МакКонки бессолевой Ограничивает рост <i>Proteus spp.</i> , улучшает выделение грамотрицательных энтеробактерий.

212306	500 г	MacConkey II Agar
Агар МакКонки II		
Для выделения грамотрицательных энтеробактерий из образцов, которые могут содержать <i>Proteus</i> spp.		
279100	500 г	MacConkey Sorbitol Agar
Агар МакКонки с сорбитолом		
Селективная среда для выделения и дифференциации сорбитол-неферментирующего серотипа <i>Escherichia coli</i> O157:H7 из образцов кала.		
211100	500 г	Nutrient Gelatin
Желатин питательный		
Для выявления разжижения желатина различными видами микроорганизмов (дифференциация кишечных бактерий).		
268820	500 г	OF Basal Medium
Среда основная ОФ		
Для определения окислительного и ферментативного метаболизма углеводов у грамотрицательных палочек.		
211537	500 г	Phenylalanine Agar
274520	500 г	Агар фенилаланиновый
Для дифференциации энтеробактерий по их способности вырабатывать фенилпирувиноградную кислоту при окислительном деаминировании фенилаланина.		
222810	500 г	Purple Agar Base
Основа для приготовления пурпурного агара		
При добавлении углеводов используется для дифференциации и идентификации чистых культур бактерий, особенно грамотрицательных энтеробактерий, на основе ферментации углеводов.		
211558	500 г	Purple Broth Base
Основа для приготовления пурпурного бульона		
При добавлении углеводов используется для дифференциации и идентификации чистых культур бактерий, особенно грамотрицательных энтеробактерий, на основе ферментации углеводов.		
211620	500 г	Simmons Citrate Agar
Цитратный агар Симмонса		
Для дифференциации грамотрицательных бактерий, основанной на потреблении цитрата.		
226540	500 г	Triple Sugar Iron Agar
Агар с тремя сахарами и железом		
TSI агар для дифференциации грамотрицательных энтеробактерий, основанной на ферментации углеводов и выделении сероводорода. Содержит декстрозу, лактозу и сахарозу.		
264410	500 г	Tryptone Water
Триптонная вода		
Для определения <i>Escherichia coli</i> в образцах пищи и воды, основанного на выделении индола.		
211795	500 г	Urea Agar Base
Основа для приготовления агара с мочевиной		
Для дифференциации микроорганизмов, особенно Enterobacteriaceae, основанной на выделении уреазы. Используется с Бакто агаром (кат. № 214050, 214010, 214030, 214040) для дифференциации микроорганизмов по уреазной активности.		
221719	500 г	Urease Test Broth
Бульон для тестирования уреазной активности микроорганизмов		
Для дифференциации микроорганизмов, особенно Enterobacteriaceae, основанной на выделении уреазы.		



❗ Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.



Энтерококки, стрептококки группы D

238710	500 г	Azide Dextrose Broth Декстрозный бульон с азидом натрия Используется для культивирования стрептококков в воде и сточных водах.
299068	500 г	Bile Esculin Agar Агар желчный с эскулином Для дифференциации энтерококков и <i>Streptococcus bovis</i> от других стрептококков.
212104	500 г	Columbia CNA Agar
294221	2,27 кг	Колумбийский CNA Агар Используется с кровью для селективного выделения грамположительных кокков. Содержит колистин и налидиксовую кислоту.
212205	500 г	BD Enterococcosel™ Agar «Энтерококкосел» агар Желчно-эскулиновый агар с азидом для быстрого и селективного определения и подсчета энтерококков.
249610	500 г	KF Streptococcus Agar КФ агар для стрептококков Используется вместе с добавкой TTC (кат. № 231121 или 264310) для выделения и подсчета стрептококков из образцов кала.
211393	500 г	MacConkey Agar without Crystal Violet
247010	500 г	Агар МакКонки без добавления кристаллического фиолетового Для выделения и дифференциации кишечных микроорганизмов (растут в том числе стафилококки и энтерококки). Также для разделения <i>Mycobacterium fortuitum</i> и <i>Mycobacterium chelonae</i> от других быстро растущих микобактерий.
211539	500 г	Phenylethyl Alcohol Agar Агар фенилэтиловый с добавлением спирта Селективная среда для выделения грамположительных бактерий, особенно грамположительных кокков, из образцов со смешанной грамположительной и грамотрицательной флорой.


Среды специального назначения

211102	500 г	Cary and Blair Transport Medium Транспортная среда Кэри-Блэра Для сбора, транспортировки и сохранения микробиологических образцов, особенно содержащих <i>Vibrio cholerae</i> .
212218	500 г	CLED Agar Агар CLED Для культивирования бактерий из образцов мочи и дифференциации лактозо-положительных и лактозо-отрицательных микроорганизмов.
268620	500 г	D/E Neutralizing Agar Агар нейтрализующий Дей/Энгли Для обнаружения и подсчета микроорганизмов в образцах окружающей среды (контроль стерильности). Среда нейтрализует антимикробные агенты.
281910	500 г	D/E Neutralizing Broth Бульон нейтрализующий Дей/Энгли Для нейтрализации и тестирования антисептиков и дезинфектантов согласно процедуре Дей и Энгли.
268010	500 г	Letheen Agar Агар Летина Для определения и подсчета бактерий в косметических продуктах и других материалах. Среда инактивирует соединения аммония и другие консерванты.

263110	500 г	Letheen Agar, Modified
292847	2 кг	Агар Летина модифицированный Для микробиологического тестирования косметических продуктов, инактивирует консерванты.
268110	500 г	Letheen Broth
		Бульон Летина Для определения фенольного коэффициента катионных поверхностно-активных веществ.
263010	500 г	Letheen Broth, Modified
		Бульон Летина модифицированный Для микробиологического тестирования косметических продуктов, инактивирует консерванты.
220100	500 г	MacConkey Broth
		Бульон МакКонки Селективная среда для выделения грамотрицательных лактозо-ферментирующих колиформных бактерий в образцах воды и пищи.
212185	500 г	Marine Agar 2216
		Агар морской 2216 Для выделения, культивирования и подсчета гетеротрофных морских бактерий.
279110	500 г	Marine Broth 2216
214907	10 кг	Бульон морской Для культивирования гетеротрофных морских бактерий.
255320	500 г	Microbial Content Test Agar
255310	2 кг	Агар тестовый микробиологический Триптик соевый агар с лецитином и полисорбатом 80 для определения и подсчета микроорганизмов на поверхностях, имеющих санитарное значение.
211436	500 г	Motility Test Medium
		Среда для проведения теста подвижности микроорганизмов Для определения подвижности грамотрицательных энтеробактерий.
236210	500 г	Neutralizing Buffer
		Буфер нейтрализующий Для определения микроорганизмов с поверхностей, имеющих санитарное значение и обрабатываемых хлор-содержащими или аммонийными дезинфектантами.
218071	500 г	Peptone Water
		Пептонная вода Минимальная среда для культивирования нетребовательных микроорганизмов, для изучения ферментации углеводов и проведения индолового теста.
211502	500 г	Phenol Red Agar Base
		Основа для приготовления агара с феноловым красным При добавлении углеводов используется для дифференциации чистых культур микроорганизмов на основе ферментативных реакций.
211506	500 г	Phenol Red Broth Base
		Основа для приготовления бульона с феноловым красным При добавлении углеводов используется для точного определения ферментативных реакций для дифференциации микроорганизмов.
285610	500 г	Universal Beer Agar
		Среда УВА (агар пивной универсальный) Используется для культивирования микроорганизмов значимых в пивоваренной промышленности.



❗ Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.

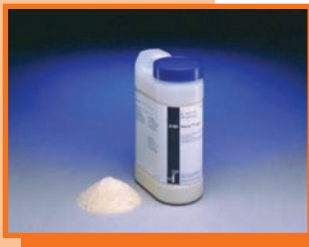

211514	500 г	Phenol Red Dextrose Broth
Бульон с феноловым красным и декстрозой		
Для определения способности микроорганизмов ферментировать декстрозу.		
247930	100 г	Plate Count Agar
247940	500 г	Агар для чашечного подсчета
247910	2 кг	Для подсчета микроорганизмов из молока и молочных продуктов, воды и других санитарно-значимых типов материала.
221541	10 шт.	Schaedler Broth with Vitamin K1
221542	100 шт.	Бульон Шедлера с витамином К1
Используется для выращивания прихотливых аэробных и анаэробных микроорганизмов. Готовая среда в пробирках.		
232100	500 г	Skim Milk
Молоко снятое специальное для микробиологии		
Высушенное растворимое снятое молоко. 10% раствор эквивалентен свежему молоку. Используется для приготовления питательных сред и для дифференциации микроорганизмов, основанной на коагуляции и протеолизе казеина.		
211638	500 г	Standard Methods Agar
Агар стандартных методов		
Для подсчета микроорганизмов из молока и молочных продуктов, продуктов питания, воды и других санитарно-значимых типов материала.		
298410	500 г	TAT Broth Base
292848	2 кг	Основа для приготовления бульона ТАТ
Основа бульона ТАТ (триптон, азолектин, твин) при добавлении полисорбата 20 рекомендуется для тестирования вязких материалов, таких как мази, на присутствие микроорганизмов. Специально адаптирована для тестирования косметических продуктов.		
225640	100 г	Thioglycollate Medium, Fluid
225650	500 г	Среда тиогликолевая жидкая
211260	500 г	Для определения стерильности биопрепаратов и культивирования анаэробов, аэробов и микроаэрофилов.
225620	2 кг	
211263	2,27	
269720	500 г	Thioglycollate Medium, Fluid with Beef Extract
Жидкая тиогликолевая среда с мясным экстрактом		
Для культивирования микроорганизмов из стерильных в норме биологических продуктов.		
211743	500 г	Transport Medium (Stuart, Toshach and Patsula)
Среда транспортная Стюарта, Тошача и Пацулы		
Для сбора, транспортирования и сохранения микробиологических образцов.		

Среды для изучения чувствительности к антимикробным препаратам

211438	500 г	Mueller Hinton II Agar
211441	2,27 кг	Агар Мюллер Хинтон II
Для постановки теста чувствительности к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом для аэробных и факультативно-анаэробных бактерий, выделенных из клинических образцов. Содержит добавку ионов кальция и магния в соответствии с рекомендациями CLSI.		
212322	500 г	Mueller Hinton II Broth
Бульон Мюллер Хинтон II		
Для постановки теста чувствительности к антимикробным препаратам для аэробных и факультативно-анаэробных бактерий, выделенных из клинических образцов. Содержит добавку ионов кальция и магния в соответствии с рекомендациями CLSI.		

225250	500 г	Mueller Hinton Medium
225220	2 кг	Среда Мюллер Хинтон

Для постановки теста чувствительности к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом для аэробных и факультативно-анаэробных бактерий согласно стандартам CLSI и EUCAST.

218051	500 г	Wilkins Chalgren Agar
295067	500 г	Агар Вилкинса-Чалгрена

Для постановки теста чувствительности к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом для анаэробных бактерий, для выделения и культивирования анаэробов.



Среды для молекулярно-генетических исследований

240110	500 г	LB Agar, Lennox
--------	-------	-----------------

Агар ЛБ Леннокса

Богатая питательными веществами и витаминами среда для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов Escherichia coli.

244520	500 г	LB Agar, Miller
244510	2 кг	Агар ЛБ Миллера

Богатая питательными веществами и витаминами среда для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов Escherichia coli. Содержит в 2 раза больше хлорида натрия, чем агар ЛБ Леннокса.

240230	500 г	LB Broth, Lennox
240210	2 кг	Бульон ЛБ Леннокса

Для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов Escherichia coli. Возможно добавление глюкозы.

244620	500 г	LB Broth, Miller
244610	2 кг	Бульон ЛБ Миллера

Для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов Escherichia coli. Содержит в 2 раза больше хлорида натрия, чем бульон ЛБ Леннокса.

241320	500 г	Luria Agar Base (Miller)
211829	2 кг	Основа для приготовления агара Лурия, Миллера

Богатая питательными веществами среда для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов Escherichia coli. Используется с добавлением глюкозы или без. Содержит в 10 раз меньше хлорида натрия, чем агар ЛБ Леннокса.

241420	500 г	Luria Broth Base (Miller)
241410	2 кг	Основа для приготовления бульона Лурия, Миллера

Используется с добавлением глюкозы или без для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов Escherichia coli. Содержит в 10 раз меньше хлорида натрия, чем бульон ЛБ Леннокса.



Компоненты питательных сред, агароза

211843	500 г	Acidicase™ Peptone
		Пептон с «Ацидиказой»
		Казеин, гидролизированный соляной кислотой.
215710	10 г	Adonitol
		Адонитол для микробиологии

! Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.



212304	500 г	Agar (Grade A) Агар класса А
214530	500 г	Agar (Granulated)
214510	2 кг	Агар гранулированный
214520	10 кг	
214050	100 г	Agar (Purified)
214010	454 г	Агар очищенный
214030	2 кг	Бакто агар с пониженным содержанием примесей и солей. Используется для приготовления сред для определения подвижности микроорганизмов и для роста анаэробов и микроаэрофилов.
214040	10 кг	
281230	500 г	Agar (Technical)
281210	2 кг	Агар для бактериологии технический
212272	500 г	Agarose Агароза для микробиологии Для гель-электрофореза.
212610	500 г	Beef Extract (paste) Мясной экстракт (паста)
212303	500 г	Beef Extract Powder Мясной экстракт (порошок)
211862	500 г	BD Biosat™ Peptone Пептон «Биосат» Смесь гидролизатов казеина и дрожжевого экстракта.
253310	500 г	BiTek™ Proteose Peptone Пептон «Битек» для микробиологии Для приготовления питательных сред, особенно для производства бактериальных токсинов.
223050	500 г	Casamino Acids
223020	2 кг	Кислотный гидролизат казеина с низким содержанием натрия и железа Добавляется в питательные среды в качестве источника органического азота, в ряде случаев используется вместо чистых аминокислот.
215530	500 г	Dextrose Glucose
215510	2 кг	Декстроза для микробиологии
217020	500 г	D-Mannitol Д-маннитол для микробиологии
217910	500 г	D-Sorbitol Sorbite Д-сорбитол для микробиологии
218110	500 г	D-Xylose Д-ксилоза для микробиологии
214340	500 г	Gelatin Желатин для микробиологии

211870	500 г	BD Gelysate™ Peptone
Пептон «Желизат» на основе лизированного желатина, для микробиологии		
228210	100 г	Glycerol
228220	500 г	Глицерин для микробиологии
212392	500 г	Hemoglobin, Bovine (Freeze-Dried)
Гемоглобин бычий лиофилизированный для микробиологии		
Используется как компонент питательных сред. Содержит гемин, необходимый для культивирования Haemophilus spp., и усиливающий рост Neisseria spp.		
211874	10x100 мл	Hemoglobin Solution 2%
Раствор гемоглобина 2% для микробиологии		
Для приготовления сред для требовательных микроорганизмов. Готов к использованию.		
218630	500 г	Malt Extract
Экстракт солода		
Компонент сред для дрожжей и плесневых грибов.		
216830	500 г	Maltose
Мальтоза для микробиологии		
211681	500 г	Neopeptone
«Неопептон» для микробиологии		
Рекомендуется использовать для сред для определения грибов.		
211100	500 г	Nutrient Gelatin
Желатин питательный		
Для выявления разжижения желатина различными видами микроорганизмов (дифференциация кишечных бактерий).		
211677	500 г	Peptone
211820	2 кг	Пептон для микробиологии
Бакто пептон используется как источник азота в средах для культивирования бактерий и грибов.		
257631	400 г	Peptone Water
Пептонная вода		
Используется для предварительного обогащения продуктов питания, содержащих сальмонеллы.		
257204	50x10 мл	Phosphate Buffered Saline
Фосфатный буферный раствор		
211906	454 г	BD Phytone™ Peptone
298147	2,27 кг	Пептон «Фитон» для микробиологии
Соевый пептон для культивирования грибов и требовательных бактерий.		
211910	454 г	BD Polypeptone™ Peptone
Пептон «Полипептон» для микробиологии		
Смесь пептонов из казеина и животного сырья.		



! Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.



211925	100 г	Polysorbate 80
Полисорбат 80 для микробиологии		
Для нейтрализации консервантов.		
211684	500 г	Proteose Peptone
Пептон протеозный		
Бакто протеозный пептон для приготовления питательных сред, особенно для производства бактериальных токсинов.		
217610	500 г	Saccharose
Сахароза для микробиологии		
257255	50x10 мл	Saline Solution (0.9%)
Раствор хлорида натрия 0.9%		
Солевой (физиологический) раствор.		
232100	500 г	Skim Milk
Молоко снятое специальное для микробиологии		
Высушенное растворимое снятое молоко. 10% раствор эквивалентен свежему молоку.		
217820	500 г	Soluble Starch
Крахмал растворимый для микробиологии		
Улучшает ростовые функции, используется для определения гидролиза крахмала и как источник углерода.		
243620	500 г	Soytone Bacto
Гидролизат соевой муки для микробиологии		
211917	20 мл	Tellurite Solution (1%)
Теллуритовый раствор 1% для микробиологии		
Для использования с агаром Митис Саливариус (кат. № 229810).		
211921	454 г	BD Trypticase™ Peptone
211922	2,27 кг	Пептон «Триптиказа» для микробиологии
Рекомендуется для сред, где необходим большой рост бактерий или грибов.		
211705	500 г	Tryptone Peptone
211699	2 кг	Триптон для микробиологии
Бакто триптон.		
211713	500 г	Tryptose Peptone
211709	10 кг	Триптоза для микробиологии
Используется для культивирования стрептококков, пневмококков, менингококков и других требовательных микроорганизмов.		
231181	100 г	Tween® 80 - Polysorbate 80
«Твин 80» (полисорбат) для микробиологии		

Добавки к питательным средам: селективные, ингибирующие, обогатительные

233391	6x10 мл	Antimicrobial Vial K
Флаконы с антимикробной добавкой К		
Используется для приготовления агара Шахиди Фергюсон Перфрингенс (SFP) кат. № 281110.		
211875	5x2 мл	BD IsoVitaleX™ Enrichment
211876	5x10 мл	Обогатительная добавка «ИзоВиталекс»
Для культивирования требовательных микроорганизмов, особенно <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и <i>Haemophilus influenzae</i> .		

213010	100 г	Bile Salts No.3
213020	500 г	Соли желчных кислот №3 Селективный агент, ингибирующий рост грамположительных бактерий.
214890	6x5 мл	Campylobacter Antimicrobial Supplement Blaser Добавка антимикробных препаратов Блейзера для приготовления агара для кампилобактерий Содержит ванкомицин, полимиксин Б, триметоприм. Используется совместно с основой агара для кампилобактерий (кат. № 218201).
214891	6x5 мл	Campylobacter Antimicrobial Supplement Skirrow Добавка антимикробных препаратов Скирроу для приготовления агара для кампилобактерий Содержит ванкомицин, полимиксин Б, триметоприм, цефалотин и амфотерицин Б. Используется совместно с основой агара для кампилобактерий (кат. № 218201).
215329	10x10 мл	Egg Yolk Enrichment 50%
233472	6x100 мл	Обогатительная добавка для питательных сред с концентратом эмульсии яичного желтка 50%
212357	6x100 мл	Egg Yolk Tellurite Enrichment Раствор теллурита с яичным желтком
233901	6x5 мл	Legionella Agar Enrichment Обогатительная добавка агара для легионелл Используется совместно с основой агара для легионелл (кат. № 218301).
211883	10x10 мл	Leptospira Enrichment (Lyophilised) Обогатительная добавка питательных сред для лептоспир Используется для обогащения среды Флетчера и бульона Стюарта для выделения лептоспир из крови, ликвора, мочи, образцов воды и др.
279510	6x100 мл	Leptospira Enrichment EMJH Обогатительная добавка питательных сред для лептоспир Используется совместно с основой среды EMJH для лептоспир (кат. № 279410).
212402	10x2 мл	Listeria Selective Supplement Добавка селективная для листерий Используется совместно с основой агара ЛПМ (кат. № 222120).
211887	10x20 мл	Middlebrook ADC Enrichment
212352	6x100 мл	Обогатительная ростовая добавка Миддлбрук Добавляется к бульону Миддлбрук в модификации 7H9 (кат. № 271310).
211886	10x20 мл	Middlebrook OADC Enrichment
212240	6x100 мл	Обогатительная ростовая добавка ОАДС для среды Миддлбрук
212351	500 мл	Добавляется к основе для приготовления среды Миддлбрук в модификациях 7H10 (кат. № 262710, 212203) и 7H11 (кат. № 212203).
212292	10x30 мл	Mycoplasma Enrichment without Penicillin Обогатительная добавка питательных сред для микоплазм, без пенициллина Добавляется к агарам и бульонам для микоплазм (кат. № 211456, 211458, 241210, 255420, 212346, 212347).





283610	6x30 мл	Mycoplasma Supplement Добавка для питательных сред для микоплазм Добавляется к агарам и бульонам для микоплазм (кат. № 211456, 211458, 241210, 255420, 212346, 212347).
231971	6x10 мл	Novobiocin Antimicrobial Supplement Антимикробная добавка к средам с новобиоцином Добавка к агару бриллиантовому зеленому (кат. № 228530) и среде Раппа-порта-Вассилиадиса (кат. № 218681).
211763	6x10 мл	Oxford Antimicrobial Supplement, Modified Добавка к средам антимикробная оксфордская модифицированная Добавка с моксалактамом и колистином к оксфордской среде (кат. № 222530).
263710	3x10 мл	PALCAM Antimicrobial Supplement Добавка антимикробная ПАЛКАМ Добавка к среде ПАЛКАМ (кат. № 263620).
227610	6x10 мл	Supplement B Добавка Б для питательных микробиологических сред, с растворителем Добавка к средам для культивирования требовательных микроорганизмов, особенно <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и <i>Haemophilus influenzae</i> .
233541	6x10 мл	Supplement VX
233542	100 мл	Добавка ВиИкс для питательных микробиологических сред, с растворителем Концентрат факторов роста V и X, добавка к средам для культивирования требовательных микроорганизмов, таких как <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и <i>Haemophilus influenzae</i> .
211917	20 мл	Tellurite Solution (1%) Теллуритовый раствор 1% для микробиологии Для использования с агаром Митис Саливариус (кат. № 229810).
212269	10x10 мл	V-C-A Inhibitor Ингибитор Мартина и Льюиса (с ванкомицином, колистином, анизомицином) Лиофилизированный препарат для селективного выделения <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и <i>Neisseria meningitidis</i> .
212404	10x10 мл	V-C-A-T Inhibitor Ингибитор Мартина и Льюиса (с ванкомицином, колистином, анизомицином и триметопримом) Лиофилизированный препарат для селективного выделения <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и <i>Neisseria meningitidis</i> .
212227	10x2 мл	V-C-N Inhibitor
212228	10x10 мл	Ингибитор Тайера Мартина (с ванкомицином, колистином и нистатином) Лиофилизированный препарат для селективного выделения <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и <i>Neisseria meningitidis</i> .
212408	10x10 мл	V-C-N-T Inhibitor Ингибитор Тайера Мартина (с ванкомицином, колистином, нистатином и триметопримом) Лиофилизированный препарат для селективного выделения <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и <i>Neisseria meningitidis</i> .
212354	10x10 мл	Vitamin K1-Hemin Solution Раствор витамина K1 и гемина Добавка в среды для анаэробных микроорганизмов.

231961	6x10 мл	Yersinia Antimicrobial Supplement CN
Добавка антимикробная для изоляции йерсиний (цефсулодин-новобиоцин)		
Используется с селективным агаром для йерсиний (кат. № 218172).		

Готовые питательные среды на чашках

В разделе представлены только некоторые позиции ассортимента доступных готовых питательных сред. Для получения дополнительной информации обращайтесь к поставщикам продукции.

254443	20 чашек	Aeromonas Yersinia Agar
Агар Аеромонас Йерсиния		
Селективная среда для выделения <i>Yersinia Enterocolitica</i> и <i>Aeromonas species</i> .		
254480	20 чашек	Bacteroides Bile Esculin Agar with Amikacin, BBE Agar
Агар бактериоидный с желчью с добавлением амикацина		
Селективная среда для выделения и предварительной идентификации <i>Bacteroides fragilis</i> .		
255084	20 чашек	Baird Parker Agar
Агар Бэрда Паркера		
Используется для выделения и дифференциации <i>Staphylococcus aureus</i> из продуктов питания, объектов окружающей среды и клинических образцов.		
221808	10 чашек	BCYE Agar
257321	120 чашек	Агар BCYE
Используется для выделения и культивирования легионелл.		
254546	20 чашек	Bifidobacterium Agar, Modified (Beerens)
Агар бифидобактерийный модифицированный		
Для выделения бифидобактерий из образцов кала.		
254400	20 чашек	Bordet Gengou Agar with 15 % Sheep Blood
Агар Борде Джингу с 15% добавлением крови барана		
Селективная среда для выделения <i>Bordetella pertussis</i> и <i>B. parapertussis</i> .		
256054	20 чашек	Bordetella Agar with Charcoal and 7 % Horse Blood
Агар для бордетелл с углем и с 7% добавлением крови лошади и бацитрацина		
Селективная среда для выделения <i>Bordetella pertussis</i> и <i>B. parapertussis</i> .		
254490	20 чашек	Brilliant Green Agar, Modified
Агар бриллиантовый зеленый модифицированный		
Используется для выделения сальмонелл из воды, сточных вод и продуктов питания, а также из клинических образцов.		
256501	20 чашек	Bromcresol Purple Lactose Agar
Агар бромкрезоловый фиолетовый с лактозой		
Селективная среда для выделения энтеробактерий из клинических образцов, особенно из мочи.		
255509	20 чашек	Brucella Agar with 5 % Sheep Blood, Hemin and Vitamin K1
Агар Бруцелла с 5% добавлением крови барана с гемом и витамином K1		
Для выделения и культивирования облигатных анаэробных и требовательных микроорганизмов.		
256058	20 чашек	Campylobacter Agar (Butzler) with 7% Horse Blood
Агар для кампилобактерий (Бутцлера) с 7% добавлением крови лошади		
Селективная среда для выделения <i>Campylobacter species</i> .		





254464	20 чашек	Campylobacter Agar Skirrow Агар для кампилобактерий Скирроу Селективная среда для выделения <i>Campylobacter species</i> .
254001	20 чашек	Campylobacter Agar with 5 Antimicrobics and 10 % Sheep Blood, CampyBAP
254069	120 чашек	Агар для кампилобактерий с добавлением 5 антимикробных препаратов и 10% крови барана Селективная среда для выделения <i>Campylobacter jejuni</i> и других устойчивых к цефалотину видов <i>Campylobacter</i> .
254403	20 чашек	Campylobacter Selective Medium, Preston, Bloodfree
254095	120 чашек	Селективная среда Кампилобактер без добавления крови Используется для выделения <i>Campylobacter species</i> .
256506	20 чашек	CDC Anaerobe 5 % Sheep Blood Agar Агар анаэробный CDC с 5% добавлением крови барана Используется для выделения и культивирования прихотливых и медленно растущих микроорганизмов, облигатных анаэробов, а также для большинства аэробных, факультативно анаэробных и микроаэрофильных бактерий.
256180	20 чашек	Serapacia Medium Среда сепация Селективная среда для выделения <i>Burkholderia cepacia</i> из клинических образцов.
257011	20 чашек	Chocolate Agar, Blood Agar No. 2 Base Шоколадный агар, среда на основе кровяного агара №2 Используется для выделения и культивирования требовательных к питательной среде микроорганизмов, особенно видов <i>Neisseria</i> и <i>Haemophilus</i> .
254060	20 чашек	GC-Chocolate Agar with BD IsoVitaleX
254089	120 чашек	Шоколадный агар GC с «ИзоВиталексом» Усовершенствованная среда для выделения и культивирования прихотливых микроорганизмов, особенно видов <i>Neisseria</i> и <i>Haemophilus</i>
254046	20 чашек	Chocolate Agar with BD IsoVitaleX™ and Bacitracin Агар шоколадный с «ИзоВиталекс» и бацитроцином Селективная среда для выделения гемофилов, особенно <i>H. Influenzae</i> .
254005	20 чашек	Columbia Agar with 5 % Sheep Blood
254071	120 чашек	Колумбийский агар с 5% добавлением крови барана Высокопитательная среда общего назначения для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов из клинических и неклинических образцов.
254003	20 чашек	CLED Agar
254070	120 чашек	Агар CLED Используется для выделения, дифференциации и подсчета бактерий из мочи.
255529	20 чашек	CLED Agar, Bevis Агар CLED (Бевис) Модифицированный Агар CLED, используется для выделения, дифференциации и подсчета бактерий из мочи.
254406	20 чашек	Clostridium Difficile Agar with 7 % Sheep Blood Агар Клостридиум диффициле с 7% добавлением крови барана Селективная среда для выделения <i>Clostridium difficile</i> из фекалий.
222228	20 чашек	Clostridium Difficile Selective Agar Селективный агар для Клостридиум диффициле Селективная среда для выделения <i>Clostridium difficile</i> из фекалий.

256006	20 чашек	Columbia Agar with 5 % Horse Blood Колумбийский агар с 5% добавлением крови лошади Высокопитательная среда общего назначения для выделения и культивирования требовательных к питательной среде микроорганизмов.
254007	20 чашек	Columbia CNA Agar with 5 % Sheep Blood
254072	120 чашек	Колумбийский CNA агар с 5% добавлением крови барана Селективная, дифференциально-диагностическая среда для выделения грамположительных бактерий.
255086	20 чашек	Columbia CNA Agar, Modified, with Crystal Violet and 5 % Sheep Blood Колумбийский CNA агар модифицированный с добавлением кристаллического фиолетового и 5% крови барана Селективная, дифференциально-диагностическая среда для выделения грамположительных бактерий, особенно стрептококков и стафилококков.
257303	20 чашек	Columbia CNA Plus Agar with 5 % Sheep Blood
257306	120 чашек	Колумбийский CNA плюс агар с 5% добавлением крови барана Селективная, дифференциально-диагностическая среда для выделения грамположительных бактерий, особенно стрептококков и стафилококков.
221600	20 чашек	Columbia CNA Agar with 5 % Sheep Blood // MacConkey II Agar Двухкомпонентная среда: Колумбийский CNA агар с 5% добавлением крови барана / агар МакКонки II Используется для выделения и дифференциации грамположительных микроорганизмов, а также энтеробактерий и некоторых видов неферментирующих бактерий.
254097	20 чашек	Columbia III Agar with 5 % Sheep Blood
254098	120 чашек	Колумбийский III агар с 5% добавлением крови барана Высокопитательная среда для выделения и культивирования требовательных к питательной среде микроорганизмов.
254429	20 чашек	Dermatophyte Agar, Plate Агар Дерматофит Селективная среда для выделения патогенных грибов из кожи, волос и ногтей.
255506	20 чашек	DNase Test Agar Агар тестовый на наличие дезоксирибонуклеазной активности Агар тестовый на наличие дезоксирибонуклеазной активности. Дифференциально-диагностическая среда, используется для обнаружения дезоксирибонуклеазной активности.
256525	20 чашек	Drigalski Lactose Agar with CAZ (Ceftazidime) Агар лактозный Дригальского Селективная и дифференциально-диагностическая среда для обнаружения энтеробактерий и некоторых неферментирующих бактерий из клинических образцов. Используется для выделения энтеробактерий продуцирующих БЛРС.
254553	20 чашек	DCLS Agar, modified // Hektoen Enteric Agar Двухкомпонентная среда: агар модифицированный DCLS / Гектоен энтеро агар Используется для выделения сальмонелл, шигелл и холерных вибрионов, а также для выделения и дифференциации грамотрицательных энтеробактерий.
254014	20 чашек	EMB Agar, Modified (Holt-Harris and Teague)
254073	120 чашек	Агар модифицированный EMB Селективная и дифференциально-диагностическая среда для выделения, культивирования и дифференциации грамотрицательных кишечных бактерий из клинических образцов.





222201	10 чашек	Enterococcus Screen Agar Агар для скрининга энтерококков Используется для скрининга резистентности энтерококков к стрептомицину, гентамицину, ванкомицину.
254094	20 чашек	Gardnerella Selective Agar with 5% Human Blood Селективная среда для гарднерелл с 5% добавлением крови Используется для выделения <i>Gardnerella vaginalis</i> .
254554	20 чашек	BD GC-Lect Agar
254555	120 чашек	Агар GC-Lec Селективная среда для <i>Neisseria gonorrhoeae</i> .
221240	20 чашек	GC II Agar with IsoVitaleX Enrichment Агар GCII с «ИзоВиталексом» Используется для определения чувствительности <i>Neisseria gonorrhoeae</i> диско-диффузионным методом.
254050	20 чашек	Group A Selective Strep Agar with 5% Sheep Blood, BD ssA Селективный агар для выделения стрептококков группы А с 5% добавлением крови барана Селективная среда для выделения и предварительной идентификации стрептококков группы А из клинических образцов.
221783	20 чашек	Group A Selective Strep Agar with 5 % Sheep Blood (BD ssA™) // BD Trypticase Soy Agar with 5 % Sheep Blood (TSA II) Двухкомпонентная среда: Селективный агар для стрептококков группы А с 5% добавлением крови барана/ Агар соевый «Триптиказа» с 5% добавлением крови барана Используется для выделения, дифференциации стрептококков группы А (<i>S. pyogenes</i>).
257079	20 чашек	Group B Streptococcus Differential Agar Агар для выделения стрептококков группы В Селективная среда для выделения и идентификации <i>Streptococcus agalactiae</i> (стрептококков группы В) из клинических образцов.
254058	20 чашек	Haemophilus Test Medium Agar Агар для тестирования гемофилов Используется для определения чувствительности <i>Haemophilus influenzae</i> диско-диффузионным методом.
297890	10 чашек	Haemophilus Identification Plate, Hemo ID Plate Агар на чашке для идентификации гемофилов Используется для идентификации гемофилов.
257026	20 чашек	Heart Infusion Agar with 5 % Sheep Blood Агар с сердечной вытяжкой с 5% добавлением крови барана Среда общего назначения, используется для выделения требовательных к питательной среде микроорганизмов.
254430	20 чашек	Helicobacter Agar Агар Геликобактер Селективная среда для выделения <i>Helicobacter Pylori</i> .
254021	20 чашек	Iso-Res Agar
254076	120 чашек	Агар Изо-Рез Агар для определения чувствительности диско-диффузионным методом (методом Кирби-Бауэр).
254413	20 чашек	Kimmig Fungal Agar Агар грибковый Киммиг Используется для выделения, культивирования грибов.
254550	20 чашек	Legionella BCYE Agar without Antibiotics, conform NEN Агар для легионелл BCYE без антибиотиков Среда для выделения и предварительной идентификации легионелл.

254549	120 чашек	Legionella BCYE Agar with L-Cysteine and Antibiotics, conform NEN Агар для легионелл BCYE с L – цистеином и антибиотиками Среда для выделения и предварительной идентификации легионелл.
254447	20 чашек	MacConkey Agar // Columbia CNA Agar with 5 % Sheep Blood Двухкомпонентная среда: Агар МакКонки / Колумбийский CNA агар с 5% добавлением крови барана Используется для выделения грамотрицательных и грамположительных бактерий из клинических образцов.
257021	20 чашек	Mannitol Salt Agar with Oxacillin Солевой агар с манитолом и оксацилином Используется для обнаружения метициллин устойчивого <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA). Высокая концентрация соли увеличивает продуцирование и высвобождение бета-лактамаз.
254029	20 чашек	Martin Lewis Agar, Modified Агар Мартина Льюиса модифицированный Для выделения <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и <i>N. meningitidis</i> из клинических образцов со смешанной флорой содержащей бактерии и грибы.
254030	20 чашек	Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood
254080	120 чашек	Агар Мюллер Хинтон с 5% добавлением крови барана Рекомендуется для постановки теста чувствительности к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом <i>Streptococcus pneumoniae</i> и других стрептококков.
254035	20 чашек	BD Mueller Hinton Chocolate Agar with BD IsoVitaleX
254082	120 чашек	Агар Мюллер Хинтон шоколадный с «ИзоВиталекс» Используется для выделения и определение чувствительности прихотливых микроорганизмов, таких как <i>Neisseria gonorrhoeae</i> .
254063	20 чашек	Mycoplate MS Agar Агар Микоплейт MS Неселективная среда для культивирования грибов и дифференциации дрожжей (род <i>Candida</i>) на основе морфологических признаков.
257004	20 чашек	MYP Agar Агар MYP Селективная дифференциально-диагностическая среда, используется для выделения <i>Bacillus Cereus</i> из пищевых продуктов.
254444	20 чашек	Neomycin Blood Agar Кровяной агар с добавлением неомицина Используется для выделения стрептококков группы A (<i>S. pyogenes</i>) и группы B (<i>S. agalactiae</i>) из клинических образцов.
254481	20 чашек	OFPBL Agar Агар OFPBL Используется для селективного выделения и обнаружения <i>Burkholderia (Pseudomonas) cepacia</i> .
257658	20 чашек	Oxacillin Screen Agar Агар Оксациллин-скрининг Используется для обнаружения метициллин-устойчивого <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA).
254539	20 чашек	PALCAM Listeria Agar Агар ПАЛКАМ для листерий Селективная дифференциально-диагностическая среда, используется для выделения и обнаружения <i>Listeria monocytogenes</i> и других видов листерий из продуктов питания и клинических образцов. Используется совместно с антимикробной добавкой PALCAM (кат. № 263710).



254108	20 чашек	Potato Glucose Agar
Картофельный агар с глюкозой		
Используется для выделения и культивирования дрожжей и плесени из пищевых продуктов, молочных продуктов, косметических средств и из объектов окружающей среды.		
212919	10 чашек	Pseudomonas CFC Agar
Агар для выделения псевдомонас		
Готовая к использованию среда для выделения <i>Pseudomonas</i> и родственных микроорганизмов (например, <i>Burkholderia cepacia</i>) из пищевых продуктов, воды, фармацевтической продукции и из окружающей среды.		
257002	20 чашек	Pseudomonas Isolation Agar
Агар для выделения псевдомонас		
Используется в выделении <i>Pseudomonas</i> и дифференциации <i>Pseudomonas aeruginosa</i> от других псевдомонад на основе формирования пигмента.		
254419	20 чашек	BD Pseudoselect™ Agar
Агар «Псевдозель»		
Селективная среда для выделения <i>Pseudomonas aeruginosa</i> из различных образцов.		
257008	20 чашек	R2A Agar
257073	120 чашек	Агар R2A
Используется для изучения гетеротрофных микроорганизмов в очищенной питьевой воде.		
254091	20 чашек	Sabouraud Agar with Chloramphenicol
Агар Сабуро с Хлорамфениколом		
Селективная среда для выделения грибов.		
255504	20 чашек	Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide
Агар Сабуро с Хлорамфениколом и Циклогексимидом		
Селективная среда для выделения патогенных грибов.		
254041	20 чашек	Sabouraud with Gentamycin and Chloramphenicol Agar
Агар Сабуро с Гентамицином и Хлорамфениколом		
Селективная среда для выделения грибов.		
254451	20 чашек	Sabouraud Agar with Penicillin and Streptomycin
Агар Сабуро с Пенициллином и Стрептомицином		
Селективная среда для выделения грибов.		
254039	20 чашек	Sabouraud Glucose Agar
Агар Сабуро с глюкозой		
Используется для выделения и культивирования грибов.		
254042	20 чашек	Schaedler Agar with Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood
254084	120 чашек	Агар Шедлера с витамином K1 и 5% добавлением крови барана
Для выделения и культивирования облигатных требовательных анаэробных микроорганизмов.		
221541	10 шт.	Schaedler Broth with Vitamin K1
221542	100 шт.	Бульон Шедлера с витамином K1
Используется для выращивания прихотливых аэробных и анаэробных микроорганизмов. Готовая среда в пробирках.		
254485	20 чашек	Schaedler CNA Agar with 5 % Sheep Blood
Агар Шедлера CNA с 5% добавлением крови барана		
Используется для выделения строгих анаэробов из клинических образцов.		
254023	20 чашек	Schaedler K-V Agar with 5 % Sheep Blood
Агар Шедлера с 5% добавлением крови барана, канамицина и ванкомицина		
Селективная среда для выделения и культивирования требовательных грамотрицательных анаэробных микроорганизмов, особенно <i>Bacteroides</i> и <i>Prevotella</i> .		



254476	20 чашек	Schaedler Agar // Schaedler Agar KV, Vitamin K1, Kanamycin, Vancomycin Двухкомпонентная среда: Агар Шедлера/ Агар Шедлера KV с витамином K1, канамицином и ванкомицином Используется для выделения требовательных к питательным средам грамотрицательных анаэробных микроорганизмов, особенно Bacteroides и Prevotella.
221183	10 чашек	Serum Tellurite Agar Агар теллуритовый сывороточный Для выделения Neisseria gonorrhoeae и N. meningitidis из клинических образцов со смешанной флорой содержащей бактерии и грибы.
256044	20 чашек	Tellurite Agar (Hoyle) With 7% Lysed Horse Blood Теллуритовый агар (Хойл) с 7% добавлением лизированной крови лошади Используется для выделения и дифференциации C. diphtheriae.
221741	10x5 мл	Thioglycollate Medium, Enriched with Vitamin K1 and Hemin
221742	100x5 мл	Среда тиогликолевая, обогащенная витамином K1 и гемином
221787	10x8 мл	Среда обогащения для анаэробных микроорганизмов.
221788	100x8 мл	
212099	20 чашек	BD Trypticase Soy Agar with 5 % Horse Blood, TSA II Агар соевый «Триптиказа» с 5% добавлением крови лошади Используется для выделения и культивирования требовательных микроорганизмов.
254053	20 чашек	BD Trypticase Soy Agar with 5 % Sheep Blood, TSA II
254087	120 чашек	Агар соевый «Триптиказа» с 5% добавлением крови барана Используется для выделения и культивирования требовательных микроорганизмов. Наблюдается ясный результат б-гемолиза для Staphylococcus aureus и других б-гемолитических стафилококков.
221290	20 чашек	BD Trypticase™ Soy Agar with 5 % Sheep Blood (TSA II) // MacConkey II Agar
221291	100 чашек	Двухкомпонентная среда: Агар соевый «Триптиказа» с 5% добавлением крови барана/ Агар МакКонки II Используется для выделения требовательных к питательным средам микроорганизмов, позволяет определить их гемолитическую активность. Является также селективной и дифференциально-диагностической средой для обнаружения энтеробактерий и некоторых неферментирующих бактерий.
221949	20 чашек	BD Trypticase Soy Agar with 5 % Sheep Blood (TSA II) // MacConkey II Agar with MUG Двухкомпонентная среда: Агар соевый «Триптиказа» с 5% добавлением крови барана / Агар МакКонки II с MUG Высокопитательная среда общего назначения для требовательных к питательным средам микроорганизмов, позволяет изучить гемолитическую реакцию бактерий, а также используется для предварительной идентификации Escherichia coli.
299896	10 чашек	Trypticase Soy Agar w Lecithin and Polysorbate 80 Агар соевый «Триптиказа» с лецитином и полисорбатом 80 Используется для выделения и культивирования требовательных микроорганизмов.
222204	10 чашек	Vancomycin Screen Agar Агар Ванкомицин-скрининг Используется для исследования резистентности к ванкомицину.
254479	20 чашек	Wilkins Chalgren Agar with Amikacin and 7 % Sheep Blood Агар Вилкинса-Чалгрена с амикацином и 7% добавлением крови барана Селективная среда для выделения строгих анаэробов.



254493	20 чашек	XLD Agar // Brilliant Green Agar, Modified
Двухкомпонентная среда : Агар XLD/Агар бриллиантовый зеленый модифицированный		
Используется для выделения сальмонелл и шигелл из воды, сточных вод, пищевых продуктов и клинических образцов.		

254056	20 чашек	Yersinia Selective Agar (CIN Agar)
254088	120 чашек	Селективный агар для йерсиний
Селективная, дифференциально-диагностическая среда для йерсиний.		

ХРОМагары для дифференциации микроорганизмов на чашке

254106	120 чашек	BD CHROMagar™ Candida
257480	20 чашек	ХРОМагар Кандида

Для выделения и дифференциации на чашке *Candida albicans*, *Candida tropicalis* и *Candida krusei*. Может использоваться вместо декстрозного агара Сабуро как селективная среда для выделения дрожжей.

215085	20 чашек	BD CHROMagar™ Listeria (100 mm)
--------	----------	---------------------------------

ХРОМагар Листерия

Для выделения, дифференциации и идентификации *Listeria monocytogenes* из образцов продуктов питания и окружающей среды.

257372	20 чашек	BD CHROMagar Salmonella // XLD Agar
--------	----------	-------------------------------------

Двухкомпонентная среда: ХРОМагар Сальмонелла / XLD агар

Используется для одновременного выделения и дифференциации сальмонелл и шигелл.

254105	20 чашек	BD CHROMagar™ O157
--------	----------	--------------------

ХРОМагар O157

Для селективного выделения и дифференциации *Escherichia coli* штамма O157:H7 из клинических и неклинических образцов.

254107	120 чашек	BD CHROMagar™ Orientation
--------	-----------	---------------------------

257481	20 чашек	ХРОМагар Ориентейшн
--------	----------	----------------------------

Для прямой идентификации, дифференциации и подсчета патогенных микроорганизмов из урогенитального тракта.

254104	20 чашек	BD CHROMagar™ Salmonella
--------	----------	--------------------------

ХРОМагар Сальмонелла

Селективная и дифференциальная среда для прямого выделения и идентификации сальмонелл из образцов кала, продуктов питания, воды и обогащенных образцов.

257434	20 чашек	BD CHROMagar™ MRSA II
--------	----------	-----------------------

257435	120 чашек	ХРОМагар MRSA II
--------	-----------	-------------------------

Селективная и дифференциальная среда для прямого определения метициллин-резистентного *Staphylococcus aureus* (MRSA) из клинических образцов.

257074	20 чашек	BD CHROMagar™ Staph aureus
--------	----------	----------------------------

257099	120 чашек	ХРОМагар Staphylococcus aureus
--------	-----------	---------------------------------------

Селективная и дифференциальная среда для выделения и идентификации *Staphylococcus aureus* из клинических образцов без проведения подтверждающих тестов.

254515	20 чашек	Sabouraud Glucose Agar with Gentamycin and Chloramphenicol // BD CHROMagar™ Candida
--------	----------	---

Двухкомпонентная среда: агар Сабуро с глюкозой, гентамицином и хлорамфениколом / ХРОМагар Кандида

Для выделения грибов и выделения и идентификации *Candida* из клинических образцов.

254489	20 чашек	BD CHROMagar™ Orientation // Columbia CNA Agar
--------	----------	--

Двухкомпонентная среда: ХРОМагар Ориентейшн / Колумбийский агар CNA

Для выделения и идентификации патогенных бактерий урогенитального тракта.



Системы создания специальных атмосферных условий культивирования BD GasPak™

BD GasPak™ EZ – анаэробное культивирование без анаэроостата
Системы BD GasPak™ EZ позволяют получать анаэробные, микроаэрофильные и CO₂-условия без использования анаэроостатов и CO₂-инкубаторов

Подходят для лабораторий с различным количеством анализов



BD GasPak™ EZ Container Systems

BD GasPak™ EZ Container Systems –
специальные герметичные контейнеры
для инкубирования 10, 15 или 30
стандартных чашек Петри

BD GasPak™ EZ Pouch Systems

BD GasPak™ EZ Pouch Systems –
специальные герметичные пакеты
для инкубирования 1-4 чашек Петри



Удобство и простота использования

- Для активации газогенерирующих пакетов не требуется воды или специальных реагентов – просто удалите защитную упаковку
- Анаэробные пакеты содержат индикатор анаэробных условий, что позволит вам контролировать условия культивирования
- Контейнеры сделаны из прочного и химически устойчивого пластика
- Держатели для контейнеров позволяют устойчиво разместить чашки в контейнере и удобно переносить их
- В контейнер также возможно помещать среды в пробирках в стандартных держателях



Просто – как «раз, два, три!»

1

Поместите инокулированные чашки Петри в держатель/пакет. Держатель поместите в контейнер




2

Поместите необходимое количество газогенерирующих пакетов в контейнер/пакет



3

Закройте контейнер/пакет и инкубируйте при необходимой температуре

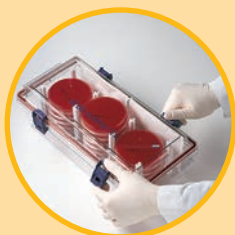



Контейнерные системы BD GasPak™ EZ

260002	малый	BD GasPak™ EZ - Incubation Container
260671	средний	Контейнер инкубационный BD ГазПак Изи
260672	большой	Предназначен для создания анаэробных, микроаэрофильных и CO ₂ -условий. Сделан из прочного химически устойчивого пластика, доступен в трех размерах: 260002: Малый инкубационный контейнер для 10 стандартных чашек Петри. 260671: Средний инкубационный контейнер для 15-18 стандартных чашек Петри. 260672: Большой инкубационный контейнер для 30-33 стандартных чашек Петри.

260003	малый	BD GasPak™ EZ - Container Rack
260673	средний	Держатель для контейнеров BD ГазПак Изи
260674	большой	Позволяет надежно разместить чашки Петри в контейнере, используется для переноса чашек, съемный. Совместим с соответствующими по размеру контейнерами: 260003: Малый держатель для размещения 10 стандартных чашек Петри. 260673: Средний держатель для размещения 15-18 стандартных чашек Петри. 260674: Большой держатель для размещения 30-33 стандартных чашек Петри.



Контейнерные системы BD GasPak™ 100 и 150

260626	малый	BD GasPak™ 100 - System Complete
260628	большой	BD GasPak™ 150 - Anaerobic System Complete (Large)

Система анаэробная BD ГазПак 100 и 150

Системы предназначены для создания анаэробных, микроаэрофильных и CO₂-условий. Содержат контейнер с круглой крышкой, держатель для чашек Петри и отдельный держатель для пробирок. Контейнер сделан из прочного химически устойчивого пластика, доступен в двух размерах:

260626: Система анаэробная БД ГазПак 100 для 12 стандартных чашек Петри, используется один газогенерирующий пакет.
260628: Система анаэробная БД ГазПак 150 для 36 стандартных чашек Петри, используется три газогенерирующих пакета.

260622	малая	BD GasPak™ 100 - Holding Jar
		Контейнер-банка герметичная BD ГазПак 100 с крышкой.
260411	малая	BD GasPak™ 100 - Lid
		BD ГазПак 100 крышка с уплотнительным кольцом.

Газогенерирующие пакеты для контейнерных систем BD GasPak™

Все газогенерирующие пакеты BD GasPak™ EZ подходят для использования со всеми системами и контейнерами BD GasPak™.

260678	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - Anaerobe Container System Sachets
		Газогенерирующие пакеты анаэробные для контейнеров BD ГазПак Изи
		Все газогенерирующие пакеты BD GasPak™ EZ активируются немедленно при удалении защитной упаковки из фольги и не требуют добавления воды или катализатора.
260001	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - Sachet Anaerobe with Indicator
		Газогенерирующие пакеты анаэробные с индикатором для контейнеров BD ГазПак Изи
		Индикатор находится непосредственно на пакете, при наличии кислорода он синее, при анаэробных условиях становится белым.

260679	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - CO2 Container System Sachets Газогенерирующие пакеты CO₂ для контейнеров BD ГазПак Изи
260680	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - Campy Container System Sachets Газогенерирующие пакеты Кампи для контейнеров BD ГазПак Изи Предназначены для создания микроаэрофильных условий.

Пакетные системы BD GasPak™ EZ

260683	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - Anaerobe Pouch System Система реагентных пакетов анаэробная BD ГазПак Изи Все системы реагентных пакетов BD GasPak™ EZ представляют собой систему для создания соответствующей атмосферы путем использования газогенерирующих пакетов внутри герметизируемых пластиковых пакетов одноразового использования. Состав всех систем реагентных пакетов BD GasPak™ EZ: - 20 газогенерирующих пакетов; - 20 пластиковых герметизируемых пакетов; - 20 анаэробных индикаторов (только анаэробная система). Для 1-4 чашек Петри.
260684	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - CO ₂ Pouch System Система реагентных пакетов CO₂ BD ГазПак Изи Предназначены для создания CO ₂ -условий для 1-4 чашек Петри.
260685	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - BD CampyPouch™ System Система реагентных пакетов Кампи BD ГазПак Изи Предназначены для создания микроаэрофильных условий для 2-4 чашек Петри.



Индикаторы анаэробных условий

271051	100 полосок	BD GasPak™ - Dry Anaerobic Indicator Strips Полоски индикаторные анаэробные сухие BD ГазПак Содержат индикатор, который меняет цвет с голубого на белый в отсутствие кислорода.
271055	50 полосок	BD GasPak™ - CO ₂ Indicator Strips Полоски индикаторные CO₂ BD ГазПак Показывают достижение CO ₂ -условий.

Автоматизированные системы гемокультивирования BD BACTEC™

**Системы BD BACTEC™ – ваш надежный партнер
в диагностике сепсиса**

BD BACTEC™ FX

BD BACTEC™ FX – автоматизированная система для гемокультивирования последнего поколения на 40, 80, 120, 160, 200 и 400 флаконов

- Интуитивное и понятное меню управления исключает ошибки в работе
- Цветной сенсорный дисплей
- Компактный дизайн позволяет экономить рабочее место в лаборатории
- Достоверно наименьшее время до детекции благодаря чувствительной флуоресцентной технологии и наличию более чем 16 специфических алгоритмов детекции
- Минимальный уход, техническое обслуживание и обучение
- Программное обеспечение BD EpiCenter™, специально созданное для клинической микробиологии, позволяет создавать эпидемиологические отчеты и контролировать работу лаборатории в целом



BD BACTEC™ 9050

BD BACTEC™ 9050 – идеальное решение для небольшой лаборатории

- Компактный прибор на 50 флаконов устанавливается на обычный лабораторный стол
- Управление производится при помощи встроенной клавиатуры и дисплея, нет необходимости подключения внешнего компьютера
- Звуковой и световой сигналы оповещения не позволят пропустить положительный результат



Питательные среды BD BACTEC™

Широкий спектр флаконов с питательными средами **BD BACTEC™**

- Возможность выбора питательной среды с учетом конкретной клинической ситуации – специальный детский флакон и флакон для селективного выявления грибов/дрожжей
- Сорбент (латексные частицы) достоверно инактивирует антибиотики, что повышает вероятность выделения возбудителя и сокращает время детекции



Анализаторы BD BACTEC™

441385	1	BD BACTEC™ FX Top Unit
Анализатор бактериологический BD БАКТЕК FX Верхний модуль на 200 флаконов. Для установки необходима стойка (кат. № 441388). Для лабораторий с потоком исследований не более 40 флаконов в день.		
441386	1	BD BACTEC™ FX Bottom
Анализатор бактериологический BD БАКТЕК FX Нижний модуль на 200 флаконов, заказывается только совместно с верхним модулем (кат. № 441385). Для лабораторий с потоком исследований не более 80 флаконов в день.		
441388	1	Stand for BD BACTEC™ FX Top Unit
Стойка для верхнего модуля BD БАКТЕК FX		
441387	1	Counter Weight for BD BACTEC™ FX Top Unit
Противовес для верхнего модуля BD БАКТЕК FX		
442296	1	BD BACTEC FX40
Анализатор бактериологический BD БАКТЕК FX 40 Компактный настольный анализатор гемокультур вместимостью 40 флаконов, с возможностью подключения дополнительных трех модулей, увеличивая вместимость до 160 флаконов.		
445800	1	BD BACTEC™ 9050
Анализатор бактериологический BD БАКТЕК 9050 Компактный и простой в использовании настольный анализатор вместимостью 50 флаконов для лабораторий с потоком исследований не более 10 флаконов в день.		



Среды BD BACTEC™

442192	50 флаконов	BD BACTEC™ PLUS Aerobic/F Medium
Среда для культивирования аэробов Содержит сорбент для нейтрализации антимикробных препаратов, что повышает высеваемость в случае пациента после лечения. Оптимальный объем образца 10 мл.		
442193	50 флаконов	BD BACTEC™ PLUS Anaerobic/F Medium
Среда для культивирования анаэробов Среда специально создана для культивирования анаэробов (бактерий и дрожжей). Содержит сорбент для нейтрализации антимикробных препаратов, что повышает высеваемость в случае пациента после лечения. Оптимальный объем образца 10 мл.		
442194	50 флаконов	BD BACTEC™ Peds PLUS™ Medium
Среда для культивирования аэробов из образцов детской крови Среда для культивирования аэробов (главным образом бактерий и грибов) из образцов детской крови и других случаев малого объема образца. Необходимый объем образца 1-3 мл. Содержит сорбент для нейтрализации антимикробных препаратов, что повышает высеваемость в случае пациента после лечения.		
442265	50 флаконов	BD BACTEC™ Lytic/10 Anaerobic/F Medium
Среда для культивирования анаэробов с лизирующим компонентом Содержит сапонин для лизиса лейкоцитов и высвобождения внутриклеточных микроорганизмов, что повышает высеваемость. Оптимальный объем образца 10 мл. Не содержит сорбент для инактивации антимикробных препаратов. Показывает меньшее время до детекции для факультативных и анаэробных микроорганизмов в сравнении с другими средами для анаэробов.		



442206	50 флаконов	BD BACTEC™ - Mycosis IC/F Medium
442026	25 флаконов	Среда для культивирования грибов

Селективная среда для культивирования грибов и дрожжей, содержит противомикробные препараты для подавления бактериального роста и сапонин для лизиса лейкоцитов и высвобождения внутриклеточных микроорганизмов. Оптимальный объем образца 10 мл. Позволяет значительно сократить время до детекции грибов и дрожжей в сравнении с неселективными средами. Специально создана для иммуносупрессированных пациентов.



442003	25 флаконов	BD BACTEC™ - Myco/F Lytic Medium
--------	-------------	----------------------------------

Среда для культивирования грибов, дрожжей, микобактерий

Неселективная среда, используется как дополнительная аэробная среда для высева микобактерий, грибов и дрожжей. Эта среда может также использоваться для культивирования стерильных жидкостей организма при подозрении на грибковые инфекции. Оптимальный объем образца 3-5 мл. Крайне актуально использование для пациентов с ВИЧ-инфекцией.




442153	20-24 теста	BD BACTEC™ - BD FOST™ Culture Supplement Kit
--------	-------------	--

Питательная добавка к средам BD БАКТЕК

Содержит NAD и гемин. Для добавления во флаконы BD BACTEC™ в случае культивирования стерильных жидкостей, отличных от крови (синовиальная жидкость, ликвор, суставная жидкость). Также применяется для повышения высеваемости требовательных к питательным средам микроорганизмов, таких как *Haemophilus spp.* и *Neisseria spp.*, и при культивировании образцов крови объемом меньше рекомендованного. Поставляется в лиофилизованном виде в комплекте с восстанавливающей жидкостью.

Системы безопасного взятия крови во флаконы BD BACTEC™

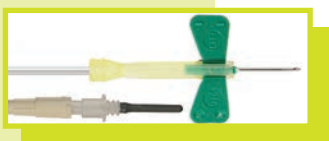

367282	50 шт	BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Set
--------	-------	---

Комплект для взятия крови (игла-«бабочка») с защитным механизмом BD Safety-Lok™ 21G

Применяется для взятия крови у взрослых. Диаметр иглы 0.8 мм, длина иглы 19 мм, длина катетера 18 см.



367284	50 шт	BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Set
--------	-------	---

Комплект для взятия крови (игла-«бабочка») с защитным механизмом BD Safety-Lok™ 23G

Применяется для взятия крови у взрослых и детей. Диаметр иглы 0.6 мм, длина иглы 19 мм, длина катетера 18 см.



367295	50 шт	BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Set
--------	-------	---

Комплект для взятия крови (игла-«бабочка») с защитным механизмом BD Safety-Lok™ 25G

Применяется для взятия крови у детей. Диаметр иглы 0.5 мм, длина иглы 19 мм, длина катетера 18 см.



364815	250 шт	BD Vacutainer™ One Use Holder
--------	--------	-------------------------------

Одноразовый держатель BD Vacutainer™

Применяется совместно с комплектами для взятия крови (игла-«бабочка») с защитным механизмом BD Safety-Lok™ (кат. № 367282, 367284, 367295).



364810	50 шт	BD Vacutainer™ Blood Transfer device
--------	-------	--------------------------------------

Устройство для переноса крови из шприца в пробирку или флакон для гемокультивирования

Совместимо с люер-адаптером.

Приспособления для безопасного субкультивирования

249560	50 шт	Subculture/Aerobic Vent
--------	-------	-------------------------

Набор для пересева культур из флаконов BD БАКТЕК

271056	100 шт	Sub/Venting Units for Culture Bottles Набор для пересева культур из флаконов BD БАКТЕК
367300	100 шт	BD Vacutainer™ Luer Adapter Люер-адаптер для взятия крови из катетеров BD Vacutainer™ Безопасный клапан для заполнения флаконов и пробирок. Необходимо использовать с держателем (кат. № 364815).




Приспособления для прямого инокулирования панелей BD Phoenix

300912	100 шт	BD Plastipak™ 10 ml Luer-Lok™ Syringe Шприц 10 мл BD Plastipak™
364810	50 шт	BD Vacutainer™ Blood Transfer device Устройство для переноса крови из шприца в пробирку или флакон для гемокультивирования Совместимо с люер-адаптером.
367953	100 шт	BD Vacutainer™ SST II Advance Пластиковые пробирки BD Vacutainer® SST™ II Advance с желтой крышкой BD Hemogard™ Кремнезем/гель. Объем 8.5 мл. Позволяют отделить бактериальные клетки от клеток крови и культуральной среды.



Дополнительные принадлежности для анализаторов BD BACTEC™

445529	500 шт	Label Barcode Spare Наклейки со штрих-кодом Дополнительные универсальные наклейки используются в случае повреждения основного штрих-кода на флаконе.
257347	10 шт	BD BACTEC™ - Transport box for Blood Culture Bottles Бокс для транспортировки флаконов Бокс из пенопласта для 4 флаконов BD BACTEC™.
445518	1	BD BACTEC™ - Vial Tray Подставка для флаконов BD БАКТЕК Стальной переносной держатель для 12 флаконов BD BACTEC™.
441370	1	BD BACTEC™ FX Digital Thermometer Термометр цифровой
445516	10 шт	BD BACTEC™ - Plug Заглушки BD БАКТЕК Используются для блокировки поврежденных станций анализаторов BD BACTEC™.
440809	1 комплект	FILTER AIR EXT LOOP FX Воздушные фильтры Для анализатора BD BACTEC™ FX.
441470	1 комплект	KIT FILTERS BFX SPARE Набор фильтров Для анализатора BD BACTEC™ FX.
445810	1 комплект	FILTER AIR B9050 F/G Воздушные фильтры Для анализатора BD BACTEC™ 9050.

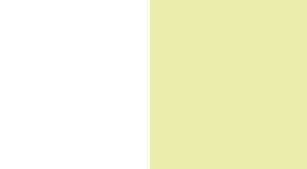

Ручные (бесприборные) системы и реагенты для идентификации микроорганизмов

Компания BD предлагает широкий спектр реагентов и наборов реагентов для идентификации микроорганизмов, которые облегчат и ускорят вашу работу и повысят качество анализа



Реагенты для окраски и идентификации микроорганизмов

Реагенты для окраски и идентификации микроорганизмов, в том числе и для классической окраски по Граму, диагностические реагенты и капельницы с реагентами (индол, оксидаза, акридин, каталаза)



Слайды BD DrySlide™

Слайды **BD DrySlide™** с нанесенными реагентами – индолом, нитроцефином или оксидазой позволяют проводить стандартные тесты без добавления дополнительных реагентов. Слайды являются удобной и экономичной альтернативой жидким реагентам. Каждый слайд содержит 4 сегмента, что позволяет проводить множественные тесты.



Диски и полоски BD Tacho™

Диски и полоски **BD Tacho™** с нанесенными реагентами предназначены для классической идентификации микроорганизмов. Каждый диск или полоска содержит специальный сухой реагент, обеспечивающий экономичную идентификацию и дифференциацию микроорганизмов.

- **BD Tacho™ A** – предположительная идентификация стрептококков группы A
- **BD Tacho™ P** – пневмококков
- **BD Tacho™ ONPG** – лактозоферментирующих бактерий
- **BD Tacho™ X и V** – для дифференциации видов гемофилов
- **BD Tacho™ TB Niacin** – для ниацинового теста микобактерий
- **BD Tacho™ INH** – для детекции изониазида и его метаболитов в моче

Легкий и удобный метод определения β-лактамаз

Самый легкий и удобный метод определения β-лактамаз – это использование слайдов **BD DrySlide™ – Nitrocefin** или дисков **BD Cefinase™ Paper Disc** с нитроцефином, хромогенным цефалоспорином, который рекомендуется для определения β-лактамазной активности *Neisseria gonorrhoeae*, *Staphylococcus spp.* и *Haemophilus influenzae*

Латексные тесты для быстрого выявления и идентификации патогенных микроорганизмов

BD Directigen™ – это латексные тесты для выявления:

- возбудителей **менингита** в клинических образцах (ликвор, моча, сыворотка) или идентификации колонии клеток;
- антигенов **вируса гриппа А и В** в клинических образцах (мазки и смывы носоглотки и горла, аспираты);
- антигенов **респираторно-синцитиального вируса** в клинических образцах (мазки и смывы носоглотки и горла, аспираты)

Латексные тесты **BD Staphyloslide™** позволяют идентифицировать в культуре клеток *Staphylococcus aureus* и отличить его от других стафилококков

Латексные тесты **BD Streptocard™** позволяют определить стрептококки группы А, В, С, G и F в культуре клеток



Диски BD Sensi-Disc™

Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам **BD Sensi-Disc™** – это:

- Более 100 тестируемых антибиотиков различной концентрации
- Постоянное расширение спектра продукции (дисков) за счет новых препаратов
- Экономически эффективный метод определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам
- Удобные в использовании диспенсеры для нанесения дисков: 1, 6, 8 или 12 дисков одновременно
- Высокое качество и надежность дисков
- Специальные диски для идентификации бактерий, продуцирующих β-лактамазы – подтверждение ESBL (β-лактамаз расширенного спектра) в полном соответствии со стандартом CLSI




Контрольные штаммы BD Microtrol™

Контрольные штаммы микроорганизмов **BD Microtrol™** американской коллекции штаммов (ATCC и NCTC)

- Оптимальный спектр микроорганизмов и штаммов
- Простота использования и хранения (необходимо хранить при -20°C – +4°C для большинства микроорганизмов)
- Гарантированная стабильность препарата



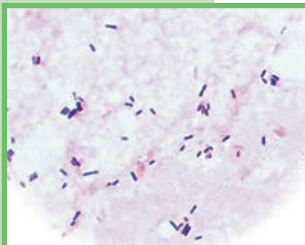

Реагенты для окраски микроорганизмов

212539	1	Gram Stain Kit (Stabilized)
Набор реагентов для окраски по Граму (стабилизированный)		
В отличие от классической методики окраски по Граму, набор содержит более стабильный реагент йодистого калия (комплекс L-поливинилпирролидин-йодин). Состав (каждого по 1 флакону 250 мл):		
- Грам кристаллический фиолетовый; - Раствор йодистого калия (стабилизированный); - Обесцвечивающий раствор; - Грам сафранин.		
212524	1	Gram Stain Kit (Unstabilized)
Набор реагентов для окраски по Граму (нестабилизированный)		
Состав (каждого по 1 флакону 250 мл):		
- Грам кристаллический фиолетовый; - Раствор йодистого калия (нестабилизированный); - Обесцвечивающий раствор; - Грам сафранин.		
212544	4x250 мл	Gram Basic Fuchsin
212545	3.8 л	Грам основной фуксин
212525	4x250 мл	Gram Crystal Violet
212526	3.8 л	Грам кристаллический фиолетовый
212527	4x250 мл	Gram Decolorizer
212528	3.8 л	Обесцвечивающий раствор
212542	4x250 мл	Gram Iodine (Stabilized)
212543	3.8 л	Раствор йодистого калия (стабилизированный) для окраски по Граму
212529	4x250 мл	Gram Iodine (Unstabilized)
212530	3.8 л	Раствор йодистого калия (нестабилизированный) для окраски по Граму
212531	4x250 мл	Gram Safranin
212532	3.8 л	Грам сафранин

Реагенты для идентификации микроорганизмов

261185	50 ампул	Indole
Капельница с индолом		
Модифицированный реагент Ковача для определения продуцирования индола бактериями. Каждая ампула содержит 0.5 мл реагента и может использоваться в течение одного дня после вскрытия.		
261187	50 ампул	DMACA Indole
Капельница с индолом DMACA		
Реагент DMACA обеспечивает быстрое и наглядное определение продуцирования индола бактериями. Каждая ампула содержит 0.5 мл реагента и может использоваться в течение одного дня после вскрытия.		

261181	50 ампул	Oxidase
Капельница с оксидазой Для проведения оксидазного теста Ковача. Позволяет идентифицировать неферментирующие и смешанные грамотрицательные бактерии. Тест основан на продуцировании фермента индофенол оксидазы, в присутствии которого реагент меняет цвет с желтого на темно-фиолетовый. Каждая ампула содержит 0.5 мл реагента и может использоваться в течение одного дня после вскрытия.		
261203	50 ампул	Catalase
Капельница с каталазой Реагент для определения каталазной активности бактерий. Фермент каталаза присутствует в большинстве аэробных и факультативно-анаэробных бактерий за исключением стрептококков и энтерококков. Содержит 3% раствор пероксида водорода со стабилизатором.		
261204	50 ампул	Methylene Blue Loeffler
Капельница с метиленовым синим Леффлера Используется для предварительной идентификации <i>Corynebacterium diphtheriae</i> и как дополнение к окраске по Граму (особенно для грамотрицательных бактерий, таких как <i>Haemophilus influenzae</i> и <i>Neisseria species</i>).		
261182	50 ампул	Acridine Orange
Капельница с акридином оранжевым для окрашивания мазков Используется для окраски мазков для анализа методом флуоресцентной микроскопии. Каждая капельница содержит достаточное количество реагента для окраски одного мазка (0.5 мл).		
261190	50 ампул	Ferric Chloride
Капельница с хлоридом железа Используется для дифференциации микроорганизмов, способных дезаминировать фенилаланин до фенилпировиноградной кислоты. Большинство представителей <i>Proteus</i> и <i>Providencia</i> положительны, тогда как большинство <i>Escherichia</i> и <i>Citrobacter species</i> отрицательны. Каждая ампула содержит 0.5 мл 10% водного раствора хлорида железа.		
261191	50 ампул	10 % Potassium Hydroxide
Капельница с 10% гидроксидом калия Используется для выявления грибковой флоры в мазках. Каждая ампула содержит 0.5 мл реагента и может использоваться в течение одного дня после вскрытия.		
261196	50 ампул	PYR
Капельница с реагентом ПИР Используется для выявления бактерий, продуцирующих пирролидонил пептидазу. Позволяет предварительно идентифицировать бета-гемолитические стрептококки группы А и энтерококки группы D. Каждая ампула содержит 0.5 мл реагента.		
261192	50 ампул	Voges-Proskauer A
Капельница с реагентом Фогеса – Проскауэра А Используется для проведения теста Фогеса-Проскауэра для дифференциации представителей <i>Enterobacteriaceae</i> . Каждая ампула содержит 0.5 мл 5% спиртового раствора альфа-нафтола.		
261193	50 ампул	Voges-Proskauer B
Капельница с реагентом Фогеса – Проскауэра В Используется для проведения теста Фогеса-Проскауэра для дифференциации представителей <i>Enterobacteriaceae</i> . Каждая ампула содержит 0.5 мл 40% водного раствора гидроксида калия.		



240658	10x3 мл	Coagulase Plasma
240661	10x15 мл	Плазма кроличья для проведения коагулазного теста Плазма кроличья, лиофилизированная, с 0.85% цитрата натрия и 0.85% хлорида натрия. Используется для определения патогенных стафилококков (<i>Staphylococcus aureus</i>). Для одного теста необходимо 0.5 мл восстановленной плазмы.
240827	10x3 мл	Coagulase Plasma with EDTA
240826	10x15 мл	Плазма кроличья с ЭДТА для проведения коагулазного теста
240680	10x25 мл	Плазма кроличья, лиофилизированная, с 0.15% ЭДТА и 0.85% хлорида натрия. Используется для определения патогенных стафилококков (<i>Staphylococcus aureus</i>). Для одного теста необходимо 0.5 мл восстановленной плазмы.

Слайды с реагентами BD DrySlide™

231748	75 слайдов	BD DrySlide™ - Indole Тест BD ДрайСлайд на индол Используется для проведения теста на индол. Каждый одноразовый слайд содержит четыре поля для проведения теста.
231749	25 слайдов	BD DrySlide™ - Nitrocefin Тест BD ДрайСлайд с нитроцефином Используется для быстрого определения β-лактамазной активности бактерий. Каждый одноразовый слайд содержит четыре поля для проведения теста.
231746	75 слайдов	BD DrySlide™ - Oxidase Тест BD ДрайСлайд на оксидазу Используется для проведения оксидазного теста (наличие цитохрома С в бактериях). Каждый одноразовый слайд содержит четыре поля для проведения теста.
231747	15 слайдов	BD DrySlide™ - PYR Kit Набор BD ДрайСлайд ПИР Используется для предварительной идентификации стрептококков группы А и энтерококков. Содержит: - 15 одноразовых слайдов (четыре поля на каждом) - 15 капельниц с окрашивающим реагентом (по 0.5 мл).

Диски и полоски с реагентами BD Taxo™

231651	1 набор	BD Taxo™ - Anaerobe Disc Set Набор дисков BD Таксо для идентификации анаэробов Используется для предварительной идентификации грамотрицательных анаэробных бактерий. Тест основан на разнице в чувствительности бактерий к антимикробным препаратам. Этот тест не используется в терапевтических целях. Состав набора (каждого по 1 картриджу на 50 дисков): - BD Таксо Канамицин 1 мг К; - BD Таксо Рифампин 15 мг RA; - BD Сенси-Диск Пенициллин 2 единицы P-2; - BD Сенси-Диск Ванкомицин 5 мг VA-5; - BD Сенси-Диск Колистин 10 мг CL-10.
231650	50 дисков	BD Cefinase™ Paper Disc (1/4") Бумажные диски с цефиназой Бумажные диски пропитанные нитроцефином используются для обнаружения β-лактамаз. Тестируются изолированные колонии <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Staphylococcus</i> spp., <i>Haemophilus influenzae</i> и анаэробных бактерий на β-лактамазную активность.

231040	50 дисков	BD Taxo™ - A Discs
231041	6x50 дисков	Диски BD Таксо А с бацитрацином
231552	10x50 дисков	Используются для предварительной идентификации бета-гемолитических стрептококков группы А, основанной на чувствительности к низкой концентрации бацитрацина. Диски предназначены для использования с чистой культурой.
231562	50 дисков	BD Taxo™ - Kanamycin Discs
		Диски BD Таксо с канамицином
		Для дифференциации грамотрицательных анаэробных бактерий. Содержат 1 мг канамицина.
231045	6x50 дисков	BD Taxo™ - N Discs
		Диски BD Таксо N
		Для определения оксидазо-продуцирующих микроорганизмов. Могут использоваться для предварительной дифференциации рода <i>Neisseria</i> от других грамотрицательных кокков и представителей рода <i>Pseudomonas</i> от энтеробактерий.
231734	50 дисков	BD Taxo™ - Nitrate Discs
		Диски BD Таксо нитратные
		Для определения нитрат-редуктазной активности анаэробов.
231750	50 дисков	BD Taxo™ - Novobiocin Discs
		Диски BD Таксо с новобиоцином
		Для дифференциации коагулазо-отрицательных стафилококков (таких как <i>Staphylococcus saprophyticus</i>), основанной на устойчивости к новобиоцину. Содержат 5 мг новобиоцина.
231248	50 дисков	BD Taxo™ - ONPG Discs
		Диски BD Таксо ONPG
		Для выявления микроорганизмов, ферментирующих лактозу.
231046	50 дисков	BD Taxo™ - P Discs
231047	6x50 дисков	Диски BD Таксо Р с оптохином
231048	50 дисков	Для дифференциации пневмококков от других альфа-гемолитических стрептококков (<i>Streptococcus pneumoniae</i>).
231554	10x50 дисков	
231726	50 дисков	BD Taxo™ - SPS Discs
		Диски BD Таксо SPS
		Содержат полианетолсульфонат натрия. Для предварительной идентификации <i>Peptostreptococcus anaerobius</i> и <i>Gardnerella vaginalis</i> .
231737	50 дисков	BD Taxo™ - Urea Discs
		Диски BD Таксо с мочевиной
		Для обнаружения организмов, продуцирующих уреазу. Бумажные диски от желтого до бледно-оранжевого цвета.
231108	50 полосок	BD Taxo™ - V Factor Strips
231109	6x50 полосок	Полоски BD Таксо с фактором V
		Диски и полоски, пропитанные факторами V, X или смесью V и X позволяют выявлять и дифференцировать <i>Haemophilus species</i> . Рост этих микроорганизмов частично зависит от наличия этих факторов.
231727	50 дисков	BD Taxo™ - V Factor Discs
		Диски BD Таксо с фактором V
		Для дифференциации <i>Haemophilus species</i> .



231729	50 дисков	BD Taxo™ - X Factor Discs Диски BD Таксо с фактором X Для дифференциации <i>Haemophilus species</i> .
231731	50 дисков	BD Taxo™ - X and V Factor Discs Диски BD Таксо с фактором X и V Для дифференциации <i>Haemophilus species</i> .
231057	50 дисков	BD Taxo™ - Adonitol Discs Диски BD Таксо с адонитолом
231059	50 дисков	BD Taxo™ - Arabinose Discs Диски BD Таксо с арабинозой
231066	6x50 дисков	BD Taxo™ Galactose Discs Диски BD Таксо с галактозой
231061	50 дисков	BD Taxo™ - Dextrose Discs Диски BD Таксо с декстрозой
231063	50 дисков	BD Taxo™ - Dulcitol Discs Диски BD Таксо с дульцитолом
231071	50 дисков	BD Taxo™ - Lactose Discs Диски BD Таксо с лактозой
231075	50 дисков	BD Taxo™ - Maltose Discs Диски BD Таксо с мальтозой
231077	50 дисков	BD Taxo™ - Mannitol Discs Диски BD Таксо с маннитолом
231091	50 дисков	BD Taxo™ - Rhamnose Discs Диски BD Таксо с рамнозой
231089	50 дисков	BD Taxo™ - Raffinose Discs Диски BD Таксо с раффинозой
231098	50 дисков	BD Taxo™ - Sucrose Discs Диски BD Таксо с сахарозой
231096	50 дисков	BD Taxo™ - Sorbitol Discs Диски BD Таксо с сорбитолом
231100	50 дисков	BD Taxo™ - Trehalose Discs Диски BD Таксо с трегалозой
231742	25 полосок	BD Taxo™ - Nitrite Test Strips BD Таксо нитритные тест-полоски Позволяют различить медленно растущие микобактерии (<i>M. tuberculosis</i> , <i>M. kansasii</i> и <i>M. fortuitum</i> , положительные на нитритный тест) от быстро растущих микобактерий (<i>M. bovis</i> , <i>M. avium complex</i> и <i>M. intracellulare</i> , отрицательны или слабо положительные на нитритный тест). При положительном результате полоска синеет.



231741	25 полосок	BD Taxo™ - TB Niacin Test Strips
BD Таксо ниациновые тест-полоски		
Ниациновый тест показывает присутствие в культуральной среде никотиновой кислоты, продуцируемой микобактериями. При положительном результате полоска желтеет.		
231735	50 дисков	BD Taxo™ - TB Niacin Test Control
BD Таксо ниациновые контрольные диски		
Контрольный тест на ниацин. Диск содержит никотинамид, который дает положительный результат. Используется совместно с ниациновыми тест-полосками (кат. № 231741).		
231743	25 полосок	BD Taxo™ - INH Test Strips
BD Таксо изониазидные тест-полоски		
Используются для обнаружения изониазида и его метаболитов в моче. В их присутствии полоска меняет цвет на зеленый, синий или фиолетовый. Также является модифицированным ниациновым тестом и используется для определения ниацина, продуцируемого <i>M. tuberculosis</i> . Должны храниться при температуре 2-8°C.		
231736	50 дисков	BD Taxo™ - INH Test Control
BD Таксо изониазидные контрольные диски		
Контрольный тест на изониазид. Пропитанный диск дает положительный результат. Используется совместно с изониазидными тест-полосками (кат. № 231743).		

Латексные тесты для быстрой идентификации патогенных микроорганизмов

252360	30 тестов	BD Directigen™ - Meningitis Combo Test Kit
Комбинированный тест BD Директиген для раннего обнаружения возбудителей менингита		
Тест на основе латекс-агглютинации для прямого определения антигенов <i>H. influenzae</i> типа B, <i>S. pneumoniae</i> , стрептококков группы B, <i>N. meningitidis</i> групп A, B, C, Y или W135 и <i>Escherichia coli</i> K1 в клинических образцах и колониях клеток. Идеален для моментальной постановки предварительного диагноза. В комплект входит полный набор реагентов и тест-карт.		
251960	30 тестов	BD Directigen™ - <i>S. pneumoniae</i> Test Kit
Тест BD Директиген для определения антигенов к <i>S. pneumoniae</i>		
Тест на основе латекс-агглютинации для прямого определения антигенов <i>S. pneumoniae</i> в клинических образцах и колониях клеток. Идеален для моментальной постановки предварительного диагноза. Дополнительно необходимы буферный раствор BD Директиген для образцов (кат. № 256391) и тест-карты BD Директиген для обнаружения возбудителей менингита (кат. № 252480).		
252260	30 тестов	BD Directigen™ - <i>H. influenzae</i> type B Test Kit
Тест BD Директиген для определения антигенов к <i>H. influenzae</i> типа B		
Тест на основе латекс-агглютинации для прямого определения антигенов <i>H. influenzae</i> типа B в клинических образцах и колониях клеток. Идеален для моментальной постановки предварительного диагноза. Дополнительно необходимы буферный раствор BD Директиген для образцов (кат. № 256391) и тест-карты BD Директиген для обнаружения возбудителей менингита (кат. № 252480).		



255460	30 тестов	BD Directigen™ - Group B Strep Test Kit
Тест BD Директиген для определения антигенов стрептококков группы В Тест на основе латекс-агглютинации для прямого определения антигенов стрептококков группы В в клинических образцах и колониях клеток. Идеален для моментальной постановки предварительного диагноза. Дополнительно необходимы буферный раствор BD Директиген для образцов (кат. № 256391) и тест-карты BD Директиген для обнаружения возбудителей менингита (кат. № 252480).		
256391	8 мл	BD Directigen™ - Meningitis Specimen Buffer
Буферный раствор BD Директиген для образцов Буферный раствор для использования с наборами (кат. № 252360, 251960, 252260, 255460). Входит в состав набора (кат. № 252360).		
252480	30 тестов	BD Directigen™ - Meningitis Combo Test Cards
Тест-карты BD Директиген для обнаружения возбудителей менингита Для использования с наборами (кат. № 252360, 251960, 252260, 255460). Входит в состав набора (кат. № 252360).		
256050	30 тестов	BD Directigen™ EZ - Flu A+B
Тест BD Директиген EZ для определения антигенов вируса гриппа типа А и В Быстрый хроматографический иммунологический дифференциальный тест на антигены вируса гриппа типов А и В в клинических образцах.		
256030	30 тестов	BD Directigen™ EZ - RSV Test Kit
Тест BD Директиген EZ для определения антигена респираторно-синцитиального вируса Быстрый хроматографический иммунологический тест на антигены респираторно-синцитиального вируса в клинических образцах.		
240950	50 тестов	BD Streptocard™ - Enzyme Latex Test Kit
Набор BD Стрептокард для ферментативного латексного анализа Тест на основе латекс-агглютинации для идентификации стрептококков групп А, В, С, F и G по Лэнсфилду из колоний бета-гемолитических и негемолитических стрептококков.		
240951	50 тестов	BD Streptocard™ - Acid Latex Test Kit
Набор BD Стрептокард для кислотного латексного анализа Используется для идентификации стрептококков групп А, В, С, F и G по Лэнсфилду из колоний бета-гемолитических стрептококков.		
240961	2.5 мл	BD Streptocard™ - Group B Latex Reagent
BD Стрептокард латексный реагент группы В Используется для идентификации стрептококков группы В по Лэнсфилду из колоний бета-гемолитических стрептококков.		
240952	100 тестов	BD Staphyloslide™ - Latex Test Kit
Набор BD Стафилослайд для латексного анализа Тест на основе латекс-агглютинации для дифференциации стафилококков, содержащих фактор агрегации и/или белок А, обычно присутствующий у <i>Staphylococcus aureus</i> , от стафилококков, не содержащих этого фактора.		



Диски с антимикробными препаратами и диспенсеры BD Sensi-Disc™


260457	1	BD Sensi-Disc™ - Single Disc Dispenser
Диспенсер для одного картриджа		
Рекомендуется для постановки единичных биохимических тестов и тестов на чувствительность к антимикробным препаратам. Заменяет процедуру постановки теста с помощью стерильного пинцета.		
260661	1	BD Sensi-Disc™ - 6-Place Dispenser
Диспенсер для 6 картриджей		
Позволяет одновременно наносить до 6 дисков с антимикробными препаратами BD Sensi-Disc™ или дисков BD Тахо™ на чашку диаметром 100 мм.		
260660	1	BD Sensi-Disc™ - 8-Place Dispenser
Диспенсер для 8 картриджей		
Позволяет одновременно наносить до 8 дисков с антимикробными препаратами BD Sensi-Disc™ или дисков BD Тахо™ на чашку диаметром 100 мм.		
260640	1	BD Sensi-Disc™ - Designer Dispenser System
Сенси-Диск Диспенсер Дизайнер систем		
Позволяет одновременно наносить до 12 дисков с антимикробными препаратами BD Sensi-Disc™ на чашку диаметром 150 мм.		
231682	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Azithromycin, 15 µg (AZM-15)
Азитромицин AZM-15		
254749	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Azlocillin, 30 µg (AZ-30)
Азлоциллин AZ-30		
231625	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Azlocillin, 75 µg (AZ-75)
Азлоциллин AZ-75		
231641	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Aztreonam, 30 µg (ATM-30)
Азтреонам ATM-30		
231639	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Amdinocillin, 10 µg (AMD-10)
Амдиноциллин AMD-10		
254744	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Amikacin, 10 µg (AN-10)
Амикацин AN-10		
231597	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Amikacin, 30 µg (AN-30)
254703	50 дисков	Амикацин AN-30
291370	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Amoxicillin, 10 µg (AMX-10)
Амоксициллин AMX-10		
295306	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Amoxicillin, 25 µg (AMX-25)
254741	50 дисков	Амоксициллин AMX-25
231629	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Augmentin (AMC-30)
254718	50 дисков	Аугментин / Амоксициллин 20 мг с Клавулановой Кислотой 10 мг AMC-30




231263	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ampicillin, 2µg (AM-2) Ампициллин АМ-2
231264	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ampicillin, 10 µg (AM-10)
254727	50 дисков	Ампициллин АМ-10
291269	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ampicillin, 25 µg (AM-25)
254739	50 дисков	Ампициллин АМ-25
231660	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ampicillin/Sulbactam (SAM-20) Ампициллин с Сульбактамом 10/10 SAM-20
231267	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Bacitracin, 2 units (B-2) Бацитрацин В-2
231268	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Bacitracin, 10 units (B-10)
254750	50 дисков	Бацитрацин В-10
231352	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Vancomycin, 5 µg (VA-5) Ванкомицин VA-5
231353	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Vancomycin, 30 µg (VA-30)
254858	50 дисков	Ванкомицин VA-30
232202	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Voriconazole, 1 ug (VOR-1) Вориконазол VOR-1
231760	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Gatifloxacin, 5 µg (GAT-5) Гатифлоксацин GAT-5
231299	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Gentamicin, 10 µg (GM-10)
254726	50 дисков	Гентамицин GM-10
231693	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Gentamicin, 120 µg (GM-120) Гентамицин GM-120
232116	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Dalfopristin/Quinupristin (Synercid), 15 µg (SYN-15) Дальфопристин/Куинупристин (Синерцид) SYN-15
231286	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Doxycycline, 30 µg (D-30) Доксициклин D-30
232219	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Doripenem, 10 µg (DOR-10) Дорипенем DOR-10
231571	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Isoniazid (Isonicotinyl Hydrazine), 1 µg (INH-1) Изониазид INH-1
231572	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Isoniazid (Isonicotinyl Hydrazine), 5 µg (INH-5) Изониазид INH-5
231645	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Imipenem, 10 µg (IPM-10)
254797	50 дисков	Имипенем IPM-10
231301	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Kanamycin, 30 µg (K-30)
254799	50 дисков	Канамицин K-30




231555	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Carbenicillin, 100 µg (CB-100) Карбенициллин CB-100
231678	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Clarithromycin, 15 µg (CLR-15) Кларитромицин CLR-15
231275	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Clindamycin, 2 µg (CC-2)
254752	50 дисков	Клиндамицин CC-2
231276	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cloxacillin, 1 µg (CX-1) Клоксациллин CX-1
231278	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Colistin, 10 µg (CL-10)
254766	50 дисков	Колистин CL-10
291309	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Colistin, 25 µg (CL-25) Колистин CL-25
231706	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Levofloxacin, 5 µg (LVL-5)
231705	50 дисков	Левофлоксацин LVL-5
232184	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Linezolid, 10 µg (LZD-10) Линезолид LZD-10
231761	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Linezolid, 30 µg (LZD-30) Линезолид LZD-30
231302	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Lincomycin, 2 µg (L-2) Линкомицин L-2
231686	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Lomefloxacin, 10 µg (LOM-10) Ломефлоксацин LOM-10
231615	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Mezlocillin, 75 µg (MZ-75) Мезлоциллин MZ-75
231704	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Meropenem, 10 µg (MEM-10)
254882	50 дисков	Меропенем MEM-10
231605	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Metronidazole, 80 µg (MET-80)
254802	50 дисков	Метронидазол MET-80
232149	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Mecillinam, 10 µg (MEC-10) Мециллинам MEC-10
231251	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Minocycline, 30 µg (MI-30) Миноциклин MI-30
231611	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Moxalactam, 30 µg (MOX-30) Моксалактам MOX-30
231758	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Moxifloxacin, 5 µg (MXF-5)
231757	50 дисков	Моксифлоксацин MXF-5
291280	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Mupirocin, 5 µg (MUP-5) Мупироцин MUP-5

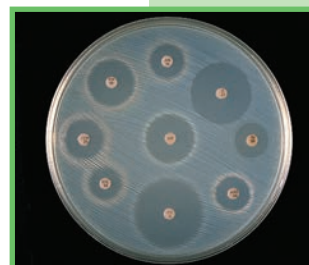

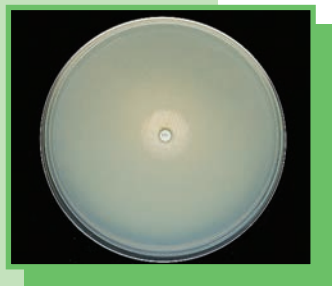

232097	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Mupirocin, 200 µg (MUP-200) Мупироцин MUP-200
231311	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nalidixic Acid, 30 µg (NA-30)
254730	50 дисков	Налидиксовая Кислота NA-30
231309	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nafcillin, 1 µg (NF-1) Нафциллин NF-1
231312	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Neomycin, 5 µg (N-5) Неомицин N-5
231313	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Neomycin, 30 µg (N-30)
254808	50 дисков	Неомицин N-30
231603	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Netilmicin, 30 µg (NET-30)
254710	50 дисков	Нетилмицин NET-30
291282	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin, 50 µg (FM-50) Нитрофурантоин FM-50
231292	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin, 100 µg (FM-100) Нитрофурантоин FM-100
295339	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin, 200 µg (FM-200) Нитрофурантоин FM-200
231293	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin, 300 µg (FM-300)
254702	50 дисков	Нитрофурантоин FM-300
254855	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin 300 µg + Sulfafiazine 100 µg (FM-300/SD-100) Нитрофурантоин с Сульфафиазином 300/100 FM-300/SD-100
231314	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Novobiocin, 5 µg (NB-5)
254881	50 дисков	Новобиоцин NB-5
231315	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Novobiocin, 30 µg (NB-30) Новобиоцин NB-30
231647	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Norfloxacin, 10 µg (NOR-10)
254719	50 дисков	Норфлоксацин NOR-10
231319	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Oxacillin, 1 µg (OX-1)
254822	50 дисков	Оксациллин OX-1
254823	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Oxacillin, 5 µg (OX-5) Оксациллин OX-5
231342	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Oxytetracycline, 30 µg (T-30) Окситетрациклин T-30
232016	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Oleandomycin, 15 µg (OL-15)
254821	50 дисков	Олеандомицин OL-15

231672	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ofloxacin, 5 µg (OFX-5)
254819	50 дисков	Офлоксацин OFX-5
231320	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Penicillin, 2 units (P-2)
		Пенициллин P-2
231321	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Penicillin, 10 units (P-10)
254708	50 дисков	Пенициллин P-10
291028	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Pefloxacin, 5 µg (PEF-5)
		Пефлоксацин PEF-5
254700	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Pipemidic Acid, 20 µg (PI-20)
		Пипемидиевая Кислота PI-20
231609	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Piperacillin, 100 µg (PIP-100)
254712	50 дисков	Пиперациллин PIP-100
231692	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Piperacillin 100 µg + Tazobactam 10 µg (PIP-100/TAZ-10)
		Пиперациллин с Тазобактамом PIP-100/TAZ-10
231324	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Polymyxin B, 300 units (PB-300)
254828	50 дисков	Полимиксин Б PB-300
231544	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Rifampin, 5 µg (RA-5)
		Рифампин RA-5
231578	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Rifampin, 25 µg (RA-25)
		Рифампин RA-25
291287	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Rifampicin, 2 µg (RA-2)300/SD-100)
		Рифампицин RA-2
295042	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Rifampicin, 30 µg (RA-30)
		Рифампицин RA-30
231637	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Spectinomycin, 100 µg (SPT-100)
		Спектиномицин SPT-100
291062	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Spiramicin, 100 µg (SP-100)
		Спирамицин SP-100
231328	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Streptomycin, 10 µg (S-10)
		Стрептомицин S-10
231570	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Streptomycin, 50 µg (S-50)
		Стрептомицин S-50
231694	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Streptomycin, 300 µg (S-300)
		Стрептомицин S-300
254875	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Sulbactam 30 µg with Cefoperazone 75 µg (SCP-105)
		Сульбактам с Цефоперазоном 30/75 SCP-1

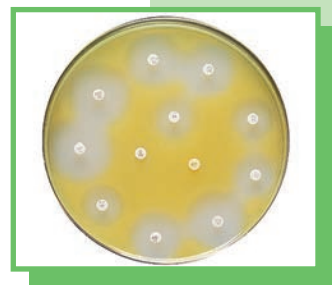



231337	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Sulfathiazole, 0.25 µg (ST-0.25) Сульфатиазол ST-0.25
231296	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Sulfisoxazole, 25 µg (G-25) Сульфизоксазол G-25
291311	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Teicoplanin, 30 µg (TEC-30) Тейкопланин TEC-30
266647	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Telithromycin, 15 µg (TEL-15) Телитромицин TEL-15
291034	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Temocillin, 30 µg (TEM-30) Темоциллин TEM-30
231343	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Tetracycline, 5 µg (TE-5) Тетрациклин TE-5
231344	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Tetracycline, 30 µg (TE-30)
254728	50 дисков	Тетрациклин TE-30
232208	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Tigecycline, 15 µg (TGC-15)
232087	50 дисков	Тигециклин TGC-15
231619	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ticarcillin, 75 µg (TIC-75) Тикарциллин TIC-75
231649	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ticarcillin with Clavulanic Acid (Timentin), 85 µg (TIM-85) Тикарциллин с Клавулановой Кислотой 75/10 (Тиментин) TIM-85
231569	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Tobramycin, 10 µg (NN-10)
254815	50 дисков	Тобрамицин NN-10
296398	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Trimethoprim, 1.25 µg (TR-1.25) Триметоприм TR-1.25
291037	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Trimethoprim, 2.5 µg (TR-2.5) Триметоприм TR-2.5
231601	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Trimethoprim, 5 µg (TMP-5)
254714	50 дисков	Триметоприм TMP-5
231539	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Trimethoprim 1.25 µg + Sulfamethoxazol 23.75 µg (Cotrimoxazol) (SXT)
254729	50 дисков	Триметоприм с Сульфаметоксазолом (Котримоксазол) 1,25/23,75 SXT
232201	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Fluconazole, 25 µg (FCA-25) Флуконазол FCA-25
254788	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Fosfomycin, 50 µg (FF-50)
296589	10x50 дисков	Фосфомицин FF-50
231709	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Fosfomycin, 200 µg (FOS-200) Фосфомицин FOS-200

291277	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Fusidic Acid, 10 µg (FA-10)
254785	50 дисков	Фузидиевая Кислота FA-10
230809	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Furazolidone, 100 µg (FX-100)
		Фуразолидон FX-10
231274	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Chloramphenicol, 30 µg (C-30)
254725	50 дисков	Хлорамфеникол C-30
254758	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefadroxyl, 30 µg (CFR-30)
		Цефадроксил CFR-30
231593	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefazolin, 30 µg (CZ-30)
254734	50 дисков	Цефазолин CZ-30
231653	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefaclor, 30 µg (CEC-30)
254755	50 дисков	Цефаклор CEC-30
231271	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cephalothin, 30 µg (CF-30)
254704	50 дисков	Цефалотин CF-30
231713	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefdinir, 5 µg (CDR-5)
		Цефдинир CDR-5
231696	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefepime, 30 µg (FEP-30)
254893	50 дисков	Цефепим FEP-30
231664	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefixime, 5 µg (CFM-5)
		Цефиксим CFM-5
231591	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefoxitin, 30 µg (FOX-30)
254711	50 дисков	Цефокситин FOX-30
231643	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefonicid, 30 µg (CID-30)
		Цефоницид CID-30
254715	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefoperazone, 30 µg (CFP-30)
		Цефоперазон CFP-30
231613	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefoperazone, 75 µg (CFP-75)
		Цефоперазон CFP-75
231607	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefotaxime, 30 µg (CTX-30)
254713	50 дисков	Цефотаксим CTX-30
		ESBL – диск.
231752	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefotaxime 30 µg with Clavulanic Acid 10 µg (CTX-30/CLA-10)
231751	50 дисков	Цефотаксим 30 мкг с Клавулановой Кислотой 10 мкг CTX-30/CLA-10
		ESBL – диск.
231656	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefotetan, 30 µg (CTT-30)
		Цефотетан CTT-30



254762	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefotiam, 30 µg (CFT-30) Цефотиам CFT-30
232043	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefpirome, 30 µg (CPO-30) Цефпиром CPO-30
231674	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefpodoxime, 10 µg (CPD-10) Цефподоксим CPD-10
231684	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefprozil, 30 µg (CPR-30) Цефпрозил CPR-30
296986	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cephradine, 30 µg (CH-30) Цефрадин CH-30
254760	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefsulodin, 30 µg (CFS-30) Цефсулодин CFS-30
231633	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ceftazidime, 30 µg (CAZ-30)
254878	50 дисков	Цефтазидим CAZ-30 ESBL – диск.
231754	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ceftazidime 30 µg with Clavulanic Acid 20 µg (CAZ-30/CLA-10)
231753	50 дисков	Цефтазидим с Клавулановой Кислотой CAZ-30/CLA-10 ESBL – диск.
231623	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ceftizoxime, 30 µg (ZOX-30) Цефтизоксим ZOX-30
231635	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ceftriaxone, 30 µg (CRO-30)
254722	50 дисков	Цефтриаксон CRO-30
231621	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefuroxime, 30 µg (CXM-30)
254775	50 дисков	Цефуросим CXM-30
231658	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ciprofloxacin, 5 µg (CIP-5)
254724	50 дисков	Ципрофлоксацин CIP-5
231662	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Enoxacin, 10 µg (ENX-10) Эноксацин ENX-10
231289	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Erythromycin, 2 µg (E-2) Эритромицин E-2
231290	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Erythromycin, 15 µg (E-15)
254731	50 дисков	Эритромицин E-15
232175	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ertapenem, 10 µg (ETP-10)
232174	50 дисков	Эртапенем ETP-10
231575	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ethambutol, 25 µg (EM-25) Этамбутол EM-25



231576	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ethambutol, 50 µg (EM-50) Этамбутол EM-50
231577	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ethionamide, 25 µg (EA-25) Этионамид EA-25

Контрольные штаммы микроорганизмов BD Microtrol™

254652	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Aspergillus niger</i> , ATCC 16404 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Aspergillus niger</i> , ATCC 16404
254648	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Bacillus cereus</i> , NCTC 7464 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Bacillus cereus</i> , NCTC 7464 (ATCC 10876)
254612	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Bacillus subtilis</i> , ATCC 6633 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Bacillus subtilis</i> , ATCC 6633
254627	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Bacteroides fragilis</i> , ATCC 25285 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Bacteroides fragilis</i> , ATCC 25285
254645	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Campylobacter jejuni</i> , NCTC 11322 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Campylobacter jejuni</i> , NCTC 11322 (ATCC 29428)
254611	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Candida albicans</i> , ATCC 2091 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Candida albicans</i> , ATCC 2091
254625	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Candida albicans</i> , ATCC 10231 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Candida albicans</i> , ATCC 10231
257461	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Citrobacter freundii</i> , ATCC 8090 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Citrobacter freundii</i> , ATCC 8090
254628	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Clostridium perfringens</i> , ATCC 13124 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Clostridium perfringens</i> , ATCC 13124
254614	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Clostridium sporogenes</i> , ATCC 19404 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Clostridium sporogenes</i> , ATCC 19404
254609	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Enterobacter aerogenes</i> , ATCC 13048 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Enterobacter aerogenes</i> , ATCC 13048
257464	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Enterobacter cloacae</i> , ATCC 23355 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Enterobacter cloacae</i> , ATCC 23355
254999	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Enterococcus faecalis</i> , ATCC 19433 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Enterococcus faecalis</i> , ATCC 19433



254602	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Enterococcus faecalis</i> , ATCC 29212 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Enterococcus faecalis</i> , ATCC 29212
257388	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Enterococcus faecalis</i> , ATCC 51299 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Enterococcus faecalis</i> , ATCC 51299
257462	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Enterococcus hirae</i> , ATCC 10541 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Enterococcus hirae</i> , ATCC 10541
254621	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Escherichia coli</i> , ATCC 8739 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Escherichia coli</i> , ATCC 8739subtilis, ATCC 6633
254616	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Escherichia coli</i> , ATCC 10536 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Escherichia coli</i> , ATCC 10536
254986	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Escherichia coli</i> , ATCC 25922 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Escherichia coli</i> , ATCC 25922
254607	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Escherichia coli</i> , ATCC 35218 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Escherichia coli</i> , ATCC 35218
257537	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Haemophilus influenzae</i> , NCTC 8468 (ATCC 9934) Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Haemophilus influenzae</i> , NCTC 8468 (ATCC 9934)
257441	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Haemophilus influenzae</i> , ATCC 49247 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Haemophilus influenzae</i> , ATCC 49247
257463	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Klebsiella aerogenes</i> , NCTC 9528 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Klebsiella aerogenes</i> , NCTC 9528
254988	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Klebsiella pneumonia</i> , ATCC 13883 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Klebsiella pneumonia</i> , ATCC 13883
254656	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Klebsiella pneumoniae</i> , ATCC 700603 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Klebsiella pneumoniae</i> , ATCC 700603
254631	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Listeria monocytogenes</i> , NCTC 7973 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Listeria monocytogenes</i> , NCTC 7973 (ATCC 35152)
257419	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Listeria monocytogenes</i> , NCTC 11994 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Listeria monocytogenes</i> , NCTC 11994
257420	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , NCTC 8375 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , NCTC 8375 (ATCC 19424)



257551	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , NCTC 12700 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , NCTC 12700 (ATCC 49226)
257440	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Proteus mirabilis</i> , ATCC 14153 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Proteus mirabilis</i> , ATCC 14153
254991	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Proteus vulgaris</i> , ATCC 13315 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Proteus vulgaris</i> , ATCC 13315
254623	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , ATCC 9027 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , ATCC 9027
254992	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , ATCC 27853 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , ATCC 27853
254651	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Salmonella poona</i> , NCTC 4840 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Salmonella poona</i> , NCTC 4840
254993	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Salmonella typhimurium</i> , ATCC 14028 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Salmonella typhimurium</i> , ATCC 14028
254629	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Staphylococcus aureus</i> , ATCC 6538 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Staphylococcus aureus</i> , ATCC 6538
254613	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Staphylococcus aureus</i> , ATCC 6538 P Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Staphylococcus aureus</i> , ATCC 6538 P
254647	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Staphylococcus aureus</i> , NCTC 6571 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Staphylococcus aureus</i> , NCTC 6571 (ATCC 9144)
254995	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Staphylococcus aureus</i> , ATCC 25923 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Staphylococcus aureus</i> , ATCC 25923
254996	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Staphylococcus aureus</i> , ATCC 29213 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Staphylococcus aureus</i> , ATCC 29213
257552	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA), NCTC 12493 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA), NCTC 12493
254658	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA), ATCC 43300 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA), ATCC 43300
254997	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Staphylococcus epidermidis</i> , ATCC 12228 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Staphylococcus epidermidis</i> , ATCC 12228





257444	10 дисков	BD Microtrol™ - Streptococcus agalactiae, ATCC 13813 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Streptococcus agalactiae, ATCC 13813
254603	25 дисков	BD Microtrol™ - Streptococcus pneumoniae, ATCC 6303 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Streptococcus pneumoniae, ATCC 6303
254657	10 дисков	BD Microtrol™ - Streptococcus pneumoniae, ATCC 49619 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Streptococcus pneumoniae, ATCC 49619
254604	25 дисков	BD Microtrol™ - Streptococcus pyogenes, ATCC 19615 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Streptococcus pyogenes, ATCC 19615
254643	25 дисков	BD Microtrol™ - Yersinia enterocolitica, ATCC 9610 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Yersinia enterocolitica, ATCC 9610

Система идентификации микроорганизмов BD Crystal™

Система идентификации микроорганизмов BD Crystal™ – удобная и практичная замена ручным методам

Система BD Crystal™ – это система идентификации микроорганизмов, являющаяся модификацией классических микробиологических методов

Панели BD Crystal™

- Панели представляют собой закрытую систему, безопасную и простую в использовании, 30 субстратов в одной панели
- Используются различные типы субстратов - модифицированные, стандартные, флуорогенные и хромогенные субстраты
- В каждом наборе содержатся все необходимые для исследования компоненты, не требуется дополнительных реагентов и масла
- Простая процедура инокулирования




Всего 5 видов наборов позволяют идентифицировать более 500 микроорганизмов!

- набор для идентификации грамположительных микроорганизмов
- набор для идентификации энтеральных и неферментирующих микроорганизмов
- набор для идентификации анаэробных микроорганизмов
- набор для идентификации нейссерий/гемофилов
- набор для быстрой идентификации грамположительных микроорганизмов (4 часа)



Культивирование

Продолжительность культивирования в зависимости от типа панели составляет 4-24 часа. Даже анаэробную панель необходимо культивировать в обычном термостате при 35-37°C **без поддержания уровня CO₂** с уровнем влажности 40-60%.

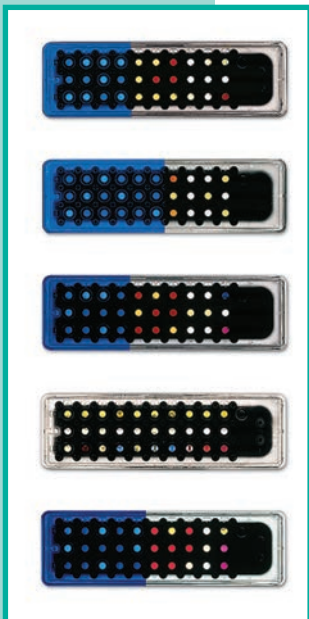

Панели BD Crystal™

245010	20 тестов	BD Crystal™ - Anaerobe ID Kit BD Кристал – Набор диагностический для идентификации анаэробов in vitro Предназначен для идентификации клинически значимых анаэробных бактерий за 4 часа. Для культивирования не требуется анаэробных условий, необходим только термостат. Для посева в панели используются изоляты, полученные на неселективном кровяном агаре, например на анаэробном кровяном агаре CDC, кровяном агаре Brucella, кровяном агаре Columbia или кровяном агаре Шедлера. Время культивирования составляет 4 часа при температуре 35-37°C. Дополнительно необходимо проведение тестов на индол и каталазу. Состав всех наборов BD Кристал: - 20 крышек панелей с нанесенными реагентами; - 20 подложек; - 20 пробирок с посевной средой; - 2 лотка для инкубации; - 1 планшет для отчетов.
245000	20 тестов	BD Crystal™ - Enteric/Nonfermenter ID Kit BD Кристал – Набор диагностический для идентификации энтеро/неферментирующих бактерий in vitro Предназначен для идентификации аэробных грамотрицательных бактерий семейства Enterobacteriaceae, а также наиболее часто выделяемых глюкозо-ферментирующих и неферментирующих грамотрицательных бактерий. Для посева в панели используются изоляты, полученные на кровяном агаре. Допускается также использование культуры со среды МакКонки. Время культивирования составляет 18-20 часов при температуре 35-37°C. Дополнительно необходимо проведение тестов на индол и оксидазу.
245140	20 тестов	BD Crystal™ - Gram-Positive ID Kit BD Кристал – Набор диагностический для идентификации грамположительных бактерий in vitro Предназначен для идентификации наиболее часто выделяемых аэробных грамположительных бактерий. Для посева в панели используются изоляты, полученные на неселективном кровяном агаре. Допускается использование изолятов с некоторых селективных кровяных агаров. Нельзя использовать культуры со сред, содержащих эскулин. Время культивирования составляет 18-24 часа при температуре 35-37°C.
245150	20 тестов	BD Crystal™ - Rapid Gram-Positive ID Kit BD Кристал – Набор диагностический для быстрой идентификации грамположительных бактерий in vitro Предназначен для быстрой идентификации наиболее часто выделяемых аэробных грамположительных бактерий. Для посева в панели используются изоляты, полученные на неселективном кровяном агаре. Допускается использование изолятов с некоторых селективных кровяных агаров. Нельзя использовать культуры со сред, содержащих эскулин. Время культивирования составляет 4 часа при температуре 35-37°C.
245130	20 тестов	BD Crystal™ - Neisseria/Haemophilus ID Kit BD Кристал – Набор диагностический для идентификации нейссерий / гемофилов in vitro Предназначен для идентификации часто выделяемых штаммов <i>Neisseria</i> и <i>Haemophilus</i>, а также некоторых других труднокультивируемых бактерий. Для посева в панели используются изоляты с широкого спектра сред. Нельзя использовать культуры со сред, содержащих эскулин. Время культивирования составляет 4 часа при температуре 35-37°C.
245038	10 пробирок	BD Crystal™ - Inoculum Fluid Посевная среда BD Кристал Дополнительная посевная среда для использования со всеми диагностическими наборами BD Crystal™ кроме BD Crystal™ - Enteric/Nonfermenter ID Kit (кат. № 245000).
245029	10 пробирок	BD Crystal™ - Enteric/Stool ID Inoculum Fluid Посевная среда BD Кристал Энтеро Дополнительная посевная среда для использования с наборами BD Crystal™ - Enteric/Nonfermenter ID Kit (кат. № 245000).

Устройства для считывания панелей BD Crystal™

245032	1	BD Crystal™ - Panel Viewer
Устройство диагностическое in vitro BD Кристал Панель Вьювер для визуального определения калориметрических показателей сравнением с эталонной панелью Используется для чтения всех панелей BD Crystal™ в ручном режиме.		
245016	1	BD Crystal™ - Color Reaction Charts
Таблицы цветовых реакций Используются для интерпретации результатов на панелях BD Crystal™ в ручном режиме.		
440910	1	BD PhoenixSpec™ - Nephelometer
Нефелометр микробиологический BD ФениксСпек Используется для приготовления бактериальной суспензии. Работает от сети или аккумуляторов. Диапазон измерений 0.5-4 единицы McFarland. Для работы необходим набор калибраторов (кат. № 440911).		
441951	1 комплект	BD PhoenixSpec™ - Calibration Standards
Комплект калибраторов для нефелометра BD ФениксСпек Содержит стандарты: 0.25, 0.5, 1, 2 и 4 единицы McFarland. Используется для калибровки нефелометра BD PhoenixSpec™ (кат. № 440910).		
245302	1	BD Crystal™ - Reference Panel
Референсная панель Используется для контроля качества анализатора BD Crystal™ AutoReader.		
245034	1	BD Crystal™ - Panel Viewer Longwave UV Tube
Ультрафиолетовая лампа BD Кристал Панель Вьювер Дополнительная лампа для устройства BD Crystal™ - Panel Viewer.		
245036	1	BD Crystal™ - Panel Viewer White Light Tube
Лампа белого света BD Кристал Панель Вьювер Дополнительная лампа для устройства BD Crystal™ - Panel Viewer.		



Дополнительные реагенты

261203	50 ампул	Catalase
Капельница с каталазой Реагент для определения каталазной активности бактерий, в капельницах.		
261187	50 ампул	DMACA Indole
Капельница с индолом DMACA Реагент для определения продукции индола, в капельницах.		
261181	50 ампул	Oxidase
Капельница с оксидазой Реагент для оксидазного теста, в капельницах.		



Автоматическая система идентификации микроорганизмов и определения антибиотикочувствительности BD Phoenix™

BD Phoenix™ – полностью автоматизированная система для идентификации клинически значимых микроорганизмов и определения их чувствительности к антибактериальным препаратам

Система **BD Phoenix™** достоверно эффективна в отношении точности идентификации более 360 видов микроорганизмов
Система **BD Phoenix™** достоверно эффективна в отношении надежности результатов чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам

Система **BD Phoenix™** – система, которая с использованием множества алгоритмов позволяет определять «отсроченную» резистентность к антибиотикам
Уникальным свойством системы **BD Phoenix™** является использование одновременно флуориметрического и колориметрического методов для идентификации микроорганизмов

Автоматизированная микробиологическая система **BD Phoenix™** содержит новейшие технологические решения для ускоренной идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антибактериальным препаратам, что позволяет оптимизировать технологический цикл, сократить сроки получения результатов, при этом достигнуть высокой точности исследования!

- 100 тестов одновременно (панели – только ID, только AST, комбинированные ID/AST)
- Инновационная система многокомпонентной детекции
- Точность идентификации грамотрицательных видов – 97%
- Точность идентификации грамположительных видов – 99%
- Точность идентификации грибов/дрожжей – более 95%
- Система **BDXpert™** для определения истинной МИК (содержит около 2000 комментариев, основанных на стандартах **CLSI, EUCAST**)
- Хранение панелей при комнатной температуре
- Простое обслуживание, экономия рабочего времени
- Система управления данными **BD EpiCenter™** в сочетании с **BD Phoenix™** позволяет формировать и анализировать обширные базы данных. Возможно также подключение к лабораторной информационной системе
- Четыре типа панелей – для грамположительных, грамотрицательных микроорганизмов, стрептококков и грибов/дрожжей.



Анализатор BD Phoenix™

448100	1	BD Phoenix™ 100 - Instrument
Анализатор микробиологический BD Феникс 100		

448040	1	BD Phoenix™ - Starter Kit
Стартовый набор BD Феникс 100		

Включает в себя:

- 5 подставок для заполнения панелей;
- 2 переносных штатива для панелей;
- 2 пипетки фиксированного объема (25 и 50 мкл);
- 960 наконечников для пипеток;
- 1 термометр;
- 4 запасных воздушных фильтра;
- 1 внешний сканер бар-кода;
- 3 кабеля;
- краткое руководство по работе с прибором.

441624	1	PX/PX AP TABLE
--------	---	----------------

Стол для анализатора BD Феникс 100

Стол усиленной конструкции для анализатора.

Дополнительные принадлежности для анализатора BD Phoenix™

448030	5 шт	BD Phoenix™ - Inoculation Station
Подставка для заполнения панелей BD Феникс		

Специальная подставка для инокуляции трех панелей, имеет уклон 24°, что позволяет клеточной суспензии заполнять панель без дополнительных действий.

448020	2 шт	BD Phoenix™ - Panel Caddy
Штатив переносной для панелей BD Феникс		

Пластиковый штатив для переноса инокулированных панелей в анализатор, вмещает 20 панелей BD Phoenix™.

448025	1	BD Phoenix™ - 25 µl Hamilton-Pipette
Пипетка Hamilton BD Феникс, 25 мкл		

Автоматическая пипетка фиксированного объема 25 мкл, используется для переноса бактериальной суспензии при работе по стандарту 0.5 McFarland.

441132	1	BD Phoenix™ - 50 µl Hamilton-Pipette
Пипетка Hamilton BD Феникс, 50 мкл		

Автоматическая пипетка фиксированного объема 50 мкл, используется для переноса бактериальной суспензии при работе по стандарту 0.25 McFarland.

448037	1632 шт	BD Phoenix™ - Pipette Tips
Наконечники BD Феникс для пипеток		

Удлиненные наконечники с аэрозольным барьером для пипеток Hamilton BD Phoenix™ (кат. № 448025 и 441132). 8 упаковок по 204 наконечника.

448028	1	BD Phoenix™ - Pipette Stand
Подставка BD Феникс для пипеток		

440910	1	BD PhoenixSpec™ - Nephelometer
Нефелометр микробиологический BD ФениксСпек		

Используется для приготовления бактериальной суспензии. Работает от сети или аккумуляторов. Диапазон измерений 0.5-4 единицы McFarland. Для работы необходим набор калибраторов (кат. № 441951).





441951	1 комплект	BD PhoenixSpec™ - Calibration Standards
--------	------------	---

Комплект калибраторов для нефелометра BD ФениксСпек

Содержит стандарты: 0.25, 0.5, 1, 2 и 4 единицы McFarland. Используется для калибровки нефелометра BD PhoenixSpec™ (кат. № 440910).

448031	200 шт	BD Phoenix™ - Panel Closure
--------	--------	-----------------------------

Крышки для панелей BD Феникс

Дополнительные крышки для панелей BD Phoenix™.

Реагенты BD Phoenix™

246001	100x4.5 мл	BD Phoenix™ - ID Broth
--------	------------	------------------------

Бульон для идентификации микроорганизмов

Используется для приготовления бактериальной суспензии для идентификации микроорганизмов на анализаторе BD Phoenix™.

246003	100x8 мл	BD Phoenix™ - AST Broth
--------	----------	-------------------------

Бульон для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

После добавления реагента-индикатора и бактериальной суспензии используется для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам на анализаторе BD Phoenix™.

246004	10x6 мл	BD Phoenix™ - AST Indicator
--------	---------	-----------------------------

Реагент-индикатор для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

Редокс-индикатор, добавляется к бульону для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 1 упаковки достаточно для проведения 1000 исследований.

246007	100x8 мл	BD Phoenix™ - AST-S Broth
--------	----------	---------------------------

Бульон для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам

После добавления реагента-индикатора и бактериальной суспензии используется для определения чувствительности стрептококков к антибактериальным препаратам на анализаторе BD Phoenix™.

246009	10x5 мл	BD Phoenix™ - AST-S Indicator
--------	---------	-------------------------------

Реагент-индикатор для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам

Редокс-индикатор, добавляется к бульону для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам. 1 упаковки достаточно для проведения 1000 исследований.



Комбинированные панели BD Phoenix™ для грамотрицательных микроорганизмов

Все панели этого типа соответствуют стандартам CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute, USA) или EUCAST (The European Committee Antimicrobial Susceptibility Testing). Эти документы содержат свод стандартов и правил по проведению исследований по определению чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам и их интерпретации.

* Расшифровка условных обозначений антимикробных препаратов приведена на стр. 78.

448103	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (NMIC/ID-76)
--------	------------	--

Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST:

AN 4 - 16, AXC 2/2 - 8/2, AM 2 - 8, ATM 1 - 16, CZ 1 - 4, CTX 0.5 - 4, CAZ 0.5 - 8, CXM 1 - 8, CN 2 - 16, CIP 0.125 - 1, CO 1 - 4, ETP 0.25 - 1, ESR yes, FF 16 - 64, GM 1 - 4, IPM 1 - 8, MEM 1 - 8, FM 16 - 64, TZP 4/4 - 16/4, NN 1 - 4, TMP 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76



448311	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (NMIC/ID-90)
Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам		
Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST:		
AN 4 - 16, AXC 2/2 - 8/2, AM 2 - 8, ATM 1 - 16, CTX 0.5 - 4, CAZ 0.5 - 8, CXM 2 - 8, CF 4-32, CIP 0.125 - 1, ETP 0.25 - 1, ESR yes, GM 1 - 4, IPM 0.5 - 8, MEC 1-8, MEM 0.25 - 8, NA 4-16, FM 16 - 64, TZP 4/4 - 16/4, TGC 0.5-4, NN 1 - 4, TMP 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76		
448771	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (UNMIC/ID-87)
Реагенты на панели для идентификации возбудителей мочевых инфекций и их чувствительности к антибиотикам		
Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST:		
AXC 2/2 - 8/2, AM 2 - 8, ATM 1 - 16, FEP 1 - 8, CFM 0.5 - 2, CTX 0.5 - 4, CAZ 0.5 - 8, CXM 2 - 8, CN 4 - 16, CIP 0.125 - 1, ETP 0.25 - 1, ESR yes, FF 16 - 64, GM 1 - 4, MEM 1 - 8, MXF 0.25 - 1, FM 16 - 64, TZP 4/4 - 16/4, NN 1 - 4, TMP 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76		
448781	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (NMIC/ID-94)
Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам		
Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов CLSI:		
AN 8 - 32, AMC 4/2 - 16/8, AM 4 - 16, ATM 2 - 16, FEP 1 - 16, FOX 4 - 16, CAZ 1 - 16, CRO 1 - 32, CXM 4 - 16, CF 4 - 16, CIP 0.5 - 2, CL 1 - 4, ETP 0.25 - 4, GM 2 - 8, IPM 1 - 8, LVX 1 - 4, MEM 1 - 8, FM 16 - 64, TZP 4/4 - 64/4, TGC 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76, CCX <9, CCZ <9, CPD <9, CAZ <9, CCR <9.		



Комбинированные панели BD Phoenix™ для грамположительных микроорганизмов

Все панели этого типа соответствуют стандартам CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute, USA) или EUCAST (The European Committee Antimicrobial Susceptibility Testing). Эти документы содержат свод стандартов и правил по проведению исследований по определению чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам и их интерпретации.

* Расшифровка условных обозначений антимикробных препаратов приведена на стр. 78.

448761	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Positive Combo Panel (PMIC/ID-69)
Реагенты на панели для идентификации грамположительных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам		
Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов CLSI:		
AMC 1/0.5 - 4/2, AM 2 - 8, NCF, CTX 8 - 32, FOX 2 - 8, CIP 0.5 - 2, CC 0.5 - 2, DAP 1 - 4, ECC, E 0.25 - 4, FA 1 - 8, GM 2 - 8, GMS 500, IPM 2 - 8, LZD 1 - 4, MXF 0.5 - 2, MUH 256, FM 16 - 64, OX 0.25 - 2, P 0.0625 - 0.25, RA 0.5 - 2, TEC 1 - 16, TE 0.5 - 8, SXT 1/19 - 4/76, VA 0.5 - 16.		
448769	25 панелей	BD Phoenix™ - GramPositive Combo Panel (PMIC/ID-71)
Реагенты на панели для идентификации грамположительных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам		
Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST:		
AM 2 - 8, FOX 2 - 8, CIP 0.5 - 2, CC 0.25 - 1, DAP 0.25 - 4, E 0.25 - 2, FF 16 - 64, FA 0.5 - 8, GM 1 - 4, GMS 500, IPM 2 - 8, ECC yes, LZD 0.5 - 4, MXF 0.25 - 1, MUH 256, FM 16 - 64, OX 0.25 - 2, P 0.0625 - 0.25, RA 0.25 - 1, TEC 0.5 - 8, TE 0.5 - 2, NN 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76, VA 0.5 - 8		
448775	25 панелей	BD Phoenix™ - GramPositive Combo Panel (PMIC/ID-72)
Реагенты на панели для идентификации грамположительных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам		
Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST:		
AN 4 - 16, AM 2 - 8, FOX 2 - 8, CIP 0.125 - 2, CC 0.25 - 1, DAP 0.5 - 4, E 0.25 - 2, FF 16 - 64, FA 1 - 8, GM 1 - 4, GMS 500, ECC yes, LZD 0.5 - 4, MXF 0.125 - 1, MUP 1 - 4, MUH - 256, FM 16 - 64, OX 0.25 - 2, P 0.0625 - 0.25, RA 0.25 - 1, TEC 1 - 4, TE 0.5 - 2, NN 1 - 4, TMP 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76, VA 0.5 - 4		



Комбинированные панели BD Phoenix™ для стрептококков

Панель этого типа соответствует стандартам CLSI и EUCAST.

* Расшифровка условных обозначений антимикробных препаратов приведена на стр. 78.

448785	25 панелей	BD Phoenix™ - Streptococci Panel (SMIC/ID-11)
Реагенты на панели для идентификации стрептококков и их чувствительности к антибиотикам Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)*: AMX 0.25 - 4, FEP 0.5 - 2, CTX 0.5 - 2, CXM 0.25 - 2, C 2 - 8, CC 0.03125 - 0.5, DAP 0.25 - 1, E 0.0625 - 0.5, GMS 250 - 1000, LVX 0.5 - 4, LZD 0.5 - 4, MEM 0.125 - 2, MXF 0.25 - 2, P 0.03125 - 4, PR 0.25 - 2, TEC 1 - 4, TEL 0.0625 - 2, TE 0.5 - 4, SXT 0.5/9.5 - 2/38, VA 0.5 - 4.		

Панели для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

448282	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative Panel (NMIC-93)
Реагенты на панели для исследования чувствительности грамотрицательных микроорганизмов к антибиотикам Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST: AN 2-32, AXC 2/2 - 8/2, AM 2 - 8, ATM 1 - 16, FEP 1 - 8, CFM 0.5-2, FOX 4 - 32, CAZ 0.5 - 16, CRO 0.5-4, CXM 2 - 8, CF 4-32, CIP 0.125 - 1, CL 0.5 - 4, ETP 0.25 - 1, ESR yes, FF 16 - 64, GM 1 - 4, IPM 0.25 - 8, LVX 0.5 - 2, 1-8, MEM 0.25 - 8, NA 4-16, FM 16-64, NOR 0.5-2, TZP 4/4 - 64/4, TEM 4-32, TIC 4-64, TIM 4/2-64/2, TGC 0.25-2, NN 1 - 4, TMP 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76		
448770	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative Urine Panel (UNMIC-87)
Реагенты на панели для исследования чувствительности возбудителей мочевых инфекций к антибиотикам Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST: AXC 2/2 - 8/2, AM 2 - 8, ATM 1 - 16, FEP 1 - 8, CFM 0.5 - 2, CTX 0.5 - 4, CAZ 0.5 - 8, CXM 2 - 8, CN 4 - 16, CIP 0.125 - 1, ETP 0.25 - 1, ESR yes, FF 16 - 64, GM 1 - 4, MEM 1 - 8, MXF 0.25 - 1, FM 16 - 64, TZP 4/4 - 16/4, NN 1 - 4, TMP 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76		
448292	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Positive Panel (PMIC-79)
Реагенты на панели для исследования чувствительности грамположительных микроорганизмов к антибиотикам Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов CLSI: AM 2 - 8, CC 0.5 - 2, CIP 0.5 - 2, CZ 2 - 16, DAP 0.5 - 4, E 0.25 - 8, FA 1 - 8, FOX 2 - 8, GM 2 - 8, GMS 500, ECC yes, LVX 0.5 - 2, LZD 1 - 4, MXF 0.25 - 1, MUN 256, FM 16 - 64, OX 0.25 - 2, P 0.0625 - 8, RA 0.5 - 2, TEC 1 - 16, TE 0.5 - 8, SXT 1/19 - 4/76, VA 0.5 - 16		
448768	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Positive Panel (PMIC-71)
Реагенты на панели для исследования чувствительности грамположительных микроорганизмов к антибиотикам Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST: AM 2 - 8, FOX 2 - 8, CIP 0.5 - 2, CC 0.25 - 1, DAP 0.25 - 4, E 0.25 - 2, FF 16 - 64, FA 0.5 - 8, GM 1 - 4, GMS 500, IPM 2-8, ECC yes, LZD 0.5 - 4, MXF 0.25 - 1, MUN 256, FM 16 - 64, OX 0.25 - 2, P 0.0625 - 0.25, RA 0.25 - 1, TEC 0.5 - 8, TE 0.5 - 2, NN 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76, VA 0.5 - 8		

448762	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Positive Panel (PMIC-72)
Реагенты на панели для исследования чувствительности грамположительных микроорганизмов к антибиотикам Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST: AN 4 - 16, AM 2 - 8, FOX 2 - 8, CIP 0.125 - 2, CC 0.25 - 1, DAP 0.5 - 4, E 0.25 - 2, FF 16 - 64, FA 1 - 8, GM 1 - 4, GMS 500, ECC yes, LZD 0.5 - 4, MXF 0.125 - 1, MUP 1 - 4, MUH 256, FM 16 - 64, OX 0.25 - 2, P 0.0625 - 0.25, RA 0.25 - 1, TEC 1 - 4, TE 0.5 - 2, NN 1 - 4, TMP 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76, VA 0.5 - 4		

448284	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Positive Panel (PMIC-75)
Реагенты на панели для исследования чувствительности грамположительных микроорганизмов к антибиотикам Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST: AM 0.06-32, FOX 2 - 8, CIP 1-16, CC 0.25 - 2, DAP 0.25 - 4, E 0.25 - 4, FF 16 - 64, FA 0.5 - 8, GM 1 - 4, GMS 500, IPM 1-8, ECC yes, K 4-16, KS 250, LVX 0.25-4, LZD 0.5 - 4, MOX 2-16, MXF 0.25 - 2, MUP 0.5-8, MUH 256, FM 16 - 64, OX 0.25 - 2, P 0.0625 - 0.25, PR 0.25-2, SYN 0.5-4, RA 0.25 - 16, TEC 0.5 - 8, TE 0.5 - 2, NN 1 - 4, TMP 0.5 - 4, SXT 0.5/9.5 - 4/76, VA 0.5 - 8		

Панели BD Phoenix™ для идентификации микроорганизмов

448007	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative ID Panels (NID)
Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов Позволяет идентифицировать более 160 видов грамотрицательных микроорганизмов. Проведения дополнительных тестов не требуется.		

448008	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Positive ID Panels (PID)
Реагенты на панели для идентификации грамположительных микроорганизмов Позволяет идентифицировать более 145 видов грамположительных микроорганизмов. Проведения дополнительных тестов не требуется.		

448316	25 панелей	BD Phoenix™ - Yeast ID Panels
Реагенты на панели для идентификации дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов Позволяет идентифицировать 64 вида грибов и дрожжей. Проведения дополнительных тестов не требуется.		

Дополнительные принадлежности для анализатора BD Phoenix™

448984	1	Thermometer Panel
Термометр		
100-1162-01	1 комплект	Filter Air Light Bay
Воздушный фильтр		
100-1181-01	1 комплект	Filter Air Electronics Bay
Воздушный фильтр блока электроники		
441195	1 комплект	Phoenix PM Kit
Феникс набор профилактического обслуживания		
447157	1	Normalizer Panel
Панель нормализера		
447111	1 комплект	Label Panel Carrier
Наклейки для ячеек		



***Расшифровка условных обозначений антимикробных препаратов:**

AM	Ампициллин	ESR	β-лактамазы расши-	OX	Оксациллин
AMC	Амоксициллин / Клавулановая кислота (AMC)		ренного спекта (ESBL)	P	Пенициллин
AMX	Амоксициллин	ETP	Эртапенем	PIP	Пиперациллин
AN	Амикацин	FA	Фузидиевая кислота	PR	Пристинамицин
ATM	Азтреонам	FEP	Цефепим	RA	Рифампин
AXC	Амоксициллин / Клавулановая кислота (AXC)	FF	Фосфомицин	SAM	Ампициллин / Сульбактам
C	Хлорамфеникол	FM	Нитрофурантоин	SCP	Цефоперазон / Сульбактам
CAZ	Цефтазидим	FOX	Цефокситин	STG	Триметоприм / Сульфаметоксазол (STG)
CC	Клиндамицин	GM	Гентамицин		
CF	Цефалотин	GMS	Гентамицин 500	SXT	Триметоприм / Сульфаметоксазол (SXT)
CFM	Цефиксим	GRX	Грепафлоксацин	SYN	Хинупристин / Дальфопристин
CIP	Ципрофлоксацин	GTX	Гатифлоксацин	TE	Тетрациклин
CL	Колистин	IPM	Имипенем	TEC	Тейкопланин
CN	Цефалексин	K	Канамицин	TEL	Телитромицин
CO	Колистин	KS	Канамицин 250	TEM	Темоциллин
CRO	Цефтриаксон	LVX	Левифлоксацин	TGC	Тигециклин
CTX	Цефотаксим	LZD	Линезолид	TIC	Тикарциллин
CXM	Цефуроксим	MEC	Мециллинам	TIM	Тикарциллин / Клавулановая кислота
CZ	Цефазолин	MEM	Меропенем	TMP	Триметоприм
DAP	Далтомицин	MOX	Моксалактам	TZP	Пиперациллин /
E	Эритромицин	MUH	Мупироцин HL		Тазобактам
ECC	Индукцибельная устойчивость к макро- лидам	MUP	Мупироцин	VA	Ванкомицин
		MXF	Моксифлоксацин		
		NA	Налидиксовая кислота		
		NET	Нетилмицин		
		NN	Тобрамицин		
		NOR	Норфлоксацин		

Системы диагностики туберкулеза BD BACTEC™ MGIT™

Компания BD предлагает весь перечень продукции для диагностики туберкулеза культуральным методом, идентификации микобактерий и определения чувствительности микобактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда

Использование автоматических анализаторов BD BACTEC™ MGIT™ 960 и BD BACTEC™ MGIT™ 320 позволяет сократить длительность протокола исследования в 3 раза

BD BACTEC™ MGIT™ 320 System

- Для небольших лабораторий (2600 тестов в год)



BD BACTEC™ MGIT™ 960 System

- Для высокопроизводительных лабораторий (8000 тестов в год)
- Технология BD BACTEC™ MGIT™ – это:**
- Полный алгоритм бактериологического обследования на туберкулез:
 - посев
 - первичная иммунохроматографическая идентификация *Mycobacterium tuberculosis complex*
 - определение лекарственной чувствительности к препаратам первого ряда, включая пиразинамид
 - определение лекарственной чувствительности к препаратам второго ряда
 - Стандартизация и автоматизация всех этапов исследования
 - Инструкции на русском языке
 - Подключение к эпидемиологической базе обработки данных BD EpiCenter™ и TB-eXiST
 - Автоматическая интерпретация результатов



BD MGIT™ TBc ID Test

Идентификационный тест BD MGIT™ TBc ID представляет собой экспресс-метод иммунохроматографического анализа для качественного определения антигена комплекса *Mycobacterium tuberculosis* (MTbc) в пробирках BD BACTEC™ MGIT™ с положительным результатом окрашивания кислотоустойчивых штаммов

БЫСТРО: результат через 15 минут

ПРОСТО: перенести 100 мкл из положительной пробирки с жидкой средой BD BACTEC™ MGIT™ в лунку для образца

ДЕШЕВО: экономически более выгоден, чем молекулярные тесты

УНИВЕРСАЛЬНО: нет необходимости в дополнительном оборудовании

ТОЧНО: клинические исследования продемонстрировали совпадение результатов в сравнении с молекулярными тестами в 100% случаев



Тест BD MGIT™ TBc ID основан на методе иммунохроматографии с определением MPT64 антигена (фракции белка микобактерий, выделяемой из клеток MTbc в процессе культивирования)



Анализаторы BD BACTEC™ MGIT™

445870	1	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Mycobacterial Detection Instrument
Анализатор бактериологический Bactec MGIT 960 с принадлежностями		
Автоматический анализатор для быстрого определения микобактерий в клинических образцах (кроме крови) на жидких питательных средах и постановки теста на чувствительность к противотуберкулезным препаратам. Максимальная вместительность 960 пробирок или 8000 анализов/год при длительности протокола 42 дня.		
441743	1	BD BACTEC™ MGIT™ 320 - Mycobacterial Detection Instrument
Анализатор бактериологический BD Bactec MGIT 320 с принадлежностями		
Автоматический анализатор для быстрого определения микобактерий в клинических образцах (кроме крови) на жидких питательных средах и постановки теста на чувствительность к противотуберкулезным препаратам. Максимальная вместительность 320 пробирок или 2700 анализов/год при длительности протокола 42 дня. Для правильной и надежной установки анализатора необходим комплект стойки и крепления (кат. № 441680 и 441679).		
441680	1	BD BACTEC™ MGIT™ 320 - Stand
Стойка опциональная для прибора		
441679	1	BD BACTEC™ MGIT™ 320 - Anchor Kit
Приспособление для крепления прибора BD MGIT 320 Anchor Kit		
445872	1	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Temperature Control Tube
Пробирка контроля температуры		
Для каждого ящика анализатора BD BACTEC™ MGIT™ необходима 1 пробирка.		
445941	1 комплект	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - AST Starter Kit
Набор для запуска AST Starter Kit		
Набор для запуска анализаторов BD BACTEC™ MGIT™ 960 или BD BACTEC™ MGIT™ 320. Включает в себя руководство пользователя, переносные штативы для пробирок BD BACTEC™ MGIT™ 2 шт, держатели пробирок для постановки тестов на чувствительность микобактерий к антибиотикам (по 16 держателей для двух и пяти пробирок, по 3 держателя для трех, четырех и восьми пробирок).		

Среды и реагенты BD BACTEC™ MGIT™

245122	100 пробирок	BBL MGIT™ Mycobacteria Growth Indicator Tubes
Среда питательная жидкая Миддлбрук с флуоресцентным компонентом в пробирках		
Используется для культивирования микобактерий и постановки тестов на чувствительность к противотуберкулезным препаратам в автоматических анализаторах BD BACTEC™ MGIT™.		
245124	100 тестов	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Supplement Kit
Обогащающая ростовая добавка		
Содержит обогатительную ростовую добавку (BD BACTEC™ MGIT™ 960/320 Growth Supplement) и лиофилизированный препарат смеси антибиотиков (BBL™ MGIT™ PANTA™ Antibiotic Mixture) для улучшения роста микобактерий и подавления роста бактериальной флоры.		
240862	10x75 мл	BBL Mycoprep Kit
240863	10x150 мл	Реагент для пробоподготовки и деkontаминации мокроты
Набор для разжижения и деkontаминации образцов. Флакон с раствором NaOH-цитрат содержит ампулу с NALC. Набор также содержит сухую смесь реагентов для приготовления фосфатного буфера.		



Идентификация M. tuberculosis complex

245159	25 тестов	BD MGIT™ TBc ID Test Device
--------	-----------	-----------------------------

Идентификационный тест «BD MGIT TBc» для диагностики туберкулеза

Иммунохроматографический тест для быстрой идентификации Mycobacterium tuberculosis complex из положительных пробирок с анализаторов BD BACTEC™ MGIT™. Результат готов через 15 минут!



Определение лекарственной чувствительности на анализаторах BD BACTEC™ MGIT™

245123	40 тестов	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - SIRE Kit
--------	-----------	---------------------------------

Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий

Набор реагентов для постановки теста на чувствительность к 1-му ряду антибиотиков.

SIRE = стрептомицин 1,0 мкг/мл, изониазид 0,1 мкг/мл, рифампицин 1,0 мкг/мл, этамбутол 5,0 мкг/мл.



245128	50 тестов	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - PZA Kit
--------	-----------	--------------------------------

Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий

Набор реагентов для постановки теста на чувствительность к пиразинамиду 100 мкг/мл. Необходимо использовать совместно с питательной средой (кат. № 245115).



245115	25 пробирок	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - PZA Medium
--------	-------------	-----------------------------------

Реагенты для определения роста и чувствительности микобактерий

245116	150 тестов	Middlebrook OADC Enrichment
--------	------------	-----------------------------

Обогащающая ростовая добавка ОАДС для среды Миддлбрук

Обогатительная ростовая добавка для постановки теста на чувствительность ко 2-му ряду противотуберкулезных препаратов.

Дополнительные принадлежности BD BACTEC™ MGIT™

445871	17 пробирок	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Calibrators Kit
--------	-------------	--

445999	51 пробирка	Набор калибраторов для анализаторов BD BACTEC™ MGIT™
--------	-------------	--

445946	3 держателя	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 2-tube AST Carrier Set
--------	-------------	---

Держатель для двух пробирок

445945	3 держателя	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 3-tube AST Carrier Set
--------	-------------	---

Держатель для трех пробирок

445944	3 держателя	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 4-tube AST Carrier Set
--------	-------------	---

Держатель для четырех пробирок

445943	3 держателя	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 5-tube AST Carrier Set
--------	-------------	---

Держатель для пяти пробирок

445993	3 держателя	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 8-tube AST Carrier Set
--------	-------------	---

Держатель для восьми пробирок




445942	2 штатива	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - AST Transport Rack Штатив для переноса пробирок
445874	500 шт	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 7 ml tube Spare Barcode Labels Наклейки для считывателя штрих-кода
445873	10 шт	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Plug, Bad Station Заглушки для неисправных гнезд в приборе
444374	2	FILTER AIRSET B9240 2/PK Фильтры воздушные квадратные
445888	2	AIR FILTERS RECTANGULAR (PK/2) Фильтры воздушные прямоугольные

Дополнительные реагенты и среды

212520	1 набор	TB Stain Kit ZN Реагент-краситель для окраски мазков по Циль-Нильсену Состав (каждого по 1 флакону 250 мл): - Реагент-краситель карболовый фуксин; - Реагент обесцвечивающий; - Реагент-краситель метиленовый синий.
212517	4x250 мл	TB Decolorizer Реагент обесцвечивающий Отдельный реагент из наборов для окраски мазков по Циль-Нильсену и Киньону.
212522	1 набор	TB Stain Kit K Реагент-краситель для окраски мазков по Киньону Состав (каждого по 1 флакону 250 мл): - Реагент-краситель карболовый фуксин KF; - Реагент обесцвечивающий; - Реагент-краситель бриллиантовый зеленый К.
212519	1 набор	TB Fluorescent Stain Kit M Реагент-краситель флуоресцентный для окрашивания мазков Для окраски микобактерий по методам Морзе, Блэра, Вейзера и Спрота. Состав (каждого по 1 флакону 250 мл): - Реагент-краситель аурамин М; - Реагент обесцвечивающий; - Реагент-краситель перманганат калия.
212521	1 набор	TB Fluorescent Stain Kit T Реагент-краситель флуоресцентный для окрашивания мазков Для окраски микобактерий по методам Труанта, Бретта и Томаса. Состав (каждого по 1 флакону 250 мл): - Реагент-краситель аурамин-родамин Т; - Реагент обесцвечивающий; - Реагент-краситель перманганат калия.
212536	250 мл	Acridine Orange Stain
212537	4x250 мл	Реагент-краситель акридин оранжевый для окрашивания мазков Для окрашивания мазков для флуоресцентной микроскопии.
231742	25 полосок	BD Taxo™ - Nitrite Test Strips BD Таксо нитритные тест-полоски Позволяют различить медленно растущие микобактерии (M. tuberculosis, M. kansasii и M. fortuitum, положительные на нитритный тест) от быстро растущих микобактерий (M. bovis, M. avium complex и M. intracellulare, отрицательны или слабо положительны на нитритный тест). При положительном результате полоска синее.
231741	25 полосок	BD Taxo™ - TB Niacin Test Strips BD Таксо ниациновые тест-полоски Ниациновый тест показывает присутствие в культуральной среде никотиновой кислоты, продуцируемой микобактериями. При положительном результате полоска желтеет.




231735	50 дисков	BD Taxo™ - TB Niacin Test Control
BD Таксо ниациновые контрольные диски		
Контрольный тест на ниацин. Полоска содержит никотинамид, который дает положительный результат. Используется совместно с ниациновыми тест-полосками (кат. № 231741).		
231743	25 полосок	BD Taxo™ - INH Test Strips
BD Таксо изониазидные тест-полоски		
Используются для обнаружения изониазида и его метаболитов в моче. В их присутствии полоска меняет цвет на зеленый, синий или фиолетовый. Также является модифицированным ниациновым тестом и используется для определения ниацина, продуцируемого <i>M. tuberculosis</i> . Должны храниться при температуре 2-8°C.		
231736	50 дисков	BD Taxo™ - INH Test Control
BD Таксо изониазидные контрольные диски		
Контрольный тест на изониазид. Пропитанный диск дает положительный результат. Используется совместно с изониазидными тест-полосками (кат. № 231743).		
244420	500 г	Lowenstein Medium Base
Основа для приготовления среды Левенштейн		
Среда для культивирования микобактерий. Может быть использована с глицерином для приготовления яичной среды.		
262710	500 г	Middlebrook 7H10 Agar
Агар Миддлбрук 7H10		
Для выделения, культивирования и постановки теста на чувствительность микобактерий. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой ОАДС для среды Миддлбрук (кат. № 211886, 212240, 212351) и глицерином.		
212203	500 г	Middlebrook 7H11 Agar Base
Основа для приготовления среды Миддлбрук в модификации 7H11		
Для выделения и культивирования микобактерий, особенно <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , из клинических и неклинических образцов. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой ОАДС для среды Миддлбрук (кат. № 211886, 212240, 212351) и глицерином.		
271310	500 г	Middlebrook 7H9 Broth
Бульон Миддлбрук в модификации 7H9		
Для культивирования микобактерий и приготовления суспензии для постановки анализа на антибиотикочувствительность. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой Миддлбрук (кат. № 211887, 212352) и глицерином или Твином 80.		
211887	10x20 мл тип А	Middlebrook ADC Enrichment
212352	6x100 мл	Обогащающая ростовая добавка Миддлбрук
Добавляется к бульону Миддлбрук в модификации 7H9 (кат. № 271310).		
211886	10x20 мл тип А	Middlebrook OADC Enrichment
212240	6x100 мл	Обогащающая ростовая добавка ОАДС для среды Миддлбрук
212351	500 мл	Добавляется к основе для приготовления среды Миддлбрук в модификациях 7H10 (кат. № 262710) и 7H11 (кат. № 212203).
220908	10 пробирок тип А	Loewenstein-Jensen Medium
220909	100 пробирок тип А	Среда Левенштейн-Йенсен
221387	10 пробирок тип С	Пробирки со скошенной питательной средой, используются для количественного каталазного теста.
221388	100 пробирок тип С	
220501	10 пробирок тип А	Loewenstein-Jensen Medium with Glycerol and PACT
220502	100 пробирок тип А	Среда Левенштейн-Йенсен ПАКТ
Селективная готовая среда с глицерином и ПАКТ (полимиксин, амфотерицин, карбенициллин, триметоприм) используется для культивирования микобактерий, особенно <i>M. tuberculosis</i> .		

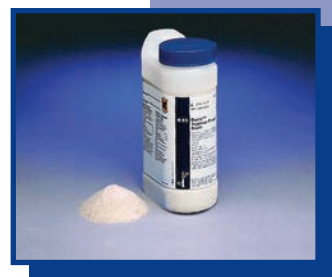

BD EpiCenter™ – программное обеспечение для управления данными клинических исследований


BD EpiCenter™
Весь мир информационных технологий
в одной базе данных

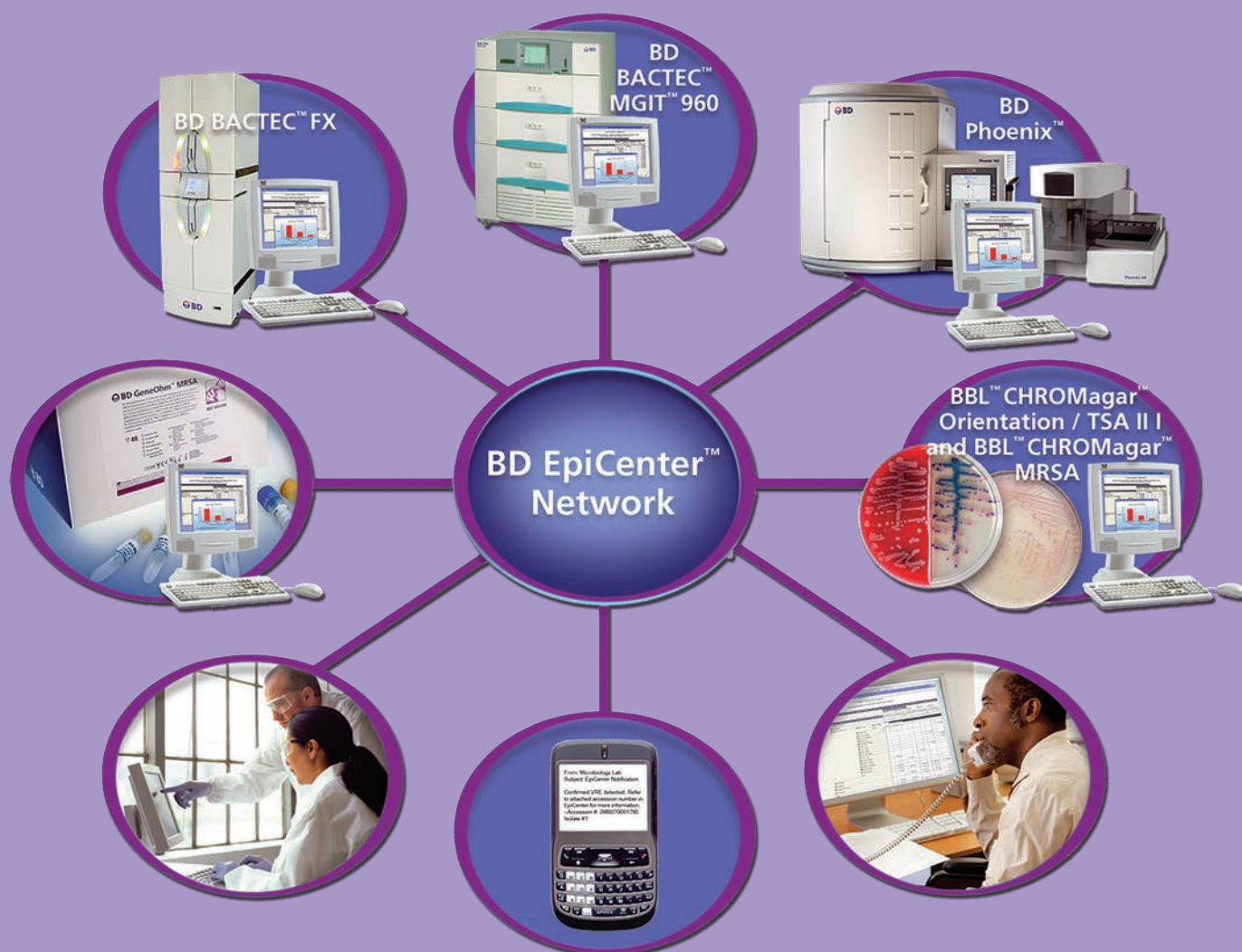

Программное обеспечение **BD EpiCenter** — это оптимальное решение для управления данными клинических исследований с учетом повседневных потребностей микробиологической лаборатории. Эта система разработана для одновременного управления данными, получаемыми в автоматическом режиме с приборов **BD BACTEC FX**, **BD BACTEC MGIT 960** и **BD BACTEC MGIT 320**, **BD Phoenix 100**, а также для обработки результатов **рутинных исследований**, проводимых в лаборатории



BD EpiCenter™ позволяет:

- Консолидировать и обрабатывать все результаты анализов микробиологической лаборатории, в том числе полученные ручными методами
- Получать информацию о результатах анализов с других приборов посредством подключения к Лабораторной Информационной Системе (ЛИС) и передавать в ЛИС данные с приборов BD
- Автоматически загружать демографические данные пациентов при использовании ЛИС
- Минимизировать ошибки при вводе данных при использовании системы сканирования штрих-кодов
- Незамедлительно уведомлять персонал лаборатории и врачей о получении важных результатов исследований (звуковое оповещение, СМС, электронное письмо)
- Легко и быстро получать аналитические, статистические и эпидемиологические отчеты - более 100 предустановленных шаблонов отчетов
- Долгосрочно хранить данные и мгновенно получать доступ к текущим результатам исследований с момента регистрации пациента в базе данных

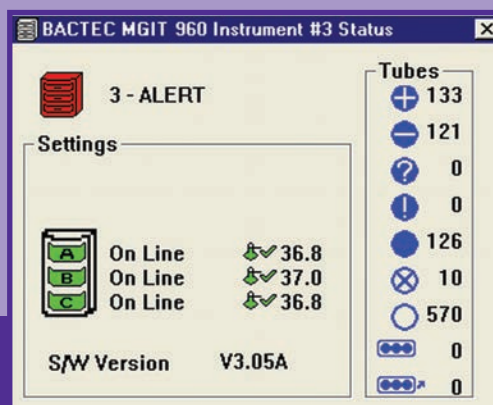


Дополнительные возможности BD EpiCenter

- Модуль **TB-eXiST** позволяет проводить постановку лекарственной чувствительности микобактерий ко 2-му ряду противотуберкулезных препаратов на анализаторах BD BACTEC™ MGIT™ 960 и BD BACTEC™ MGIT™ 320
- Модуль **BD Blood Volume Monitoring Tool** (мониторинга объема крови) для анализатора BD BACTEC™ FX позволяет в автоматическом режиме отслеживать объем крови в каждом флаконе BD BACTEC™ для повышения эффективности обнаружения микроорганизмов

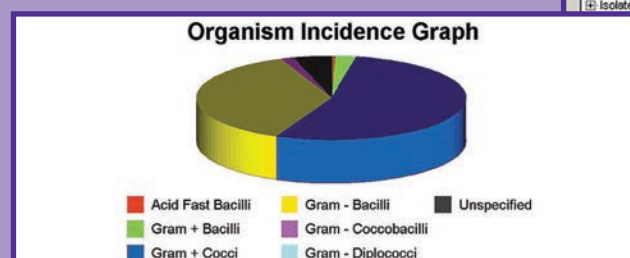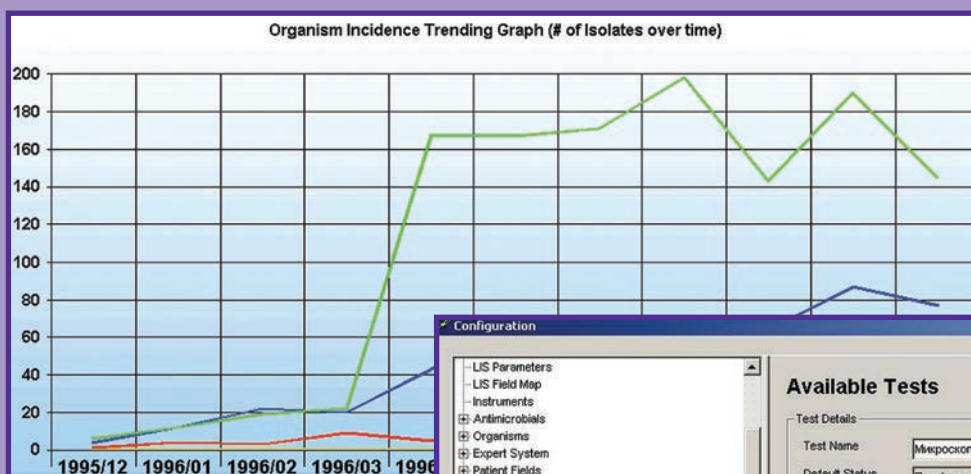

Configuration					
[-] LIS Parameters [-] LIS Field Map [-] Instruments [+] Antimicrobials [+] Organisms [+] Expert System [+] Patient Fields [+] Specimen Fields [+] Isolate Fields					
[-] Groups [-] Tests [-] Available Test [-] Growth & Detection [-] Isolates [-] Manual MGIT 4 mL Tube [-] Middlebrook 7H11 Medium [-] Микроскопия мазка по Ziehl-Neelsen [-] Микроскопия мазка с люминесцентным [-] Иосес BACTEC MGIT 960 [-] Иосес на Кроуэной агар [-] Иосес на Флен-2/Левенштейн-Йенсен [-] LIP на выявление ДНК M.tuberculosis [-] LIP на выявление ДНК Aspergillus sp [-] LIP на выявление ДНК Candida albicans [-] LIP на выявление ДНК M5T из культу					
Available Tests					
Test Details Test Name: Микроскопия мазка по Ziehl-Neelsen Abbreviation: Default Status: Под Анализом LIS Code: Test Type: Growth & Detection Reimbursement:					
Test Status	Abbreviation	LIS Code	Test State	Final Result	Conf
КУМ + посторонняя флора *					
КУМ не обнаружены *					
КУМ обнаружены + *					
КУМ обнаружены ++ *					
КУМ обнаружены +++ *					
Обнаружено: 1 КУМ в 1 *					
Обнаружено: 10 КУМ в 1 *					
Обнаружено: 2 КУМ в 10 *					

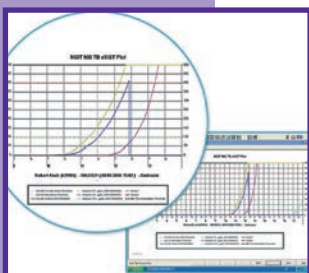

BD EpiCenter™ для анализаторов BD BACTEC™ MGIT™ 960 и BD BACTEC™ MGIT™ 320

256644	1	BD EpiCenter™ - Workstation BD EpiCenter™ рабочая станция
256645	1	BD EpiCenter™ - 17 inch Monitor BD EpiCenter™ монитор
256628	1 комплект	BD EpiCenter™ Server starter group BD EpiCenter™ начальный набор компонентов для подключения (сервер)
441007	1	BD EpiCenter™ CD Software BD EpiCenter™ программное обеспечение на CD диске
441107	1 комплект	BD EpiCenter™ - Updater Disk (PUD) BD EpiCenter™ диск для обновления программного обеспечения

BD EpiCenter™ TB-eXiST

BD EpiCenter™ TB-eXiST – это дополнительный модуль при подключении к инструментам BD BACTEC™ MGIT™ 960 и BD BACTEC™ MGIT™ 320 для постановки чувствительности к противотуберкулезным препаратам 2 ряда - автоматический мониторинг результатов, пролонгирование протокола исследований в зависимости от нужд лаборатории.

EPITBEXIST	1	BD EpiCenter™ TB-eXiST module TB-eXiST модуль для постановки антибиотиков 2 ряда Для установки требуется полный комплект BD EpiCenter™ для BD BACTEC™ MGIT™ 960 или BD BACTEC™ MGIT™ 320.
441184	1 комплект	BD EpiCenter™ Barcode Printing Module Активация модуля печати штрих-кодов
257445	1 комплект	BD EpiCenter™ Barcode Printer Kit Принтер для печати штрих-кодов
257449	1	CABLE UTP 5M UTP кабель 5м
441404	12 рулонов	LARGE BARCODE LABELS Наклейки штрих-кодов – большие Размер наклеек 2" x 0.75" / 5.08 см x 1.905 см, 1500 наклеек в рулоне.

BD EpiCenter™ для анализатора BD Phoenix™ 100


256644	1	BD EpiCenter™ - Workstation BD EpiCenter™ рабочая станция
256645	1	BD EpiCenter™ - 17 inch Monitor BD EpiCenter™ монитор
256628	1 комплект	BD EpiCenter™ - Starter Kit BD EpiCenter™ начальный набор компонентов для подключения (сервер)

Дополнительные модули BD EpiCenter™

EPITBEXIST	1	BD EpiCenter™ TB-eXiST module
------------	---	-------------------------------

ТВ-eXiST модуль для постановки антибиотиков 2 ряда

Для установки требуется полный комплект BD EpiCenter™ для BD BACTEC™ MGIT™ 960 или BD BACTEC™ MGIT™ 320.

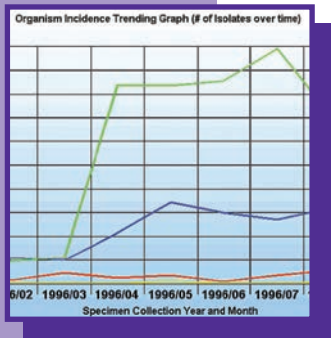

440887	1	BD EpiCenter™ PLUS - Activation Module
--------	---	--

Активация модуля BD Epicenter™ PLUS

Расширенные возможности редактирования, предустановленные фильтры для эпидемиологической и статистической обработки данных.

440980	1	BD EpiCenter™ EpiCARE™ (Clinical Application Rules Editor) - Open Expert System Module
--------	---	---

Активация модуля BD EpiCenter™ EpiCARE™

Функционал для полной модификации экспертной системы и создания собственных правил.

440981	1	BD EpiCenter™ - Multi-User Module
--------	---	-----------------------------------

Активация модуля Multi-User License

Многопользовательский режим.




441184	1	BD EpiCenter™ Barcode Printing Module
--------	---	---------------------------------------

Активация модуля печати штрих-кодов

441185	1	BD EpiCenter™ Sentinel™
--------	---	-------------------------

Активация модуля BD EpiCenter™ Sentinel™

Расширенные возможности уведомления персонала лаборатории и больницы с использованием автоматической рассылки результатов по электронной почте или с помощью рассылки СМС сообщений.

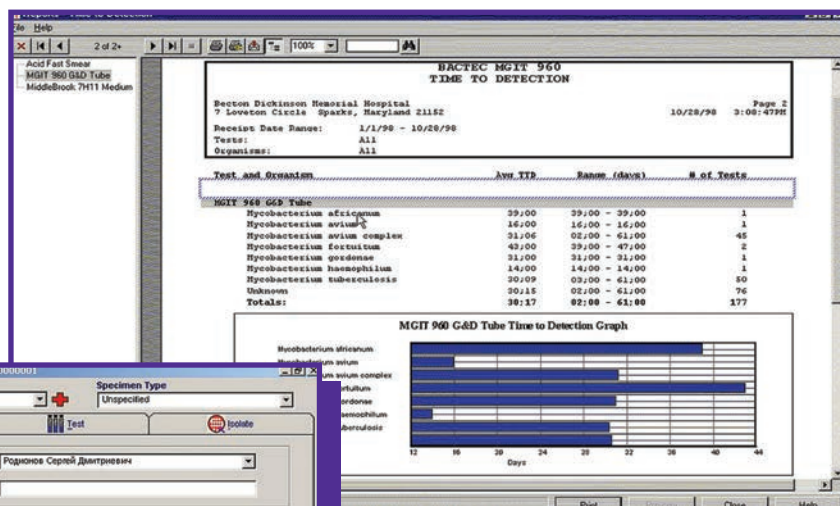

Patient Name: Specimen Registration - Patient ID: 00000001, Patient Name: Родионов Сергей Дмитриевич, Accession #: 00000001

Patient Name: Родионов Сергей Дмитриевич Accession #: 00000001 Specimen Type: Unspecified

Rapid Login Patient Specimen Test Update

Patient ID: 00000001 Patient Name: Родионов Сергей Дмитриевич

Категория пациента: Впервые выявленный № истории болезни:

Accession #: 00000001 Preliminary

Specimen Type: Unspecified Body Site: Невозможно

Hospital Service: Невозможно Client ID: Невозможно

Collection Date/Time: 15.04.2010 06:04:11 Цель Эксперимента: Невозможно

Receipt Date/Time: 15.04.2010 06:04:11 Код Эксперимента:

Available Tests

- Специальное исследование
 - Микроскопия мазка по Ziehl-Neelsen
 - Микроскопия мазка с люминесцентной окраской
 - Посев BACTEC MGIT 960
 - Посев на Кровяной агар
 - Посев на Фен-Зилленсмайтер-Иенсен
 - Посев на Фен-Зилленсмайтер-Иенсен
 - Посев на Кровяной агар
 - Микроскопия мазка с люминесцентной окраской
 - Микроскопия мазка по Ziehl-Neelsen
- ИД
- AST

Options Show All Tests

Ordered Tests

Test Name	Test Start Off *	Isol	Sequence #	Test Status-Result
Микроскопия мазка по Ziehl-Neelsen	04.03.2010 13:04:20	1	4399500026829	Completed Removed
Посев BACTEC MGIT 960	01.03.2010 17:42:20		430146610055	Pending
МОИТ 960 дерматит на 2 пробы	10.03.2010 17:40:42	1	43992200017320	Completed Removed
Посев на Фен-Зилленсмайтер-Иенсен	15.04.2010 06:13:55			Под Аналитиком
Посев на Фен-Зилленсмайтер-Иенсен	15.04.2010 06:13:57			Пророст есть
Посев на Кровяной агар	15.04.2010 06:14:00			Обнаружено : 5 КМ в 100 н-о
Микроскопия мазка с люминесцентной окраской	15.04.2010 06:14:03			Обнаружено: 4 КМ в 100 н-о

Date View Save Recall Clear Close Help

BD Kiestra™

Автоматизация микробиологической лаборатории



Kiestra™ представила концепцию полной автоматизации клинической микробиологической лаборатории в 2006 году. С тех пор множество лабораторий внедрили у себя модульные масштабируемые решения по автоматизации от Kiestra™ с открытой архитектурой.

Затем BD и Kiestra объединились чтобы стать первым и наиболее опытным поставщиком решений по автоматизации микробиологических лабораторий и выстраиванию процесса обработки образцов для повышения эффективности, организации рационального непрерывного рабочего процесса и обеспечения воспроизводимых результатов высочайшего качества в самые короткие сроки.

Каждая лаборатория BD Kiestra™ создается индивидуально, является модульной и расширяемой, проектируется под потребности Вашей лаборатории – принимая во внимание размеры помещения, количество поступающих образцов, особенности рабочего процесса и планы на дальнейшее развитие лаборатории.

Посевная станция BD Kiestra™ InoqulA™



447202

1

BD Kiestra™ InoqulA™

Посевная станция BD Kiestra™ InoqulA™

Посевная станция BD Kiestra™ InoqulA™ представляет принципиально новый стандарт посева. Это высокопроизводительное решение для автоматизации работы как с жидкими, так и с твердыми микробиологическими образцами, посев осуществляется магнитным шариком, который обеспечивает получение большого количества изолированных колоний.

Технология посева магнитным шариком. Уникальная инновационная технология позволяет получить в 3-5 раз больше изолированных колоний по сравнению с ручным посевом.

Магнитный шарик покрывает самую большую площадь агара в сравнении с другими автоматическими и ручными методами посева. Данная технология признана самым эффективным методом посева.

- Работа с любыми типами образцов и контейнерами
- Работа с тупферами, уротампонами и любыми другими твердыми образцами позволяет максимально снизить издержки.
- Стандартные рисунки посева обеспечивает высокое качество обработки образцов всех типов.
- Высокая производительность - 250 - 400 посевов/час
- Благодаря высокой пропускной способности автоматического и полуавтоматического модулей, станция справляется с ежедневными пиками при поступлении образцов в лабораторию.
- Чаще всего для работы лаборатории достаточно одной станции, что позволяет сократить время окупаемости и более эффективно использовать пространство.
- Посевная станция BD InoqulA™ снижает трудозатраты и позволяет сотрудникам лаборатории сконцентрироваться на более важных задачах.
- Универсальность посева
- Одновременно на станцию загружается до 12 типов различных сред на чашках.
- Автоматически производит посев на чашки (стандартные, двухсекционные) и в пробирки, а также приготовление мазков.
- Оптимизирует рабочий процесс, повышая его эффективность, а также сокращая время, требуемое для получения результатов исследований.

447214

1

BD Kiestra™ InoqulA Slide Prep Module

Модуль для приготовления мазков BD Kiestra™ InoqulA™

Модуль производит автоматическое нанесение биоматериала на предметное стекло.


447290

1

BD Kiestra™ Ensura Cabinet InoqulA

Набор запасных частей BD Kiestra™ InoqulA™ Ensura

Набор запасных частей для посевной станции BD Kiestra™ InoqulA™

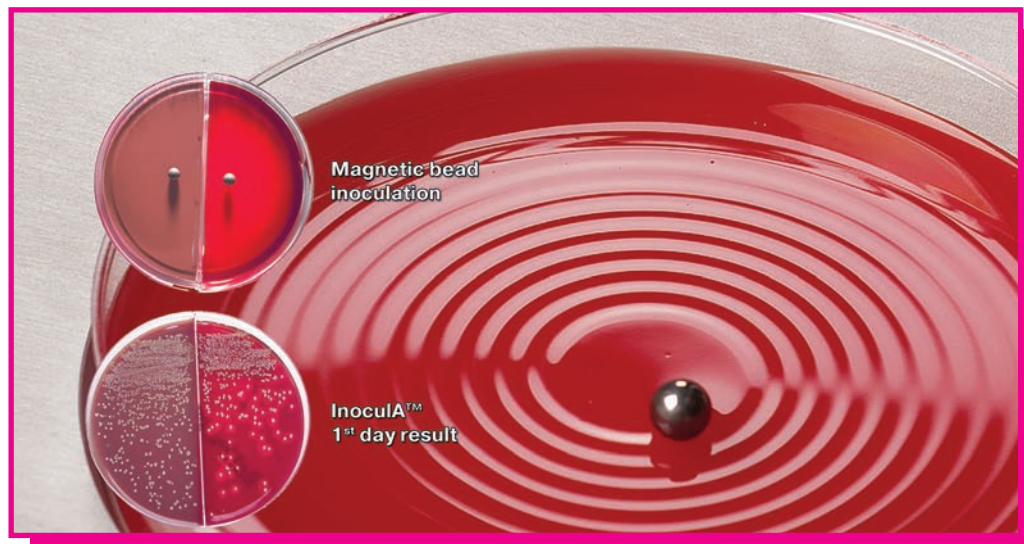

Автоматизированная бактериологическая рабочая станция BD Kiestra™ WCA

447204	1	BD Kiestra™ Inoqula WCA (Work Cell Automation) Автоматизированная бактериологическая рабочая станция BD Kiestra™ WCA BD Kiestra™ WCA представляет собой компактное модульное решение для лабораторий с различными потоками, позволяющее автоматизировать обработку образцов и посев, инкубацию чашек и получение цифровых изображений результатов посева. Посев Новые стандарты обработки образцов в модуле BD Kiestra™ Inoqula™ автоматизируют работу как с жидкими, так и с твердыми бактериологическими образцами и позволяют стандартизировать процедуру посева, повысить его качество, и значительно ускорить рабочий процесс. Инкубация «Умная» инкубация стала возможной со вторым поколением инкубаторов BD Kiestra™. «Умные» инкубаторы BD Kiestra™ ReadA Compact с системой цифрового учета результатов сочетают в себе превосходные атмосферные условия с автоматической цифровой визуализацией результатов роста в динамике и индивидуальное хранение чашек при малой площади, занимаемой инкубатором. В системе ReadA Compact используется камера высокого разрешения и три различных источника света LED, обеспечивающие оптимальное изображение для всех образцов и типов среды. В зависимости от ваших потребностей система WCA может включать до трех инкубаторов ReadA Compact. Цифровой учет результатов Удобное в работе программное обеспечение ReadA позволяет одновременно вывести на монитор изображения всех чашек, относящихся к одному образцу, для контроля динамики роста. Пользователь может выбрать обзор по образцу или по пациенту. Концепция телебактериологии Телебактериология делает возможной работу в любое удобное время и из любой точки мира. Благодаря интернету временные и территориальные границы исчезают. Возможность удаленной работы делает систему более гибкой и позволяет организовать оптимальный рабочий процесс с быстрым получением результатов лабораторных исследований.
447214	1	BD Kiestra™ Inoqula Slide Prep Module Модуль для подготовки мазков BD Kiestra™ Inoqula™ Модуль производит автоматическое нанесение биоматериала на предметное стекло.
447293	1	BD Kiestra™ ProceedA WCA Соединительный модуль BD Kiestra™ WCA Конвейер для чашек и соединительный модуль для WCA
447206	1	BD Kiestra™ ReadA Compact Автоматизированный инкубатор BD Kiestra™ ReadA Compact Умные инкубаторы с системой цифрового учета результатов могут быть стандартные и CO2 инкубаторы. В зависимости от ваших потребностей WCA позволяет подключать до трех инкубаторов.
447297	1	BD Kiestra™ Digital Reading Workstation Система цифрового учета результатов BD Kiestra™ Включает в себя 2 широкоформатных монитора с высоким разрешением экрана, ПК с источником бесперебойного питания, клавиатуру, мышь, ручной сканер штрих-кодов и программное обеспечение ReadA Browser
447305	1	BD Kiestra™ ReadA Browser Software License Программное обеспечение BD Kiestra™ ReadA Browser Дополнительное программное обеспечение для цифрового учета результатов



447298	1	BD Kiestra™ ErgonomicA 165
447299		Эргономичный рабочий стол 165 см BD Kiestra™ Регулируемое и настраиваемое по высоте рабочее место - 165 см ширина (правосторонний и левосторонний вариант)
447300	1	BD Kiestra™ ErgonomicA 200
447301		Эргономичный рабочий стол 200 см BD Kiestra™ Регулируемое и настраиваемое по высоте рабочее место - 200 см ширина (правосторонний и левосторонний вариант)
447302	1	BD Kiestra™ ErgonomicA 220
447303		Эргономичный рабочий стол 220 см BD Kiestra™ Регулируемое и настраиваемое по высоте рабочее место - 220 см ширина (правосторонний и левосторонний вариант)
447307	1	BD Kiestra™ Workflow Dashboard License
		Лицензия приборной панели BD Kiestra™
447306	1	BD Kiestra™ Vision Toolbox License
		Лицензия инструмента визуализации BD Kiestra™
447291	1	Ensura Cabinet WCA
		Набор запасных частей BD Kiestra™ WCA Набор запасных частей для станции BD Kiestra™ WCA

Полностью автоматизированная микробиологическая лаборатория BD Kiestra™ TLA



Enquire	1	The BD Kiestra™ TLA (Total Lab Automation)
		Полностью автоматизированная микробиологическая лаборатория BD Kiestra™ TLA Полностью автоматизированная микробиологическая лаборатория BD Kiestra™ TLA представляет собой уникальный гибкий и настраиваемый проект, создаваемый с учетом потребностей каждой отдельно взятой лаборатории. Многие лаборатории внедрили BD Kiestra™ TLA, поскольку в сравнении с другими решениями для автоматизации микробиологических лабораторий, BD Kiestra™ предлагает самую высокую производительность, гибкость и наиболее полную интеграцию процессов. Лаборатория BD Kiestra™ TLA оптимизирует рабочий процесс и позволяет встраивать в автоматическую линию систему для идентификации микроорганизмов BD Bruker™ MALDI Biotyper™, а также автоматический анализатор для идентификации и определения чувствительности к антибактериальным препаратам BD Phoenix™.

BD Kiestra™ расходные материалы

447265	1	Label BarcodA 40x100mm
		Наклейки штрих-кодов BarcodA 40x100 мм Лента для печати штрих-кодов на принтере для маркировки чашек
447266	1	Ribbon BarcodA 90mm
		Лента BarcodA 90 мм Лента для принтера штрих-кодов для маркировки чашек
447267	1	Cleaning Cloth BarcodA
		Чистящая салфетка для принтера штрих-кодов BarcodA
447268	1	Label ErgonomicA 40x100mm
		Наклейки штрих-кодов 40x100 мм ErgonomicA Лента для печати штрих-кодов на принтере ErgonomicA

447269	1	Ribbon ErgonomicA for 40x100mm Label Лента для этикеток 40x100 мм ErgonomicA Лента для принтера штрих-кодов ErgonomicA
447270	1	Label InoquaA 22.86x22.86mm Наклейки штрих-кодов 22.86x22.86 мм Наклейки штрих-кодов 22.86x22.86 мм для принтера штрих-кодов ErgonomicA в посевной станции InoquaA™
447271	1	Ribbon InoquaA for 22.86x22.86mm Label Лента для штрих-кодов 22.86x22.86 мм Лента для принтера, встроенного в рабочую станцию InoquaA™
447272	1	InoquaA Magnetic Beads Магнитные шарики InoquaA™
447273	1	InoquaA Magnetic Bead Waste Container Контейнер для сброса магнитных шариков
447274	1	InoquaA Pipet tip 1000 ul Наконечники для пипеток в посевной станции InoquaA™ 1000 мкл
447250	1	Bead Dispenser Диспенсер магнитных шариков
447262	1	Pipet Rack Holder Штатив для пипеток
447263	1	ReadA Compact Plate Storage Cart Штатив для хранения чашек с питательными средами

Алфавитный указатель

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Автоматизированная бактериологическая рабочая станция BD Kiestra™ WCA	91	Агар для бордетелл с углем и с 7% добавлением крови лошади и бацитрацина	33
Автоматизированный инкубатор BD Kiestra™ ReadA Compact	91	Агар для бруцелл	12
Агар МакКонки II	23	Агар для выделения актиномицетов	11
Агар «Микозел»	13	Агар для выделения псевдомонас	38
Агар «Микофил» с низким pH	13	Агар для выделения стрептококков группы В	36
Агар «Псевдозель»	38	Агар для выделения сульфит-редуцирующих клостридий	15
Агар «Фитон» дрожжевой	14	Агар для кампилобактерий с добавлением 5-и антими- кробных препаратов и 10% крови барана	34
Агар «Энтерококкосел»	24	Агар для кампилобактерий Скирроу	34
Агар BCYE	33	Агар для легионелл BCYE без антибиотиков	36
Агар BIGGY	13	Агар для легионелл BCYE с L – цистеином и антибиотиками	37
Агар CLED	24,34	Агар для микоплазм ППЛО	18
Агар CLED (Бевис)	34	Агар для скрининга энтерококков	36
Агар DCLS	19	Агар для тестирования гемофилов	36
Агар GCII с «ИзоВиталексом»	36	Агар для чашечного подсчета	26
Агар GC-Lec	36	Агар желчный с эскулином	21,24
Агар LBS	16	Агар Изо-Рез	36
Агар MYP	37	Агар картофельный декстрозный	14
Агар OFPBL	37	Агар класса А	28
Агар R2A	38	Агар Клиглера с железом	22
Агар TCBS	13	Агар Клостридиум диффициле с 7% добавлением крови барана	34
Агар TSN	15	Агар колумбийский II	10
Агар XLD	40	Агар лактозный Дригальского	35
Агар YPD	15	Агар ЛБ Леннокса	27
Агар Аеромонас Йерсиния	33	Агар ЛБ Миллера	27
Агар анаэробный CDC с 5% добавлением крови барана	34	Агар Левина EMB	22
Агар ацетатный дифференциальный	19	Агар Летина	24
Агар бактериоидный с желчью с добавлением амикацина	33	Агар Летина модифицированный	25
Агар бифидобактерийный модифицированный	33	Агар МакКонки	22,37
Агар Борде Джингу с 15% добавлением крови барана	33	Агар МакКонки II	35,39
Агар бриллиантовый зеленый	19	Агар МакКонки II с MUG	39
Агар бриллиантовый зеленый модифицированный	33,40	Агар МакКонки без добавления кристаллического фиоле- тового	17,24
Агар бромкрезоловый фиолетовый с лактозой	33	Агар МакКонки бессолевой	22
Агар Бруцелла с 5% добавлением крови барана с гемином и витамином K1	33	Агар МакКонки с сорбитолом	23
Агар Бэрда Паркера	33	Агар Мартина Льюиса модифицированный	37
Агар Ванкомицин-скрининг	39	Агар Миддлбрук 7H10	18,83
Агар Вилкинса-Чалгрена	27	Агар Миддлбрук и Кох 7H10	18
Агар Вилкинса-Чалгрена с амикацином и 7% добавлением крови барана	39	Агар микологический	13
Агар Геликобактер	36	Агар Микоплейт MS	37
Агар гранулированный	28	Агар Митис Саливариус	21
Агар грибковый Киммиг	36	Агар модифицированный DCLS	35
Агар дезоксихолатный	22	Агар модифицированный EMB	35
Агар дезоксихолатный с ксилозой и лизином (XLD)	20	Агар морской 2216	25
Агар Дерматофит	35	Агар MPC для лактобацилл	16
Агар для анаэробов	11	Агар Мюллер Хинтон II	26
Агар для бактериологии технический	28	Агар Мюллер Хинтон с 5% добавлением крови барана	37
		Агар Мюллер Хинтон шоколадный с «ИзоВиталекс»	37

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Агар на дрожжевой муке	15	Агар Шедлера с 5% добавлением крови барана, канамицина и ванкомицина	38
Агар на томатном соке	16		
Агар на чашке для идентификации гемофилов	36	Агар Шедлера с витамином К1 и 5% добавлением крови барана	38
Агар на экстракте солода	13	Агар шоколадный с «ИзоВиталекс» и бацитроцином	34
Агар нейтрализующий Дей/Энгли	24	Агароза для микробиологии	28
Агар Оксациллин-скрининг	37	Адонитол для микробиологии	27
Агар очищенный	28	Азитромицин	57
Агар П для псевдомонад	19	Азлоциллин	57
Агар ПАЛКАМ для листерий	37	Азтреонам	57
Агар пивной универсальный	16	Активация модуля BD EpiCenter™ EpiCARE™	88
Агар питательный	10	Активация модуля BD Epicenter™ PLUS	88
Агар Рогоза SL	16	Активация модуля BD EpiCenter™ Sentinel™	88
Агар с лизином и железом	22	Активация модуля Multi-User	88
Агар с раствором Чапека	13	Активация модуля печати штрих-кодов	86, 88
Агар с сердечной вытяжкой с 5% добавлением крови барана	36	Амдиноциллин	57
Агар с сердечно-мозговой вытяжкой	10	Амикацин	57
Агар с тремя сахарами и железом	23	Амоксициллин	57
Агар с триптозой	12	Ампициллин	58
Агар с экстрактом риса	14	Ампициллин с Сульбактамом	58
Агар Сабуро декстрозный	14	Анализатор бактериологический Bactec MGIT 960	80
Агар Сабуро мальтозный	14	Анализатор бактериологический BD Bactec MGIT 320	80
Агар Сабуро модифицированный	14	Анализатор бактериологический BD БАКТЕК 9050	45
Агар Сабуро с Гентамицином и Хлорамфениколом	38	Анализатор бактериологический BD БАКТЕК FX	45
Агар Сабуро с глюкозой	38	Анализатор микробиологический BD Феникс 100	73
Агар Сабуро с глюкозой, гентамицином и хлорамфениколом	40	Антимикробная добавка к средам с новобиоцином	32
Агар Сабуро с Пенициллином и Стрептомицином	38	Аугментин / Амоксициллин 20 мг с Клавулановой Кислотой	57
Агар Сабуро с Хлорамфениколом	38	Бацитрацин	58
Агар Сабуро с Хроамфениколом и Циклогексимином	38	Бокс для транспортировки флаконов	47
Агар Сальмонелла-Шигелла	20	Бульон «Трихозел» модифицированный	22
Агар соевый «Триптиказа»	11	Бульон UVM для селективного культивирования листерий	17
Агар соевый «Триптиказа» модифицированный	11	Бульон для актиномицетов	11
Агар соевый «Триптиказа» с 5% добавлением крови барана	36,39	Бульон для бруцелл	12
Агар соевый «Триптиказа» с 5% добавлением крови лошади	39	Бульон для идентификации микроорганизмов	74
Агар соевый «Триптиказа» с лецитином и полисорбатом 80	39	Бульон для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам	74
Агар солодовый	13	Бульон для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам	74
Агар стандартных методов	26	Бульон для микоплазм ППЛО	18
Агар теллуритовый сывороточный	39	Бульон для тестирования уреазной активности микроорганизмов	23
Агар тестовый микробиологический	25	Бульон картофельный декстрозный	14
Агар тестовый на наличие дезоксирибонуклеазной активности	35	Бульон колумбийский	10
Агар Триптик соевый	11	Бульон ЛБ Леннокса	27
Агар Ф для псевдомонад	19	Бульон ЛБ Миллера	27
Агар фенилаланиновый	23	Бульон Летина	25
Агар фенилэтиловый с добавлением спирта	21,24	Бульон Летина модифицированный	25
Агар Шедлера	11,39	Бульон МакКонки	25
Агар Шедлера CNA с 5% добавлением крови барана	38	Бульон Миддлбрук 7Н9	18
Агар Шедлера KV с витамином К1, канамицином и ванкомицином	39	Бульон Миддлбрук в модификации 7Н9	83
		Бульон морской	25
		Бульон МРС для лактобацилл	16

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Бульон Мюллер Хинтон	10	Дальфопристин/Куинупристин (Синерцид)	58
Бульон Мюллер Хинтон II	26	Двухкомпонентная среда: ХРОМагар Сальмонелла	40
Бульон нейтрализующий Дей/Энгли	24	Декстроза для микробиологии	28
Бульон питательный	10	Декстрозный бульон с азидом натрия	21,24
Бульон питательный WL	14,16	Держатель для восьми пробирок	81
Бульон Раппапорта-Василиадиаса	20	Держатель для двух пробирок	81
Бульон с мочевиной	15	Держатель для контейнеров BD ГазПак Изи	42
Бульон с сердечно-мозговой вытяжкой модифицированный	10	Держатель для пяти пробирок	81
Бульон с триптозой	12	Держатель для трех пробирок	81
Бульон с триптозой фосфатный	19,22	Держатель для четырех пробирок	81
Бульон с феноловым красным и декстрозой	26	Диск для обновления программного обеспечения EpiCenter™	86, 87
Бульон Сабуро декстрозный	14	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Aspergillus niger</i>	65
Бульон Сабуро мальтозный	14	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Bacillus cereus</i>	65
Бульон селективный для листерий	17	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Bacillus subtilis</i>	65
Бульон селективный для листерий модифицированный	17	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Bacteroides fragilis</i>	65
Бульон селенитовый	20	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Campylobacter jejuni</i>	65
Бульон селенитовый с цистином	20	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Candida albicans</i>	65
Бульон соевый «Триптиказа»	11	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Citrobacter freundii</i>	65
Бульон Тодд-Хьюита	22	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Clostridium perfringens</i>	65
Бульон Триптик соевый	11	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Clostridium sporogenes</i>	65
Бульон универсальный обогащенный	17,20	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Enterobacter aerogenes</i>	65
Бульон Чапека-Докса	13	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Enterobacter cloacae</i>	65
Бульон Шедлера	11	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Enterococcus hirae</i>	66
Бульон Шедлера с витамином K1	26,38	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Escherichia coli</i>	66
Бумажные диски с цефиназой	52	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Haemophilus influenzae</i>	66
Буфер нейтрализующий	25	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Klebsiella aerogenes</i>	66
Буферный раствор BD Директиген для образцов	56	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Klebsiella pneumoniae</i>	66
Ванкомицин	58	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Listeria monocytogenes</i>	66
Висмут-сульфит агар	19	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	66
Воздушные фильтры BD БАСТЕС™ 9050	47	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Proteus mirabilis</i>	67
Воздушные фильтры BD БАСТЕС™ FX	47	Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Proteus vulgaris</i>	67
Воздушный фильтр	77		
Воздушный фильтр блока электроники	77		
Вориконазол	58		
Газогенерирующие пакеты анаэробные для контейнеров BD ГазПак Изи	42		
Газогенерирующие пакеты анаэробные с индикатором для контейнеров BD ГазПак Изи	42		
Газогенерирующие пакеты Кампи для контейнеров BD ГазПак Изи	43		
Газогенерирующие пакеты CO2 для контейнеров BD ГазПак Изи	43		
ГазПак 100 крышка	42		
Гатифлоксацин	58		
Гектоен энтеро агар	20,35		
Гемоглобин бычий лиофилизированный для микробиологии	19,29		
Гентамицин	58		
Гидролизат соевой муки для микробиологии	30		
Глицерин для микробиологии	29		
Грам кристаллический фиолетовый	50		
Грам основной фуксин	50		
Грам сафранин	50		

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	67	Добавка антимикробная ПАЛКАМ	32
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Salmonella poona</i>	67	Добавка антимикробных препаратов Блейзера для приготовления агара для кампилобактерий	31
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Salmonella typhimurium</i>	67	Добавка антимикробных препаратов Скирроу для приготовления агара для кампилобактерий	31
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Staphylococcus aureus</i>	67	Добавка Б для питательных микробиологических сред, с растворителем	32
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	67	Добавка ВиИкс для питательных микробиологических сред, с растворителем	32
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Staphylococcus epidermidis</i>	67	Добавка для питательных сред для микоплазм	32
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Streptococcus agalactiae</i>	68	Добавка к средам антимикробная оксфордская модифицированная	32
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Streptococcus pneumoniae</i>	68	Добавка селективная для листерий	31
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Streptococcus pyogenes</i>	68	Доксициклин	58
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Yersinia enterocolitica</i>	68	Дорипенем	58
Диски BD Таксо А с бацитрацином	53	Д-сорбитол для микробиологии	28
Диски BD Таксо N	53	Желатин для микробиологии	28
Диски BD Таксо ONPG	53	Желатин питательный	23,29
Диски BD Таксо Р с оптохином	53	Жидкая тиогликолевая среда с мясным экстрактом	26
Диски BD Таксо SPS	53	Забуференная пептонная вода	19
Диски BD Таксо нитратные	53	Заглушки BD БАКТЕК	47
Диски BD Таксо с адонитолом	54	Заглушки для неисправных гнезд в приборе	82
Диски BD Таксо с арабинозой	54	Идентификационный тест «BD MGIT TBc» для диагностики туберкулеза	81
Диски BD Таксо с галактозой	54	Изониазид	58
Диски BD Таксо с декстрозой	54	Имипенем	58
Диски BD Таксо с дульцитолом	54	Ингибитор Мартина и Льюиса (с ванкомицином, колистином, анизомицином и триметопримом)	32
Диски BD Таксо с канамицином	53	Ингибитор Мартина и Льюиса (с ванкомицином, колистином, анизомицином)	32
Диски BD Таксо с лактозой	54	Ингибитор Тайера Мартина (с ванкомицином, колистином и нистатином)	32
Диски BD Таксо с мальтозой	54	Ингибитор Тайера Мартина (с ванкомицином, колистином, нистатином и триметопримом)	32
Диски BD Таксо с маннитолом	54	Кабель UTP 20м	87
Диски BD Таксо с мочевиной	53	Кабель UTP 5м	86
Диски BD Таксо с новобиоцином	53	КалчеСваб ПЛЮС: тампон для забора пробы в пробирке со средой Эймса без угля	7
Диски BD Таксо с рамнозой	54	КалчеСваб ПЛЮС: тампон для забора пробы в пробирке со средой Эймса с углем	7
Диски BD Таксо с раффинозой	54	КалчеСваб: тампон для забора пробы в пробирке с агаром Кэри-Блэра	7
Диски BD Таксо с сахарозой	54	КалчеСваб: тампон для забора пробы в пробирке с жидкой средой Стюарта	7
Диски BD Таксо с сорбитолом	54	КалчеСваб: тампон для забора пробы в пробирке с жидкой средой Эймса	7
Диски BD Таксо с трегалозой	54	КалчеСваб: тампон для забора пробы двойной в пробирке с жидкой средой Стюарта	7
Диски BD Таксо с фактором V	53	КалчеСваб: тампон для забора пробы мини в пробирке с жидкой средой Стюарта	7
Диски BD Таксо с фактором X	54	Канамицин	58
Диски BD Таксо с фактором X и V	54	Капельница с 10% гидроксидом калия	51
Диспенсер для 6 картриджей	57		
Диспенсер для 8 картриджей	57		
Диспенсер для одного картриджа	57		
Диспенсер магнитных шариков	93		
Д-ксилоза для микробиологии	28		
Д-маннитол для микробиологии	28		
Добавка антимикробная для изоляции йерсиний (цефсулодин-новобиоцин)	33		

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Капельница с акридином оранжевым для окрашивания мазков	51	Лента BarcodA 90 мм	92
Капельница с индолом	50	Лента для штрих-кодов 22.86x22.86 мм	93
Капельница с индолом DMACA	50,71	Лента для этикеток 40x100 мм ErgonomicA	93
Капельница с каталазой	50,71	Линезолид	59
Капельница с метиленовым синим Леффлера	51	Линкомицин	59
Капельница с оксидазой	51,71	Лицензия инструмента визуализации BD Kiestra™	92
Капельница с реагентом ПИР	51	Лицензия приборной панели BD Kiestra™	92
Капельница с реагентом Фогеса - Проскауэра В	51	Ломефлоксацин	59
Капельница с реагентом Фогеса - Проскауэра А	51	Люер-адаптер для взятия крови из катетеров	47
Капельница с хлоридом железа	51	Магнитные шарики InoqulA™	93
Карбенициллин	59	Мальтоза для микробиологии	29
Картофельный агар с глюкозой	38	Мезлоциллин	59
Кислотный гидролизат казеина с низким содержанием натрия и железа	28	Меропенем	59
Кларитромицин	59	Метронидазол	59
Клиндамицин	59	Мециллинам	59
Клоксациллин	59	Миноциклин	59
Коагулазный агар с маннитолом	21	Модуль для постановки антибиотиков 2 ряда TB-eXiST	86
Колистин	59	Модуль для приготовления мазков BD Kiestra™ InoqulA™	90,91
Колумбийский CNA Агар	21,24,40	Моксалактам	59
Колумбийский CNA агар модифицированный с добавлением кристаллического фиолетового и 5% крови барана	35	Моксифлоксацин	59
Колумбийский CNA агар с 5% добавлением крови барана	35,37	Молоко снятое специальное для микробиологии	26,30
Колумбийский CNA плюс агар с 5% добавлением крови барана	35	Монитор EpiCenter™	86, 87
Колумбийский III агар с 5% добавлением крови барана	35	Мупироцин	59
Колумбийский агар с 5% добавлением крови барана	34	Мясной экстракт (паста)	28
Колумбийский агар с 5% добавлением крови лошади	35	Мясной экстракт (порошок)	28
Комбинированный тест BD Директиген для раннего обнаружения возбудителей менингита	55	Набор BD ДрайСлайд ПИР	52
Комплект для взятия крови (игла-«бабочка») с защитным механизмом	46	Набор BD Стафилослайд для латексного анализа	56
Комплект калибраторов для нефелометра BD ФениксСпек	71, 74	Набор BD Стрептокард для кислотного латексного анализа	56
Контейнер для сброса магнитных шариков	93	Набор BD Стрептокард для ферментативного латексного анализа	56
Контейнер инкубационный BD ГазПак Изи	42	Набор дисков BD Таксо для идентификации анаэробов	52
Контейнер-банка герметичная BD ГазПак 100	42	Набор для запуска AST Starter Kit	80
Крахмал растворимый для микробиологии	30	Набор для пересева культур из флаконов BD БАКТЕК	46
Кристал - Набор диагностический для быстрой идентификации грамположительных бактерий in vitro	70	Набор запасных частей BD Kiestra™ InoqulA™ Ensura	90
Кристал - Набор диагностический для идентификации анаэробов in vitro	70	Набор запасных частей BD Kiestra™ WCA	92
Кристал - Набор диагностический для идентификации грамположительных бактерий in vitro	70	Набор калибраторов для анализаторов BD BACTEC™ MGIT™	81
Кристал - Набор диагностический для идентификации нейссерий / гемофилов in vitro	70	Набор реагентов для окраски по Граму	50
Кристал - Набор диагностический для идентификации энтеро/неферментирующих бактерий in vitro	70	Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий	81
Кровяной агар с добавлением неомицина	37	Набор фильтров BD BACTEC™ FX	47
Крышки для панелей BD Феникс	74	Наклейки для считывателя штрих-кода	82
КФ агар для стрептококков	24	Наклейки для ячеек	77
Лампа белого света BD Кристал Панель Вьювер	71	Наклейки со штрих-кодом	47
Левовфлоксацин	59	Наклейки штрих-кодов – большие	86
		Наклейки штрих-кодов 22.86x22.86 мм	93
		Наклейки штрих-кодов 40x100 мм ErgonomicA	92
		Наклейки штрих-кодов BarcodA 40x100 мм	92
		Наконечники BD Феникс для пипеток	73
		Наконечники для пипеток в посевной станции InoqulA™ 1000 мкл	93
		Налидиксовая Кислота	60
		Нафциллин	60

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Начальный набор компонентов для подключения (сервер) EpiCenter™	86, 87	Основа для приготовления среды Левенштейн	17,83
Неомицин	60	Основа для приготовления среды Миддлбрук в модификации 7Н11	83
Неопептон для микробиологии	29	Основа для приготовления среды оксфордской	17
Нетилмицин	60	Основа для приготовления среды ПАЛКАМ	17
Нефелометр микробиологический BD ФениксСпек	71, 73	Основа для приготовления тетратионатного бульона	20
Нитрофурантоин	60	Основа для приготовления угольного агара Реган-Лоу	12
Нитрофурантоин с Сульфацином	60	Основа селективного агара для йерсиний	15
Новобиоцин	60	Основа среды для анализа дерматофитов	13
Норфлоксацин	60	Офлоксацин	61
Обесцвечивающий раствор	50	Панель нормолайзера	77
Обогащительная добавка «ИзоВиталекс»	30	Пенициллин	61
Обогащительная добавка агара для легионелл	31	Пептон «Биосат»	28
Обогащительная добавка для питательных сред с концентратом эмульсии яичного желтка 50%	31	Пептон «Битек» для микробиологии	28
Обогащительная добавка питательных сред для лептоспир	31	Пептон «Желизат» на основе лизированного желатина, для микробиологии	29
Обогащительная добавка питательных сред для микоплазм, без пенициллина	31	Пептон «Полипептон» для микробиологии	29
Обогащительная ростовая добавка Миддлбрук	31,83	Пептон «Триптиказа» для микробиологии	30
Обогащительная ростовая добавка ОАДС для среды Миддлбрук	31,81,83	Пептон «Фитон» для микробиологии	29
Обогащающая ростовая добавка	80	Пептон для микробиологии	29
Одноразовый держатель BD Vacutainer™	46	Пептон протеозный	30
Оксациллин	60	Пептон с «Ацидиказой»	27
Окситетрациклин	60	Пептонная вода	25,29
Олеандомицин	60	Пефлоксацин	61
Основа для кровяного агара с триптозой	12	Пипемидиевая Кислота	61
Основа для приготовления агара НС	13	Пиперациллин	61
Основа для приготовления агара Борде-Жангу	12	Пиперациллин с Тазобактамом	61
Основа для приготовления агара для кампилобактерий	15	Пипетка Hamilton BD Феникс, 25 мкл	73
Основа для приготовления агара для легионелл	16	Пипетка Hamilton BD Феникс, 50 мкл	73
Основа для приготовления агара для микоплазм	18	Питательная добавка к средам BD БАКТЕК	46
Основа для приготовления агара Кэсмана	18	Плазма кроличья для проведения коагулазного теста	52
Основа для приготовления агара ЛПМ	17	Плазма кроличья с ЭДТА для проведения коагулазного теста	52
Основа для приготовления агара Луриа, Миллера	27	Пластиковые пробирки BD Vacutainer® SST™ II Advance	47
Основа для приготовления агара Миддлбрук 7Н11	18	Подставка BD Феникс для пипеток	73
Основа для приготовления агара с мочевиной	23	Подставка для заполнения панелей BD Феникс	73
Основа для приготовления агара с феноловым красным	25	Подставка для флаконов BD БАКТЕК	47
Основа для приготовления агара с цетримидом	19	Полимиксин Б	61
Основа для приготовления бульона для микоплазм	18	Полисорбат 80 для микробиологии	30
Основа для приготовления бульона Луриа, Миллера	27	Полностью автоматизированная микробиологическая лаборатория BD Kiestra™ TLA	92
Основа для приготовления бульона с феноловым красным	25	Полоски BD Таксо с фактором V	53
Основа для приготовления бульона ТАТ	26	Полоски индикаторные анаэробные сухие BD ГазПак	43
Основа для приготовления колумбийского агара	10	Порт-А-Кул: пробирки для забора проб	8
Основа для приготовления кровяного агара	10	Порт-А-Кул: пробирки с тампонами для забора проб в стерильной упаковке	8
Основа для приготовления кровяного агара с азидом натрия	20,21	Порт-А-Кул: стерильная упаковка для забора проб	8
Основа для приготовления кровяного колумбийского агара	10	Порт-А-Кул: флаконы стерильные для забора проб	8
Основа для приготовления пурпурного агара	23	Посевная среда BD Кристал	70
Основа для приготовления пурпурного бульона	23	Посевная среда BD Кристал Энтеро	70
Основа для приготовления среды ЕМЖН для лептоспир	17	Посевная станция BD Kiestra™ InoquIA™	90
Основа для приготовления среды GC	18	Принтер для печати штрих-кодов	86

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Приспособление для крепления прибора BD MGIT 320 Anchor Kit	80	Сwab: тампон для забора пробы хлопок, 15 см	7
Пробирка контроля температуры	80	Селективная среда для гарднерелл с 5% добавлением крови	36
Программное обеспечение BD Kiestra™ ReadA Browser	91	Селективная среда Кампилобактер без добавления крови	34
Программное обеспечение Lantastic	87	Селективный агар для йерсиний	40
Программное обеспечение для подключения BACTEC FX Server EpiFX	87	Селективный агар для Клостридиум диффициле	34
Программное обеспечение на CD диске EpiCenter™	86, 87	Селективный агар для стрептококков группы А с 5% добавлением крови барана	36
Противовес для верхнего модуля BD БАКТЕК FX	45	Сенси-Диск Диспенсер Дизайнер систем	57
Рабочая станция EpiCenter™	86, 87	Сердечно-мозговая вытяжка	10
Раствор витамина К1 и гемаина	32	Система анаэробная BD ГазПак 100 и 150	42
Раствор гемоглобина 2% для микробиологии	29	Система реагентных пакетов CO2 BD ГазПак Изи	43
Раствор йодистого калия для окраски по Граму	50	Система реагентных пакетов анаэробная BD ГазПак Изи	43
Раствор теллурита с яичным желтком	31	Система реагентных пакетов Кампи BD ГазПак Изи	43
Раствор хлорида натрия 0.9%	30	Система цифрового учета результатов BD Kiestra™	91
Реагент для пробоподготовки и деконтаминации мокроты	80	Соединительный модуль BD Kiestra™ WCA	91
Реагент обесцвечивающий	82	Солевой агар с манитолом и оксацилином	37
Реагент-индикатор для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам	74	Солевой агар с маннитолом	21
Реагент-индикатор для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам	74	Соли желчных кислот №3	31
Реагент-краситель акридин оранжевый для окрашивания мазков	82	Спектиномицин	61
Реагент-краситель для окраски мазков по Киньону	82	Спирамицин	61
Реагент-краситель для окраски мазков по Циль-Нильсену	82	Среда 110 для стафилококков	21
Реагент-краситель флуоресцентный для окрашивания мазков	82	Среда дифференциальная WL	16
Реагенты для определения роста и чувствительности микобактерий	81	Среда для клостридий улучшенная	15,16
Реагенты на панели для идентификации возбудителей мочевых инфекций и их чувствительности к антибиотикам	75	Среда для культивирования анаэробов	45
Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов	77	Среда для культивирования анаэробов с лизирующим компонентом	45
Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам	74,75	Среда для культивирования аэробов	45
Реагенты на панели для идентификации грамположительных микроорганизмов	77	Среда для культивирования аэробов из образцов детской крови	45
Реагенты на панели для идентификации грамположительных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам	75	Среда для культивирования грибов	46
Реагенты на панели для идентификации дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов	77	Среда для культивирования грибов, дрожжей, микобактерий	46
Реагенты на панели для идентификации стрептококков и их чувствительности к антибиотикам	76	Среда для проведения теста подвижности микроорганизмов	25
Реагенты на панели для исследования чувствительности возбудителей мочевых инфекций к антибиотикам	76	Среда Левенштейн-Йенсен	83
Реагенты на панели для исследования чувствительности грамотрицательных микроорганизмов к антибиотикам	76	Среда Левенштейн-Йенсен ПАКТ	83
Реагенты на панели для исследования чувствительности грамположительных микроорганизмов к антибиотикам	76	Среда Мюллер Хинтон	27
Референсная панель	71	Среда основная ОФ	23
Рифампин	61	Среда питательная WL	14,16
Рифампицин	61	Среда питательная жидкая Миддлбрук с флуоресцентным компонентом в пробирках	80
Сахароза для микробиологии	30	Среда Рака-Рей № 3	16
Сwab: тампон для забора пробы полиэстер, 15 см	7	Среда Раппапорта-Вассилиадиса модифицированная полужидкая	20
		Среда Сабуро жидкая	14
		Среда сепация	34
		Среда тиогликолевая Бревера модифицированная	12
		Среда тиогликолевая жидкая	12,26
		Среда тиогликолевая, обогащенная витамином К1 и гемаином	39
		Среда транспортная Стюарта, Тошача и Пацулы	26
		Среда УВА (агар пивной универсальный)	25

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Среда Чапман Стоун	20	Триметоприм с Сульфаметоксазолом (Котримоксазол)	62
Стартовый набор BD Феникс 100	73	Триптоза для микробиологии	30
Стерильные одноразовые бактериологические иглы, 1 мкл (фиолетовые)	8	Триптон для микробиологии	30
Стерильные одноразовые бактериологические петли, 1 мкл (зеленые)	8	Триптонная вода	23
Стерильные одноразовые бактериологические петли, 10 мкл (голубые)	8	Угольный агар	12
Стерильный тампон для мониторинга окружающей среды	8	Ультрафиолетовая лампа BD Кристал Панель Вьювер	71
Стойка для верхнего модуля BD БАКТЕК FX	45	Устройство диагностическое in vitro BD Кристал Панель Вьювер	71
Стойка опциональная для прибора	80	Устройство для переноса крови из шприца в пробирку или флакон для гемокультивирования	46,47
Стол для анализатора BD Феникс 100	73	Феникс набор профилактического обслуживания	77
Стрептокард латексный реагент группы В	56	Фильтры воздушные квадратные	82
Стрептомицин	61	Фильтры воздушные прямоугольные	82
Сульбактам с Цефоперазоном	61	Флаконы с антимикробной добавкой К	30
Сульфатазол	62	Флуконазол	62
Сульфизоксазол	62	Фосфатный буферный раствор	29
Таблицы цветовых реакций	71	Фосфомицин	62
Таксо изониазидные контрольные диски	55,83	Фузидиевая Кислота	63
Таксо изониазидные тест-полоски	55,83	Фуразолидон	63
Таксо ниаценовые контрольные диски	55,83	Хлорамфеникол	63
Таксо ниаценовые тест-полоски	55,83	ХРОМагар MRSA II	40
Таксо нитритные тест-полоски	55,83	ХРОМагар O157	40
Твин 80 (полисорбат) для микробиологии	30	ХРОМагар Staphylococcus aureus	40
Тейкопланин	62	ХРОМагар Кандида	40
Телитромицин	62	ХРОМагар Листерия	40
Теллуритовый агар (Хойл) с 7% добавлением лизированной крови лошади	39	ХРОМагар Ориентейшн	40
Теллуритовый раствор 1% для микробиологии	30,32	ХРОМагар Сальмонелла	40
Темоциллин	62	Цефадроксил	63
Термометр	77	Цефазолин	63
Термометр цифровой	47	Цефаклор	63
Тест BD Директиген EZ для определения антигена респираторно-синцитиального вируса	56	Цефалотин	63
Тест BD Директиген EZ для определения антигенов вируса гриппа типа А и В	56	Цефдинир	63
Тест BD Директиген для определения антигенов к H. influenzae типа В	55	Цефепим	63
Тест BD Директиген для определения антигенов к S. pneumoniae	55	Цефиксим	63
Тест BD Директиген для определения антигенов стрептококков группы В	56	Цефокситин	63
Тест BD ДрайСлайд на индол	52	Цефоницид	63
Тест BD ДрайСлайд на оксидазу	52	Цефоперазон	63
Тест BD ДрайСлайд с нитроцефином	52	Цефотаксим	63
Тест-карты BD Директиген для обнаружения возбудителей менингита	56	Цефотаксим 30 мкг с Клавулановой Кислотой 10 мкг	63
Тетрациклин	62	Цефотетан	63
Тигециклин	62	Цефотиам	64
Тикарциллин с Клавулановой Кислотой 75/10 (Тиментин)	62	Цефпиром	64
Тобрамицин	62	Цефподоксим	64
Транспортная среда Кэри-Блэра	12,24	Цефпрозил	64
Триметоприм	62	Цефрадин	64
		Цефсулодин	64
		Цефтазидим	64
		Цефтазидим с Клавулановой Кислотой	64
		Цефтизоксим	64
		Цефтриаксон	64
		Цефутоксим	64
		Ципрофлоксацин	64
		Цитратный агар Симмонса	20,23

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Чистящая салфетка для принтера штрих-кодов BarcodA	92	Эндо агар	15,22
Шоколадный агар GC с «ИзоВиталексом»	34	Эноксацин	64
Шоколадный агар, среда на основе кровяного агара №2	34	Эозин метиленовый синий агар модифицированный	22
Шприц 10 мл BD Plastipak™	47	Эргономичный рабочий стол BD Kiestra™	92
Штатив для переноса пробирок	82	Эритромицин	64
Штатив для пипеток	93	Эртапенем	64
Штатив для хранения чашек с питательными средами	93	Этамбутол	64
Штатив переносной для панелей BD Феникс	73	Этионамид	65
Экстракт солода	29		

Алфавитный указатель

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Acetate Differential Agar	19	BD Kiestra™ Vision Toolbox License	92
AcidCase™ Peptone	27	BD Kiestra™ Workflow Dashboard License	92
Acridine Orange	51	BD Phoenix™ - Gram Negative Urine Panel (UNMIC-87)	76
Acridine Orange Stain	82	Bead Dispenser	93
Actinomyces Broth	11	Beef Extract (paste)	28
Actinomycete Isolation Agar	11	Beef Extract Powder	28
Adonitol	27	Bifidobacterium Agar, Modified (Beerens)	33
Aeromonas Yersinia Agar	33	BiGGY Agar	13
Agar (Grade A)	28	Bile Esculin Agar	21,24
Agar (Granulated)	28	Bile Salts No.3	31
Agar (Purified)	28	Biosat™ Peptone	28
Agar (Technical)	28	Bismuth Sulfite Agar	19
Agarose	28	BiTek™ Proteose Peptone	28
AIR FILTERS RECTANGULAR (PK/2)	82	Blood Agar Base	10
Anaerobic Agar	11	Bordet Gengou Agar Base	12
Antimicrobial Vial K	30	Bordet Gengou Agar with 15 % Sheep Blood	33
Azide Blood Agar Base	20,21	Bordetella Agar with Charcoal and 7 % Horse Blood	33
Azide Dextrose Broth	21,24	Brain Heart Infusion	10
BACTEC™ - BD FOS™ Culture Supplement Kit	46	Brain Heart Infusion Agar	10
BACTEC™ - Myco/F Lytic Medium	46	Brain Heart Infusion Broth, Modified	10
BACTEC™ - Mycosis IC/F Medium	46	Brilliant Green Agar	19
BACTEC™ - Plug	47	Brilliant Green Agar, Modified	33,40
BACTEC™ - Transport box for Blood Culture Bottles	47	Bromcresol Purple Lactose Agar	33
BACTEC™ - Vial Tray	47	Brucella Agar	12
BACTEC™ 9050	45	Brucella Agar with 5 % Sheep Blood, Hemin and Vitamin K1	33
BACTEC™ FX	45	Brucella Broth	12
BACTEC™ FX Digital Thermometer	47	Buffered Peptone Water	19
BACTEC™ Lytic/10 Anaerobic/F Medium	45	CABLE UTP 5M	86
BACTEC™ MGIT™ 320 - Anchor Kit	80	Campylobacter Agar (Butzler) with 7% Horse Blood	33
BACTEC™ MGIT™ 320 - Mycobacterial Detection Instrument	80	Campylobacter Agar Base	15
BACTEC™ MGIT™ 320 - Stand	80	Campylobacter Agar Skirrow	34
BACTEC™ MGIT™ 960 - 2-tube AST Carrier Set	81	Campylobacter Agar with 5 Antimicrobics and 10 % Sheep Blood	34
BACTEC™ MGIT™ 960 - 3-tube AST Carrier Set	81	Campylobacter Antimicrobial Supplement Blaser	31
BACTEC™ MGIT™ 960 - 4-tube AST Carrier Set	81	Campylobacter Antimicrobial Supplement Skirrow	31
BACTEC™ MGIT™ 960 - 5-tube AST Carrier Set	81	Campylobacter Selective Medium, Preston, Bloodfree	34
BACTEC™ MGIT™ 960 - 7 ml tube Spare Barcode Labels	82	Cary and Blair Transport Medium	12,24
BACTEC™ MGIT™ 960 - 8-tube AST Carrier Set	81	Casamino Acids	28
BACTEC™ MGIT™ 960 - AST Starter Kit	80	Casman Agar Base	18
BACTEC™ MGIT™ 960 - AST Transport Rack	82	Catalase	51,71
BACTEC™ MGIT™ 960 - Calibrators Kit	81	CD Installation Server EpiFX Package	87
BACTEC™ MGIT™ 960 - Mycobacterial Detection Instrument	80	CDC Anaerobe 5 % Sheep Blood Agar	34
BACTEC™ MGIT™ 960 - Plug, Bad Station	82	Cefinase™ Paper Disc (1/4")	52
BACTEC™ MGIT™ 960 - PZA Kit	81	Cepacia Medium	34
BACTEC™ MGIT™ 960 - PZA Medium	81	Cetrimide Agar Base - BD Pseudosol™ Agar	19
BACTEC™ MGIT™ 960 - SIRE Kit	81	Chapman Stone Medium	20
BACTEC™ MGIT™ 960 - Temperature Control Tube	80	Charcoal Agar	12
BACTEC™ Peds PLUS™ Medium	45	Chocolate Agar with BD IsoVitalX™ and Bacitracin	34
BACTEC™ PLUS Aerobic/F Medium	45	Chocolate Agar, Blood Agar No. 2 Base	34
BACTEC™ PLUS Anaerobic/F Medium	45	CHROMagar Salmonella	40
Bacteroides Bile Esculin Agar with Amikacin, BBE Agar	33	CHROMagar™ Candida	40
Baird Parker Agar	33	CHROMagar™ Listeria	40
BCYE Agar	33	CHROMagar™ MRSA II	40
BD Kiestra™ Digital Reading Workstation	91	CHROMagar™ O157	40
BD Kiestra™ Ensura Cabinet Inoqua	90	CHROMagar™ Orientation	40
BD Kiestra™ ErgonomicA	92	CHROMagar™ Salmonella	40
BD Kiestra™ Inoqua Slide Prep Module	90,91	CHROMagar™ Staph aureus	40
BD Kiestra™ Inoqua WCA (Work Cell Automation)	91	Cleaning Cloth BarcodA	92
BD Kiestra™ Inoqua™	90	CLED Agar	24,34
BD Kiestra™ ProceedA WCA	91	CLED Agar, Bevis	34
BD Kiestra™ ReadA Browser Software License	91	Clostridium Difficile Agar with 7 % Sheep Blood	34
BD Kiestra™ ReadA Compact	91		

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Clostridium Difficile Selective Agar	34	D-Sorbitol Sorbite	28
Coagulase Mannitol Agar	21	D-Xylose	28
Coagulase Plasma	52	Egg Yolk Enrichment 50%	31
Coagulase Plasma with EDTA	52	Egg Yolk Tellurite Enrichment	31
Columbia Agar Base	10	EMB Agar, Modified	35
Columbia Agar with 5 % Horse Blood	35	Endo Agar	15,21
Columbia Agar with 5 % Sheep Blood	34	EnsurA Cabinet WCA	92
Columbia Blood Agar Base	10	Enterococcosel™ Agar	24
Columbia Broth	10	Enterococcus Screen Agar	36
Columbia CNA Agar	21,24,40	Eosin Methylene Blue Agar, Modified	22
Columbia CNA Agar with 5 % Sheep Blood	35,37	EpiCenter™ - 17 inch Monitor	86, 87
Columbia CNA Agar, Modified, with Crystal Violet and 5 % Sheep Blood	35	EpiCenter™ - Lantastic Software	87
Columbia CNA Plus Agar with 5 % Sheep Blood	35	EpiCenter™ - Multi-User Module	88
Columbia II Agar	10	EpiCenter™ - Updater Disk (PUD)	86, 87
Columbia III Agar with 5 % Sheep Blood	35	EpiCenter™ - UTP Cable (20 m)	87
Counter Weight for BD BACTEC™ FX Top Unit	45	EpiCenter™ - Workstation	86, 87
Crystal™ - Anaerobe ID Kit	70	EpiCenter™ Barcode Printer Kit	86
Crystal™ - Color Reaction Charts	71	EpiCenter™ Barcode Printing Module	86, 88
Crystal™ - Enteric/Nonfermenter ID Kit	70	EpiCenter™ CD Software	86, 87
Crystal™ - Enteric/Stool ID Inoculum Fluid	70	EpiCenter™ EpiCARE™ Open Expert System Module	88
Crystal™ - Gram-Positive ID Kit	70	EpiCenter™ PLUS - Activation Module	88
Crystal™ - Inoculum Fluid	70	EpiCenter™ Sentinel™	88
Crystal™ - Neisseria/Haemophilus ID Kit	70	EpiCenter™ Server starter group	86, 87
Crystal™ - Panel Viewer	71	EpiCenter™ TB-eXiST module	86
Crystal™ - Panel Viewer White Light Tube	71	Ferric Chloride	51
Crystal™ - Rapid Gram-Positive ID Kit	70	FILTER AIR B9050 F/G	47
Crystal™ - Reference Panel	71	Filter Air Electronics Bay	77
CultureSwab™ - Cary-Blair Agar (Single Swab)	7	FILTER AIR EXT LOOP FX	47
CultureSwab™ - Liquid Amies (Single Swab)	7	Filter Air Light Bay	77
CultureSwab™ - Liquid Stuart (Double Swab)	7	FILTER AIRSET B9240 2/PK	82
CultureSwab™ - Liquid Stuart (Mini Tip Swab)	7	Gardnerella Selective Agar with 5% Human Blood	36
CultureSwab™ - Liquid Stuart (Single Swab)	7	GasPak™ - Dry Anaerobic Indicator Strips	43
CultureSwab™ - Sterile (Single Swab)	7	GasPak™ 100 - Holding Jar	42
CultureSwab™ PLUS - Amies Gel with Charcoal (Single Swab)	7	GasPak™ 100 - Lid	42
CultureSwab™ PLUS - Amies Gel without Charcoal (Single Swab)	7	GasPak™ 100 - System Complete	42
Czapek Solution Agar	13	GasPak™ 150 - Anaerobic System Complete (Large)	42
Czapek-Dox Broth	13	GasPak™ EZ - Anaerobe Container System Sachets	42
D/E Neutralizing Agar	24	GasPak™ EZ - Anaerobe Pouch System	43
D/E Neutralizing Broth	24	GasPak™ EZ - BD CampyPouch™ System	43
DCLS Agar	19	GasPak™ EZ - Campy Container System Sachets	43
DCLS Agar, modified	35	GasPak™ EZ - CO2 Container System Sachets	43
Dermatophyte Agar	35	GasPak™ EZ - Container Rack	42
Dermatophyte Test Medium Base	13	GasPak™ EZ - Incubation Container	42
Desoxycholate Agar	22	GasPak™ EZ - Sachet Anaerobe with Indicator	42
Dextrose Glucose	28	GasPak™ EZ - CO2 Pouch System	43
Differential Reinforced Clostridial Agar (DRCA)	15	GC II Agar with IsoVitaleX Enrichment	36
Directigen™ - Group B Strep Test Kit	56	GC Medium Base	18
Directigen™ - H. influenzae type B Test Kit	55	GC-Chocolate Agar with BD IsoVitaleX	34
Directigen™ - Meningitis Combo Test Cards	56	GC-Lect Agar	36
Directigen™ - Meningitis Combo Test Kit	55	Gelatin	28
Directigen™ - Meningitis Specimen Buffer	56	Gelysate™ Peptone	29
Directigen™ - S. pneumoniae Test Kit	55	Glycerol	29
Directigen™ EZ - Flu A+B	56	Gram Basic Fuchsin	50
Directigen™ EZ - RSV Test Kit	56	Gram Crystal Violet	50
DMACA Indole	50,71	Gram Decolorizer	50
D-Mannitol	28	Gram Iodine	50
DNase Test Agar	35	Gram Safranin	50
Drigalski Lactose Agar with CAZ (Ceftazidime)	35	Gram Stain Kit (Stabilized)	50
DrySlide™ - Indole	52	Group A Selective Strep Agar with 5% Sheep Blood	36
DrySlide™ - Nitrocefin	52	Group B Streptococcus Differential Agar	36
DrySlide™ - Oxidase	52	Haemophilus Identification Plate	36
DrySlide™ - PYR Kit	52	Haemophilus Test Medium Agar	36
		HC Agar Base	13
		Heart Infusion Agar with 5 % Sheep Blood	36

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Hektoen Enteric Agar	20,35	Martin Lewis Agar, Modified	37
Helicobacter Agar	36	Methylene Blue Loeffler	51
Hemoglobin Solution 2%	29	MGIT™ - Supplement Kit	80
Hemoglobin, Bovine (Freeze-Dried)	19,29	MGIT™ Mycobacteria Growth Indicator Tubes	80
Indole	50	MGIT™ TBc ID Test Device	81
Inoqula Magnetic Bead Waste Container	93	Microbial Content Test Agar	25
Inoqula Magnetic Beads	93	Microtrol™ - Aspergillus niger	65
Inoqula Pipet tip 1000 ul	93	Microtrol™ - Bacillus cereus	65
Iso-Res Agar	36	Microtrol™ - Bacillus subtilis	65
IsoVitaleX™ Enrichment	30	Microtrol™ - Bacteroides fragilis	65
KF Streptococcus Agar	24	Microtrol™ - Campylobacter jejuni	65
Kimmig Fungal Agar	36	Microtrol™ - Candida albicans	65
KIT FILTERS BFX SPARE	47	Microtrol™ - Citrobacter freundii	65
Kligler Iron Agar	22	Microtrol™ - Clostridium perfringens	65
Label BarcodA 40x100mm	92	Microtrol™ - Clostridium sporogenes	65
Label Barcode Spare	47	Microtrol™ - Enterobacter aerogenes	65
Label ErgonomicA 40x100mm	92	Microtrol™ - Enterobacter cloacae	65
Label Inoqula 22.86x22.86mm	93	Microtrol™ - Enterococcus faecalis	65
Label Panel Carrier	77	Microtrol™ - Enterococcus hirae	66
Lactobacilli MRS Agar	16	Microtrol™ - Escherichia coli	66
Lactobacilli MRS Broth	16	Microtrol™ - Haemophilus influenzae	66
LARGE BARCODE LABELS	86	Microtrol™ - Klebsiella aerogenes	66
LB Agar, Lennox	27	Microtrol™ - Klebsiella pneumonia	66
LB Agar, Miller	27	Microtrol™ - Listeria monocytogenes	66
LB Broth, Lennox	27	Microtrol™ - Neisseria gonorrhoeae	66
LB Broth, Miller	27	Microtrol™ - Proteus mirabilis	67
LBS Agar	16	Microtrol™ - Proteus vulgaris	67
Legionella Agar Base	16	Microtrol™ - Pseudomonas aeruginosa	67
Legionella Agar Enrichment	31	Microtrol™ - Salmonella poona	67
Legionella BCYE Agar with L-Cysteine and Antibiotics	37	Microtrol™ - Salmonella typhimurium	67
Legionella BCYE Agar without Antibiotics	36	Microtrol™ - Staphylococcus aureus	67
Leptospira Enrichment (Lyophilised)	31	Microtrol™ - Staphylococcus aureus (MRSA)	67
Leptospira Enrichment EMJH	31	Microtrol™ - Staphylococcus epidermidis	67
Leptospira Medium Base EMJH	17	Microtrol™ - Streptococcus agalactiae	68
Lethen Agar	24	Microtrol™ - Streptococcus pneumoniae	68
Lethen Agar, Modified	25	Microtrol™ - Streptococcus pyogenes	68
Lethen Broth	25	Microtrol™ - Yersinia enterocolitica	68
Lethen Broth, Modified	25	Middlebrook 7H10 Agar	18,83
Levine EMB Agar	22	Middlebrook 7H11 Agar Base	18,83
Listeria Enrichment Broth	17	Middlebrook 7H9 Broth	18,83
Listeria Enrichment Broth, Modified	17	Middlebrook ADC Enrichment	31,83
Listeria Selective Supplement	31	Middlebrook and Cohn 7H10 Agar	18
Loewenstein-Jensen Medium	83	Middlebrook OADC Enrichment	31,81,83
Loewenstein-Jensen Medium with Glycerol and PACT	83	Mitis Salivarius Agar	21
Lowenstein Medium Base	17,83	Motility Test Medium	25
LPM Agar Base	17	Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood	37
Luria Agar Base (Miller)	27	Mueller Hinton Broth	10
Luria Broth Base (Miller)	27	Mueller Hinton Chocolate Agar with IsoVitaleX	37
Lysine Iron Agar	22	Mueller Hinton II Agar	26
MacConkey Agar	22,37	Mueller Hinton II Broth	26
MacConkey Agar without Crystal Violet	17,24	Mueller Hinton Medium	27
MacConkey Agar without Salt	22	Mycological Agar	13
MacConkey Broth	25	Mycophil™ Agar with Low pH	13
MacConkey II Agar	23,35,39	Mycoplasma Agar Base (PPLO Agar Base)	18
MacConkey II Agar with MUG	39	Mycoplasma Broth Base (Frey)	18
MacConkey Sorbitol Agar	23	Mycoplasma Broth Base (PPLO Broth Base)	18
Malt Agar	13	Mycoplasma Enrichment without Penicillin	31
Malt Extract	29	Mycoplasma Supplement	32
Malt Extract Agar	13	Mycoplate MS Agar	37
Maltose	29	Mycoprep Kit	80
Mannitol Salt Agar	21	Mycosel™ Agar	13
Mannitol Salt Agar with Oxacillin	37	MYP Agar	37
Marine Agar 2216	25	Neomycin Blood Agar	37
Marine Broth 2216	25	Neopeptone	29

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Neutralizing Buffer	25	Port-A-Cul™ - Tube	8
Normalizer Panel	77	Port-A-Cul™ - Tube & Swabs (Sterile Pack)	8
Novobiocin Antimicrobial Supplement	32	Port-A-Cul™ - Vial (Sterile Pack)	8
Nutrient Agar	10	Potassium Hydroxide 10 %	51
Nutrient Broth	10	Potato Dextrose Agar	14
Nutrient Gelatin	23,29	Potato Dextrose Broth	14
OF Basal Medium	23	Potato Glucose Agar	38
OFBBL Agar	37	PPLO Agar (Mycoplasma Agar)	18
Oxford Antimicrobial Supplement, Modified	32	PPLO Broth (Mycoplasma Broth)	18
Oxford Medium Base	17	Proteose Peptone	30
Oxidase	51,71	Pseudomonas Agar F	19
PALCAM Antimicrobial Supplement	32	Pseudomonas Agar P	19
PALCAM Listeria Agar	37	Pseudomonas CFC Agar	38
PALCAM Medium Base	17	Pseudomonas Isolation Agar	38
Panel Viewer Longwave UV Tube	71	Pseudosel™ Agar	38
Peptone	29	Purple Agar Base	23
Peptone Water	25,29	Purple Broth Base	23
Phenol Red Agar Base	25	PX/PX AP TABLE	73
Phenol Red Broth Base	25	PYR	51
Phenol Red Dextrose Broth	26	R2A Agar	38
Phenylalanine Agar	23	Raka-Ray No. 3 Medium	16
Phenylethyl Alcohol Agar	21,24	Rappaport-Vassiliadis Medium, Modified (Semisolid)	20
Phoenix PM Kit	77	Rappaport-Vassiliadis R10 Broth	20
PhoenixSpec™ - Calibration Standards	71, 74	ReadA Compact Plate Storage Cart	93
PhoenixSpec™ - Nephelometer	71, 73	Regan-Lowe Charcoal Agar Base	12
Phoenix™ - 25 µl Hamilton-Pipette	73	Reinforced Clostridial Medium (RCM)	15,16
Phoenix™ - 50 µl Hamilton-Pipette	73	Ribbon BarcodA 90mm	92
Phoenix™ - AST Broth	74	Ribbon ErgonomicA for 40x100mm Label	93
Phoenix™ - AST Indicator	74	Ribbon InoquA for 22.86x22.86mm Label	93
Phoenix™ - AST-S Broth	74	Rice Extract Agar	14
Phoenix™ - AST-S Indicator	74	Rogosa SL Agar	16
Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (NMIC/ID-76)	74	Sabouraud Agar with Chloramphenicol	38
Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (NMIC/ID-90)	75	Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide	38
Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (NMIC/ID-94)	75	Sabouraud Agar with Penicillin and Streptomycin	38
Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (UNMIC/ID-87)	75	Sabouraud Agar, Modified	14
Phoenix™ - Gram Negative ID Panels (NID)	77	Sabouraud Dextrose Agar	14
Phoenix™ - Gram Negative Panel (NMIC-93)	76	Sabouraud Dextrose Broth	14
Phoenix™ - Gram Positive Combo Panel (PMIC/ID-69)	75	Sabouraud Glucose Agar	38
Phoenix™ - Gram Positive ID Panels (PID)	77	Sabouraud Glucose Agar with Gentamycin and Chloramphenicol	40
Phoenix™ - Gram Positive Panel (PMIC-71)	76	Sabouraud Maltose Agar	14
Phoenix™ - Gram Positive Panel (PMIC-72)	77	Sabouraud Maltose Broth	14
Phoenix™ - Gram Positive Panel (PMIC-75)	77	Sabouraud Medium, Fluid	14
Phoenix™ - Gram Positive Panel (PMIC-79)	76	Sabouraud with Gentamycin and Chloramphenicol Agar	38
Phoenix™ - GramPositive Combo Panel (PMIC/ID-71)	75	Saccharose	30
Phoenix™ - GramPositive Combo Panel (PMIC/ID-72)	75	Saline Solution (0.9%)	30
Phoenix™ - ID Broth	74	Salmonella Shigella Agar	20
Phoenix™ - Inoculation Station	73	Schaedler Agar	11,39
Phoenix™ - Panel Caddy	73	Schaedler Agar KV, Vitamin K1, Kanamycin, Vancomycin	39
Phoenix™ - Panel Closure	74	Schaedler Agar with Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood	38
Phoenix™ - Pipette Stand	73	Schaedler Broth	11
Phoenix™ - Pipette Tips	73	Schaedler Broth with Vitamin K1	26,38
Phoenix™ - Starter Kit	73	Schaedler CNA Agar with 5 % Sheep Blood	38
Phoenix™ - Streptococci Panel (SMIC/ID-11)	76	Schaedler K-V Agar with 5 % Sheep Blood	38
Phoenix™ - Yeast ID Panels	77	Selenite Broth	20
Phoenix™ 100 - Instrument	73	Selenite Cystine Broth	20
Phosphate Buffered Saline	29	Sensi-Disc™ - 6-Place Dispenser	57
Phytone™ Peptone	29	Sensi-Disc™ - 8-Place Dispenser	57
Phytone™ Yeast Extract Agar	14	Sensi-Disc™ - Amdinocillin	57
Pipet Rack Holder	93	Sensi-Disc™ - Amikacin	57
Plastipak™ 10 ml Luer-Lok™ Syringe	47	Sensi-Disc™ - Amoxicillin	57
Plate Count Agar	26	Sensi-Disc™ - Ampicillin	58
Polypeptide™ Peptone	29	Sensi-Disc™ - Ampicillin/Sulbactam	58
Polysorbate 80	30	Sensi-Disc™ - Augmentin	57
Port-A-Cul™ - Transport Jar (Sterile Pack)	8		

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Sensi-Disc™ - Azithromycin	57	Sensi-Disc™ - Mupirocin	59
Sensi-Disc™ - Azlocillin	57	Sensi-Disc™ - Nafcillin	60
Sensi-Disc™ - Aztreonam	57	Sensi-Disc™ - Nalidixic Acid	60
Sensi-Disc™ - Bacitracin	58	Sensi-Disc™ - Neomycin	60
Sensi-Disc™ - Carbenicillin	59	Sensi-Disc™ - Netilmicin	60
Sensi-Disc™ - Cefaclor	63	Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin	60
Sensi-Disc™ - Cefadroxy	63	Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin 300 µg + Sulfafiazine 100 µg	60
Sensi-Disc™ - Cefazolin	63	Sensi-Disc™ - Norfloxacin	60
Sensi-Disc™ - Cefdinir	63	Sensi-Disc™ - Novobiocin	60
Sensi-Disc™ - Cefepime	63	Sensi-Disc™ - Ofloxacin	61
Sensi-Disc™ - Cefixime	63	Sensi-Disc™ - Oleandomycin	60
Sensi-Disc™ - Cefonicid	63	Sensi-Disc™ - Oxacillin	60
Sensi-Disc™ - Cefoperazone	63	Sensi-Disc™ - Oxytetracycline	60
Sensi-Disc™ - Cefotaxime	63	Sensi-Disc™ - Pefloxacin	61
Sensi-Disc™ - Cefotaxime 30 µg with Clavulanic Acid 10 µg	63	Sensi-Disc™ - Penicillin	61
Sensi-Disc™ - Cefotetan	63	Sensi-Disc™ - Pipemidic Acid	61
Sensi-Disc™ - Cefotiam	64	Sensi-Disc™ - Piperacillin	61
Sensi-Disc™ - Cefoxitin	63	Sensi-Disc™ - Piperacillin 100 µg + Tazobactam 10 µg	61
Sensi-Disc™ - Cefpirome	64	Sensi-Disc™ - Polymyxin B	61
Sensi-Disc™ - Cefpodoxime	64	Sensi-Disc™ - Rifampicin	61
Sensi-Disc™ - Cefprozil	64	Sensi-Disc™ - Rifampin	61
Sensi-Disc™ - Cefsulodin	64	Sensi-Disc™ - Single Disc Dispenser	57
Sensi-Disc™ - Ceftazidime	64	Sensi-Disc™ - Spectinomycin	61
Sensi-Disc™ - Ceftazidime 30 µg with Clavulanic Acid 20 µg	64	Sensi-Disc™ - Spiramicin	61
Sensi-Disc™ - Ceftizoxime	64	Sensi-Disc™ - Streptomycin	61
Sensi-Disc™ - Ceftriaxone	64	Sensi-Disc™ - Sulbactam 30 µg with Cefoperazone 75 µg	61
Sensi-Disc™ - Cefuroxime	64	Sensi-Disc™ - Sulfathiazole	62
Sensi-Disc™ - Cephalothin	63	Sensi-Disc™ - Sulfisoxazole	62
Sensi-Disc™ - Cephadrine	64	Sensi-Disc™ - Teicoplanin	62
Sensi-Disc™ - Chloramphenicol	63	Sensi-Disc™ - Telithromycin	62
Sensi-Disc™ - Ciprofloxacin	64	Sensi-Disc™ - Temocillin	62
Sensi-Disc™ - Clarithromycin	59	Sensi-Disc™ - Tetracycline	62
Sensi-Disc™ - Clindamycin	59	Sensi-Disc™ - Ticarcillin	62
Sensi-Disc™ - Cloxacillin	59	Sensi-Disc™ - Ticarcillin with Clavulanic Acid (Timentin)	62
Sensi-Disc™ - Colistin	59	Sensi-Disc™ - Tigecycline	62
Sensi-Disc™ - Dalfopristin/Quinupristin (Synercid)	58	Sensi-Disc™ - Tobramycin	62
Sensi-Disc™ - Designer Dispenser System	57	Sensi-Disc™ - Trimethoprim	62
Sensi-Disc™ - Doripenem	58	Sensi-Disc™ - Trimethoprim 1.25 µg + Sulfamethoxazol 23.75 µg (Cotrimoxazol)	62
Sensi-Disc™ - Doxycycline	58	Sensi-Disc™ - Vancomycin	58
Sensi-Disc™ - Enoxacin	64	Sensi-Disc™ - Voriconazole	58
Sensi-Disc™ - Ertapenem	64	Serum Tellurite Agar	39
Sensi-Disc™ - Erythromycin	64	Simmons Citrate Agar	20,23
Sensi-Disc™ - Ethambutol	64	Skim Milk	26,30
Sensi-Disc™ - Ethionamide	65	Soluble Starch	30
Sensi-Disc™ - Fluconazole	62	Soytone Bacto	30
Sensi-Disc™ - Fosfomycin	62	Stand for BD BACTEC™ FX Top Unit	45
Sensi-Disc™ - Furazolidone	63	Standard Methods Agar	26
Sensi-Disc™ - Fusidic Acid	63	Staphylococcus Medium 110	21
Sensi-Disc™ - Gatifloxacin	58	Staphyloslide™ - Latex Test Kit	56
Sensi-Disc™ - Gentamicin	58	Sterile disposable Inoculating Loops - 1 µl (Light Green)	8
Sensi-Disc™ - Imipenem	58	Sterile disposable Inoculating Loops - 10 µl (Light Blue)	8
Sensi-Disc™ - Isoniazid	58	Sterile disposable Inoculating Needles - 1 µl (Violet)	8
Sensi-Disc™ - Kanamycin	58	Sterile Pack Swabs	8
Sensi-Disc™ - Levofloxacin	59	Streptocard™ - Acid Latex Test Kit	56
Sensi-Disc™ - Lincomycin	59	Streptocard™ - Enzyme Latex Test Kit	56
Sensi-Disc™ - Linezolid	59	Streptocard™ - Group B Latex Reagent	56
Sensi-Disc™ - Lomefloxacin	59	Subculture/Aerobic Vent	46
Sensi-Disc™ - Mecillinam	59	Supplement B	32
Sensi-Disc™ - Meropenem	59	Supplement VX	32
Sensi-Disc™ - Metronidazole	59	SWUBE™ - 15 cm, Single Cotton Swab (Friction Cap)	7
Sensi-Disc™ - Mezlocillin	59	SWUBE™ - 15 cm, Single Cotton Swab (Screw Cap)	7
Sensi-Disc™ - Minocycline	59	SWUBE™ - 15 cm, Single Polyester Swab (Friction Cap)	7
Sensi-Disc™ - Moxalactam	59	SWUBE™ - 15 cm, Single Polyester Swab (Screw Cap)	7
Sensi-Disc™ - Moxifloxacin	59		

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
TAT Broth Base	26	Trichosel™ Broth, Modified	22
Taxo™ - A Discs	53	Triple Sugar Iron Agar	23
Taxo™ - Adonitol Discs	54	Tryptic Soy Agar	11
Taxo™ - Anaerobe Disc Set	52	Tryptic Soy Broth	11
Taxo™ - Arabinose Discs	54	Trypticase Soy Agar w Lecithin and Polysorbate 80	39
Taxo™ - Dextrose Discs	54	Trypticase Soy Agar with 5 % Horse Blood, TSA II	39
Taxo™ - Dulcitol Discs	54	Trypticase Soy Agar with 5 % Sheep Blood (TSA II)	36,39
Taxo™ - INH Test Control	55,83	Trypticase™ Peptone	30
Taxo™ - INH Test Strips	55,83	Trypticase™ Soy Agar	11
Taxo™ - Kanamycin Discs	53	Trypticase™ Soy Agar with 5 % Sheep Blood (TSA II)	39
Taxo™ - Lactose Discs	54	Trypticase™ Soy Agar, Modified (TSA II)	11
Taxo™ - Maltose Discs	54	Trypticase™ Soy Broth	11
Taxo™ - Mannitol Discs	54	Tryptone Peptone	30
Taxo™ - N Discs	53	Tryptone Water	23
Taxo™ - Nitrate Discs	53	Tryptose Agar	12
Taxo™ - Nitrite Test Strips	54,82	Tryptose Blood Agar Base	12
Taxo™ - Novobiocin Discs	53	Tryptose Broth	12
Taxo™ - ONPG Discs	53	Tryptose Peptone	30
Taxo™ - P Discs	53	Tryptose Phosphate Broth	19,22
Taxo™ - Raffinose Discs	54	TSN Agar	15
Taxo™ - Rhamnose Discs	54	Tween® 80 - Polysorbate 80	30
Taxo™ - Sorbitol Discs	54	Universal Beer Agar	16,25
Taxo™ - SPS Discs	53	Universal Preenrichment Broth	17,20
Taxo™ - Sucrose Discs	54	Urea Agar Base	23
Taxo™ - TB Niacin Test Control	55,83	Urea Broth	15
Taxo™ - TB Niacin Test Strips	55,82	Urease Test Broth	23
Taxo™ - Trehalose Discs	54	UVM Modified Listeria Enrichment Broth	17
Taxo™ - Urea Discs	53	Vacutainer™ Blood Transfer device	46,47
Taxo™ - V Factor Discs	53	Vacutainer™ Luer Adapter	47
Taxo™ - V Factor Strips	53	Vacutainer™ One Use Holder	46
Taxo™ - X and V Factor Discs	54	Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Set	46
Taxo™ - X Factor Discs	54	Vacutainer™ SST II Advance	47
Taxo™ Galactose Discs	54	Vancomycin Screen Agar	39
TB Decolorizer	82	V-C-A Inhibitor	32
TB Fluorescent Stain Kit M	82	V-C-A-T Inhibitor	32
TB Fluorescent Stain Kit T	82	V-C-N Inhibitor	32
TB Stain Kit K	82	V-C-N-T Inhibitor	32
TB Stain Kit ZN	82	Vitamin K1-Hemin Solution	32
TCBS Agar	13	Voges-Proskauer A	51
Tellurite Agar (Hoyle) With 7% Lysed Horse Blood	39	Voges-Proskauer B	51
Tellurite Solution (1%)	30,32	Wilkins Chalgren Agar	27
Tetrathionate Broth Base	20	Wilkins Chalgren Agar with Amikacin and 7 % Sheep Blood	39
The BD Kiestra™ TLA (Total Lab Automation)	92	WL Differential Medium	16
Thermometer Panel	77	WL Nutrient Broth	14,16
Thioglycollate Medium, Brewer Modified	12	WL Nutrient Medium	14,16
Thioglycollate Medium, Enriched with Vitamin K1 and Hemin	39	XLD Agar	20,40
Thioglycollate Medium, Fluid	12,26	Yersinia Antimicrobial Supplement CN	33
Thioglycollate Medium, Fluid with Beef Extract	26	Yersinia Selective Agar (CIN Agar)	40
Todd Hewitt Broth	22	Yersinia Selective Agar Base (CIN Agar Base)	15
Tomato Juice Agar	16	YM Agar	15
Transport Medium (Stuart, Toshach and Patsula)	26	YPD Agar	15

Указатель каталожных номеров

Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.
210420	20	211677	29	212330	13	217820	30
210430	20	211681	29	212345	19	217910	28
210920	11	211684	30	212346	18	218051	27
210940	14	211690	15	212347	18	218071	25
210950	14	211699	30	212351	31,83	218081	15,16
211020	14	211705	30	212352	31,83	218103	19
211027	13	211709	30	212354	32	218105	19
211037	10	211713	30	212357	31	218110	28
211038	10	211716	12	212367	19	218172	15
211043	11	211743	26	212392	19,29	218201	15
211046	11	211747	22	212402	31	218301	16
211059	10	211763	32	212404	32	218581	20
211065	10	211768	11	212408	32	218630	29
211086	12	211771	11	212517	82	218671	16
211088	12	211794	16	212519	82	218681	20
211100	23,29	211795	23	212520	82	220090	7
211102	12,24	211805	20	212521	82	220093	7
211106	18	211820	29	212522	82	220097	7
211116	21	211822	11	212524	50	220099	7
211124	10	211824	11	212525	50	220100	25
211125	10	211825	11	212526	50	220109	7
211144	19	211829	27	212527	50	220115	7
211199	15,22	211843	27	212528	50	220116	7
211215	22	211862	28	212529	50	220121	7
211220	13	211870	29	212530	50	220133	7
211221	22	211874	29	212531	50	220210	7
211260	12,26	211875	30	212532	50	220214	8
211263	12,26	211876	30	212536	82	220215	8
211317	22	211883	31	212537	82	220216	8
211327	16	211886	31,83	212539	50	220217	8
211363	22	211887	31,83	212542	50	220218	8
211387	22	211906	29	212543	50	220501	83
211390	22	211910	29	212544	50	220502	83
211393	17,24	211917	30,32	212545	50	220518	8
211401	13	211921	30	212610	28	220530	17
211407	21	211922	30	212919	38	220690	7
211410	21	211925	30	213000	10	220710	7
211436	25	212000	10	213010	31	220908	83
211438	26	212099	39	213020	31	220909	83
211441	26	212104	21,24	213200	14	220958	18
211443	10	212118	20	213300	14	220959	18
211450	13	212122	22	213400	14	221183	39
211456	18	212123	22	214010	28	221240	36
211458	18	212168	11	214030	28	221290	39
211462	13	212185	25	214040	28	221291	39
211502	25	212189	11	214050	28	221387	83
211506	25	212191	11	214340	28	221388	83
211514	26	212203	18,83	214510	28	221541	26,38
211537	23	212205	24	214520	28	221542	26,38
211539	21,23	212218	24	214530	28	221600	35
211546	14	212227	32	214890	31	221602	8
211558	23	212228	32	214891	31	221606	8
211567	14	212240	31,83	214907	25	221607	8
211584	14	212269	32	215085	40	221609	8
211585	14	212272	28	215329	31	221719	23
211597	20	212292	31	215510	28	221741	39
211600	20	212303	28	215530	28	221742	39
211620	20,23	212304	28	215710	27	221783	36
211638	26	212305	11	216830	29	221787	39
211661	14	212306	23	217020	28	221788	39
211665	10	212322	26	217610	30	221808	33

Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.
221949	39	231275	59	231643	63	232202	58
222120	17	231276	59	231645	58	232208	62
222201	36	231278	59	231647	60	232219	58
222204	39	231286	58	231649	62	233000	10
222220	17	231289	64	231650	52	233110	22
222228	34	231290	64	231651	52	233120	22
222320	17	231292	60	231653	63	233391	30
222330	17	231293	60	231656	63	233472	31
222530	17	231296	62	231658	64	233541	32
222810	23	231299	58	231660	58	233542	32
223020	28	231301	58	231662	64	233810	13
223050	28	231302	59	231664	63	233901	31
223210	12	231309	60	231672	61	233910	13
223220	12	231311	60	231674	64	234000	10
223510	17,20	231312	60	231678	59	236210	25
224200	13	231313	60	231682	57	236920	11
225220	27	231314	60	231684	64	236950	11
225250	27	231315	60	231686	59	237200	10
225620	12,26	231319	60	231692	61	237400	10
225640	12,26	231320	61	231693	58	237500	10
225650	12,26	231321	61	231694	61	238210	14
226540	23	231324	61	231696	63	238230	14
227210	15	231328	61	231704	59	238710	21,24
227310	22	231337	62	231705	59	240110	27
227540	20	231342	60	231706	59	240210	27
227610	32	231343	62	231709	62	240230	27
228210	29	231344	62	231713	63	240520	13
228220	29	231352	58	231726	53	240658	52
228530	19	231353	58	231727	53	240661	52
228950	18	231539	62	231729	54	240680	52
229730	21	231544	61	231731	54	240826	52
229810	21	231552	53	231734	53	240827	52
230809	63	231554	53	231735	55,83	240862	80
231000	10	231555	59	231736	55,83	240863	80
231040	53	231562	53	231737	53	240920	20,21
231041	53	231569	62	231741	55,83	240950	56
231045	53	231570	61	231742	54,82	240951	56
231046	53	231571	58	231743	55,83	240952	56
231047	53	231572	58	231746	52	240961	56
231048	53	231575	64	231747	52	241210	18
231057	54	231576	65	231748	52	241320	27
231059	54	231577	65	231749	52	241410	27
231061	54	231578	61	231750	53	241420	27
231063	54	231591	63	231751	63	241810	10
231066	54	231593	63	231752	63	241820	10
231071	54	231597	57	231753	64	241830	10
231075	54	231601	62	231754	64	242420	14,16
231077	54	231603	60	231757	59	242510	16
231089	54	231605	59	231758	59	242720	15
231091	54	231607	63	231760	58	242910	14
231096	54	231609	61	231761	59	243620	30
231098	54	231611	59	231961	33	244420	17,83
231100	54	231613	63	231971	32	244510	27
231108	53	231615	59	232016	60	244520	27
231109	53	231619	62	232043	64	244610	27
231181	30	231621	64	232087	62	244620	27
231248	53	231623	64	232097	60	244820	19
231251	59	231625	57	232100	26,30	244910	19
231263	58	231629	57	232116	58	245000	70
231264	58	231633	64	232149	59	245010	70
231267	58	231635	64	232174	64	245016	71
231268	58	231637	61	232175	64	245029	70
231271	63	231639	57	232184	59	245032	71
231274	63	231641	57	232201	62	245034	71

Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.
245036	71	254084	38	254652	65	254995	67
245038	70	254087	39	254656	66	254996	67
245115	81	254088	40	254657	68	254997	67
245116	81	254089	34	254658	67	254999	65
245122	80	254091	38	254700	61	255084	33
245123	81	254094	36	254702	60	255086	35
245124	80	254095	34	254703	57	255310	25
245128	81	254097	35	254704	63	255320	25
245130	70	254098	35	254708	61	255420	18
245140	70	254104	40	254710	60	255460	56
245150	70	254105	40	254711	63	255504	38
245152	17	254106	40	254712	61	255506	35
245159	81	254107	40	254713	63	255509	33
245302	71	254108	38	254714	62	255529	34
246001	74	254400	33	254715	63	256006	35
246003	74	254403	34	254718	57	256030	56
246004	74	254406	34	254719	60	256044	39
246007	74	254413	36	254722	64	256050	56
246009	74	254419	38	254724	64	256054	33
247010	17,24	254429	35	254725	63	256058	33
247110	14,16	254430	36	254726	58	256180	34
247910	26	254443	33	254727	58	256391	56
247930	26	254444	37	254728	62	256501	33
247940	26	254447	37	254729	62	256506	34
248020	16	254451	38	254730	60	256525	35
248200	12	254464	34	254731	64	256628	86, 87
249210	22	254476	39	254734	63	256644	86, 87
249240	22	254479	39	254739	58	256645	86, 87
249560	46	254480	33	254741	57	256660	87
249610	24	254481	37	254744	57	256662	87
251960	55	254485	38	254749	57	257002	38
252260	55	254489	40	254750	58	257004	37
252360	55	254490	33	254752	59	257008	38
252480	56	254493	40	254755	63	257011	34
253310	28	254515	40	254758	63	257021	37
253610	11	254539	37	254760	64	257026	36
254001	34	254546	33	254762	64	257073	38
254003	34	254549	37	254766	59	257074	40
254005	34	254550	36	254775	64	257079	36
254007	35	254553	35	254785	63	257099	40
254014	35	254554	36	254788	62	257204	29
254021	36	254555	36	254797	58	257255	30
254023	38	254602	66	254799	58	257303	35
254029	37	254603	68	254802	59	257306	35
254030	37	254604	68	254808	60	257321	33
254035	37	254607	66	254815	62	257347	47
254039	38	254609	65	254819	61	257372	40
254041	38	254611	65	254821	60	257388	66
254042	38	254612	65	254822	60	257419	66
254046	34	254613	67	254823	60	257420	66
254050	36	254614	65	254828	61	257434	40
254053	39	254616	66	254855	60	257435	40
254056	40	254621	66	254858	58	257440	67
254058	36	254623	67	254875	61	257441	66
254060	34	254625	65	254878	64	257444	68
254063	37	254627	65	254881	60	257445	86
254069	34	254628	65	254882	59	257449	86
254070	34	254629	67	254893	63	257461	65
254071	34	254631	66	254920	14	257462	66
254072	35	254643	68	254986	66	257463	66
254073	35	254645	65	254988	66	257464	65
254076	36	254647	67	254991	67	257480	40
254080	37	254648	65	254992	67	257481	40
254082	37	254651	67	254993	67	257537	66

Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.
257551	67	273300	19	300912	47	447111	77
257552	67	274210	19	364810	46,47	447157	77
257631	29	274500	20	364815	46	447202	90
260001	42	274520	23	367282	46	447204	91
260002	42	274710	14	367284	46	447206	91
260003	42	274720	14	367295	46	447214	90,91
260100	19,22	275710	10	367300	47	447250	93
260300	19,22	275730	10	367953	47	447262	93
260411	42	278820	20	440809	47	447263	93
260457	57	278850	20	440887	88	447265	92
260622	42	279100	23	440910	71, 73	447266	92
260626	42	279110	25	440980	88	447267	92
260628	42	279220	10	440981	88	447268	92
260640	57	279240	10	441007	86, 87	447269	93
260660	57	279410	17	441107	86, 87	447270	93
260661	57	279510	31	441132	73	447271	93
260671	42	281210	28	441184	86, 88	447272	93
260672	42	281230	28	441185	88	447273	93
260673	42	281910	24	441195	77	447274	93
260674	42	283610	32	441370	47	447290	90
260678	42	284920	22	441385	45	447291	92
260679	43	285310	20	441386	45	447293	91
260680	43	285340	20	441387	45	447297	91
260683	43	285420	19	441388	45	447298	92
260684	43	285610	16,25	441404	86	447299	92
260685	43	288110	16	441470	47	447300	92
261181	51,71	288130	16	441510	87	447301	92
261182	51	288210	16	441624	73	447302	92
261185	50	289410	12	441679	80	447303	92
261187	50,71	291028	61	441680	80	447305	91
261190	51	291034	62	441743	80	447306	92
261191	51	291037	62	441951	71, 74	447307	92
261192	51	291062	61	442003	46	448007	77
261193	51	291269	58	442026	46	448008	77
261196	51	291277	63	442153	46	448020	73
261203	51,71	291280	59	442192	45	448025	73
261204	51	291282	60	442193	45	448028	73
262200	12	291287	61	442194	45	448030	73
262710	18,83	291309	59	442206	46	448031	74
263010	25	291311	62	442265	45	448037	73
263110	25	291370	57	442296	45	448040	73
263620	17	292847	25	444374	82	448100	73
263710	32	292848	26	445516	47	448103	74
264100	12	294221	21,24	445518	47	448282	76
264120	15	294420	10	445529	47	448284	77
264210	14	295042	61	445800	45	448292	76
264300	12	295067	27	445810	47	448311	75
264410	23	295306	57	445870	80	448316	77
265020	13	295339	60	445871	81	448761	75
266647	62	296398	62	445872	80	448762	77
268010	24	296589	62	445873	82	448768	76
268110	25	296986	64	445874	82	448769	75
268510	13	297354	11	445888	82	448770	76
268620	24	297596	10	445941	80	448771	75
268740	20	297890	36	445942	82	448775	75
268820	23	298123	12	445943	81	448781	75
269720	26	298147	29	445944	81	448785	76
271051	43	298410	26	445945	81	448984	77
271056	47	299068	21,24	445946	81	100-1162-01	77
271210	15	299070	10	445993	81	100-1181-01	77
271310	18,83	299896	39	445999	81		



Helping all people
live healthy lives

Представительство компании BD
в России и СНГ:
127018, Москва, ул. Двинцев, 12, к. 1
БЦ «Двинцев», здание С
Тел.: +7 495 775 85 82
Факс: +7 495 775 85 83
www.bd.com/ru